

CAROLI BODYGUIDE®

INNOVATIVE
SOFTORTHETIK



Inhalt

ALLGEMEIN

Bodyguide® Softorthetik	3
Bodyguide® Technische Merkmale	4

BODY-SEGMENT

Massblatt und Skizzenblatt	6 – 8
Massanleitung	9 – 10

WESTE

Massblatt und Skizzenblatt	12 – 13
Massanleitung	31 – 35

TOP/BODY

Massblatt und Skizzenblatt	16 – 17
Massanleitung	31 – 35

T-SHIRT/BODY

Massblatt und Skizzenblatt	20 – 21
Massanleitung	31 – 35

LANGARM-SHIRT / BODY

Massblatt und Skizzenblatt	24 – 26
Massanleitung	31 – 35

ZUSATZ-MASSBLATT OBERTEILE

Skizzenblatt	28
Massanleitung	29 – 30

LEGGINS KURZ / FROGGY-PANTY KURZ

Massblatt und Skizzenblatt	38 – 40
Massanleitung	45 – 47

LEGGINS LANG / FROGGY-PANTY LANG

Massblatt und Skizzenblatt	42 – 44
Massanleitung	45 – 47

JUMPSUIT KURZ

Massblatt und Skizzenblatt	50 – 53
Massanleitung	60 – 63

ZUSATZ-MASSBLATT KURZE ÄRMEL

Skizzenblatt	53
Massanleitung	64 – 66

JUMPSUIT LANG

Massblatt und Skizzenblatt	56 – 59
Massanleitung	60 – 63

ZUSATZ-MASSBLATT LANGE ÄRMEL

Skizzenblatt	59
Massanleitung	64 – 66

ABNEHMBARE ÄRMEL

Massblatt und Skizzenblatt	68 – 70
Massanleitung	71 – 72

HANDSCHUH

Massblatt und Skizzenblatt	74 – 76
Massanleitung	77 – 79

ARM-SLEEVE

Massblatt und Skizzenblatt	82 – 84
Massanleitung	85 – 86

BEIN-SLEEVE

Massblatt und Skizzenblatt	87 – 89
Massanleitung	90 – 91

FUSSHEBE-SLEEVE

Massblatt und Skizzenblatt	93 – 95
Massanleitung	96 – 98

BODYGUIDE® Innovative Softorthetik

Die Produkte unserer BODYGUIDE® Serie wurden mit dem Ziel entwickelt, Kindern und Erwachsenen mit neuromotorischen und muskuloskeletalen Defiziten zu helfen und ihre Körperwahrnehmung und Sinnesverarbeitung zu verbessern. Wir produzieren unsere BODYGUIDE® Softorthetik nach Ihren Vorgaben in eigener Fertigung. Hierbei greifen wir auf eine langjährige Erfahrung bei der Herstellung von textilen Rumpforthesen zurück. Farbenfrohe Textilien, unterschiedlichste Verschlusssysteme und individuelle Kundenwünsche werden hierbei berücksichtigt und realisiert. Spezielle Maschinen und geschultes Fachpersonal garantieren bei der Verarbeitung elastischer Materialien eine schnelle Umsetzung und Lieferung.

Wirkungsweise:

Durch die passformgenauen und eng anliegenden BODYGUIDE® Produkte aus elastischen Materialien verbessern sich die Stabilität, Aufrichtung und Haltung des Rumpfes und der angrenzenden Gelenke wie Schulter und Hüfte sowie der Extremitäten, ohne hierbei die Restfunktion und Bewegung des Patienten einzuschränken. Durch den kompressiven Druck auf die oberflächlichen Hautstrukturen wird eine propriozeptive Wirkung erzeugt, die zu einer Verbesserung der Körperwahrnehmung von Bewegungen, der Lage im Raum und der Position einzelner Körperteile zueinander führt. Aufgrund des hohen Tragekomforts, einer sehr guten Atmungsaktivität und einer ausgezeichneten Regulierung des Wärmehaushalts stellen die Produkte der BODYGUIDE® Serie eine optimale Alternative zu herkömmlichen orthetischen Versorgungen dar.



Technische Merkmale:

- Propriozeptive Wirkung zur Verbesserung der Körperwahrnehmung
- Innovative Schnitttechnik
- Vielfältige Farbvarianten und Muster
- Unterschiedliche Verschlussysteme
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Optimale Passform
- Öko-Tex zertifizierte Stoffe
- Weste, Shirt, Langarmshirt, Leggins
- inklusive einer Änderung
- inklusive eines Verschlusssystems bei den Oberteilen


Indikation:

Die Produkte der BODYGUIDE Serie eignen sich für Kinder und Erwachsene mit neuromotorischen und muskuloskelettalen Defiziten unterschiedlichster Grunderkrankungen wie z. B. ICP, Rett Syndrom, Autismus, Schlaganfall, Down Syndrom oder traumatischen Einflüssen mit folgenden Symptomen:

- Cerebrale Lähmungen
- Muskuläre Hypertonie und Hypotonie
- Bewegungs- und Sinnesverarbeitungsstörungen
- Störungen der Körperwahrnehmung
- Haltungs- und Stabilitätseinschränkungen des Rumpfes, Schulter, Hüfte und Extremitäten



Alle Textilien der BODYGUIDE®-Linie sind bei 30 °C in der Waschmaschine waschbar.

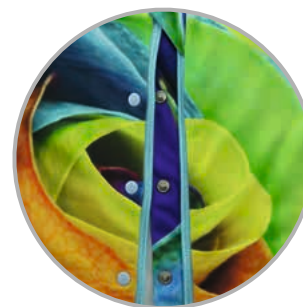

Um die Vorspannung zu verringern und somit das Schließen des Reißverschlusses zu erleichtern kann er optional mit Druckknöpfen unterlegt werden.



Für sicheres Öffnen und Schließen des Reißverschlusses sorgt eine unterlegte Stoffleiste, die den oberen Abschluss des Reißverschlusses umschließt.



Steckverschluss als Alternative zu Druckknöpfe oder Klettverschluss.




Anziehhilfe für lange Leggins und Langarm-Shirts.



Säume optional mit Haftband.

Es stehen verschiedene Ausführungen als Sonden- und Stomaöffnung zur Auswahl. Zu jeder Ausführung kann eine befestigte oder lose Abdeckung, mit Klettverschluss zum Öffnen, bestellt werden.

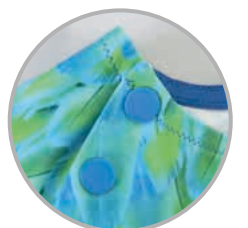

Druckknöpfe und Reißverschlüsse in vielen verschiedenen Farben.



Flexibel (nur mit elastischer Naht eingefasst).



Leicht verstärkt/stabilisiert mit Abdeckung (mit unelastischem Material verstärkt).



Mit Verstärkungsrahmen (fest)



BODY-SEGMENT

Das Body-Segment wurde zur minimaleren Versorgung im Bereich des Abdomens wie z. B. Bauchdeckenschwäche entwickelt. Wie auch bei unserer Weste besteht das Rückenteil aus einem speziellen klettfähigen, atmungsaktiven Schaumstoff (Abstandsgewirke). Hierdurch kann das Segment im Umfang reguliert und an wachstumsbedingte Veränderungen als auch bei veränderten Haltungspositionen (Liegen, Sitzen) angepasst werden. Neben den stabilisierenden und herausnehmbaren Stäben im vorderen und hinteren Bereich sorgt der Reißverschluss in der vorderen Mitte für ein leichtes Anlegen der Bandage.

Der Grundpreis beinhaltet:

- Vorderteil 2-lagig
- Rückenteil 1-lagig (atmungsaktiver, kaschierter Schaumstoff)
- Im Umfang mittels Klettverschluss anpassbar
- Reißverschluss in der vorderen Mitte
- Herausnehmbare Stäbe

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.


MASSBLATT 1 BODY-SEGMENT



Body-Segment



Body-Segment mit Schritzwinkel

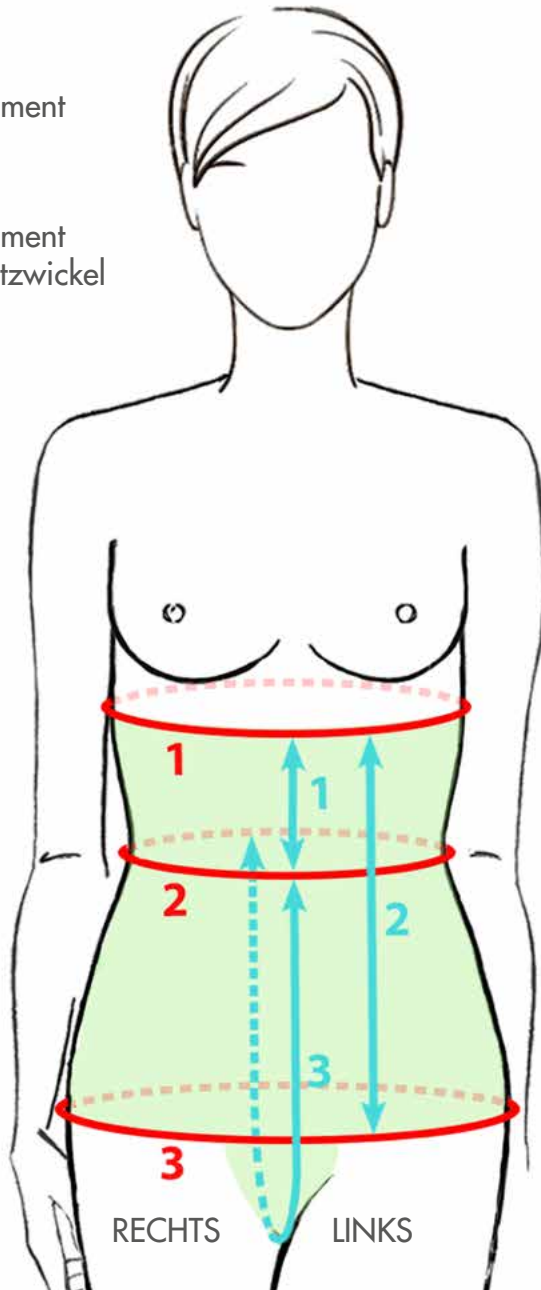

1. Oberer Abschluss.....
2. Taillenumfang.....
3. Unterer Abschluss.....

Umfangmaße

1. Taillenhöhe (Oberer Abschluss-Taile).....
2. Gesamthöhe.....
3. Schrittlänge.....

Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 BODY-SEGMENT

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen) *

2. Ausführung: (Standardausführung Vorderteil 2-lagig, Rückenteil 1-lagig)

- Vorderteil 3-lagig
- Rückenteil 2-lagig

3. Verschluss: (zusätzlich)

- Reißverschluss**
- Rechts Links
- Teilbar Nicht teilbar, lang Nicht teilbar, kurz
- Mit Druckknöpfen unterlegt Reißverschluss umgedreht (öffnet von unten)

4. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

Bitte vorab ungefähre Position angeben, oder auf Maßblatt 3 einzeichnen. Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren, sowie Größe und Form angeben.

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

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
- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss
 - Rechts befestigt Links befestigt
 - Oben befestigt Unten befestigt Lose

5. Schritzwinkel


- Klettverschluss vorne
- Druckknöpfe vorne
- Steckschließe vorne



Black



White

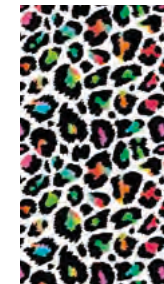

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

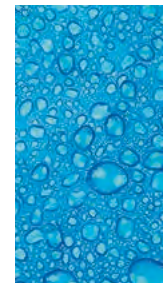

Rain




Zoo

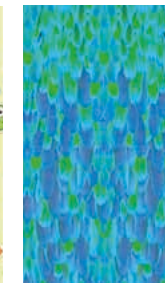

Wings



Wall

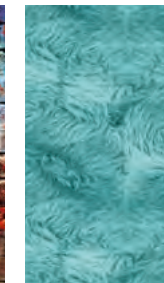

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

6. Reißverschlüsse und Nähte

- Passend zum Design
- Kontrastfarbe:
 - Schwarz Weiß Grau Blau Türkis Grün
 - Gelb Orange Rot Pink Rosé



* Beim Body-Segment ist unabhängig vom Design der Rücken immer aus schwarzem Material.

SKIZZENBLATT BODY-SEGMENT

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

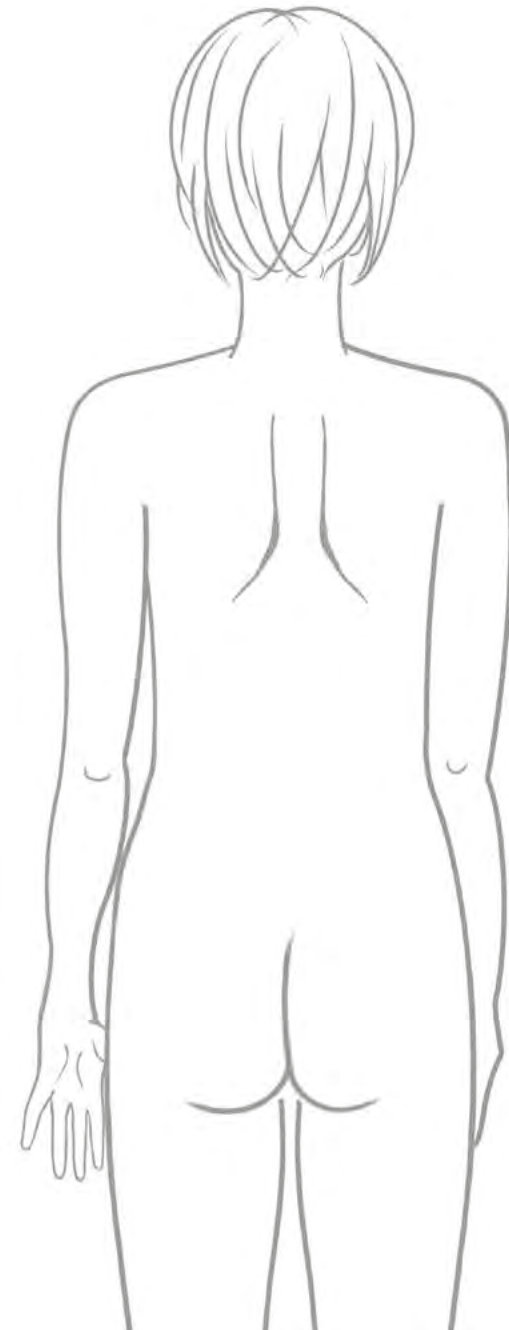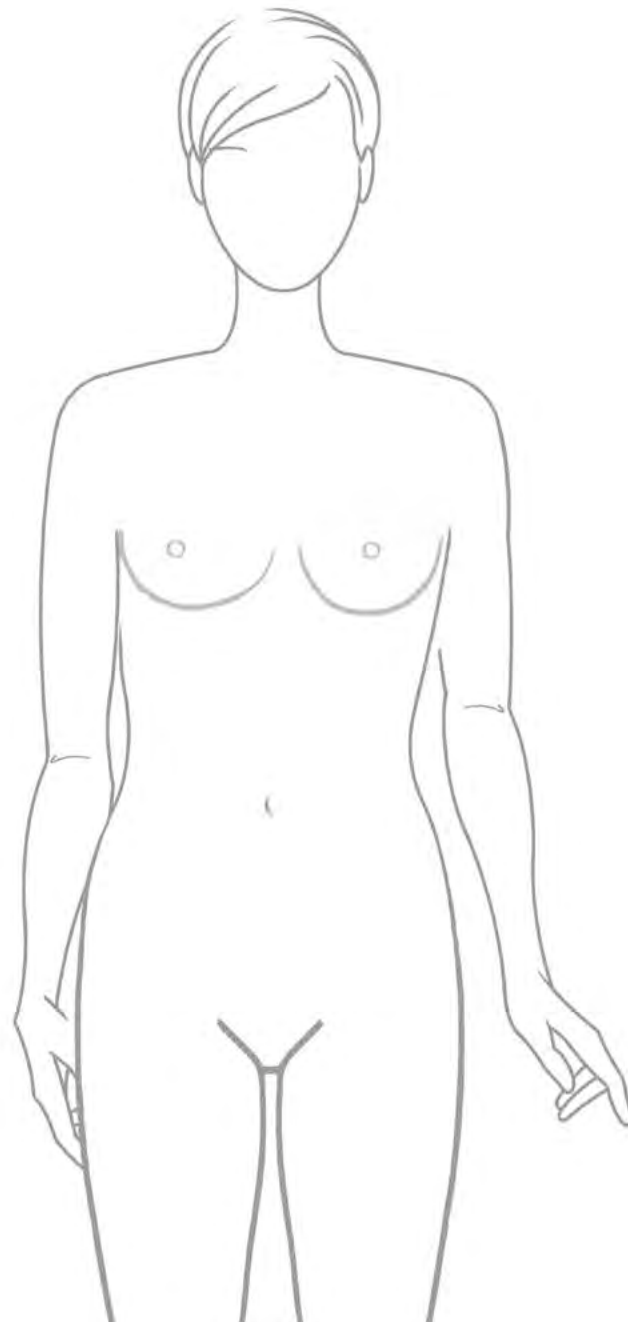

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für BODYGUIDE® Segment

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil, über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem wegwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**.

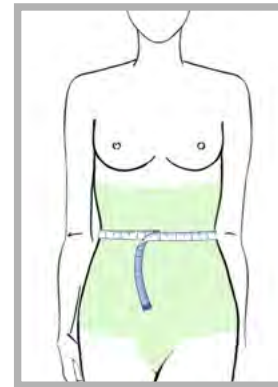


Als erstes sollte die Position der Taillienlinie festgelegt werden, indem man das Taillienmaßband waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung (meistens auf Bauchnabelhöhe) legt und dort belässt.

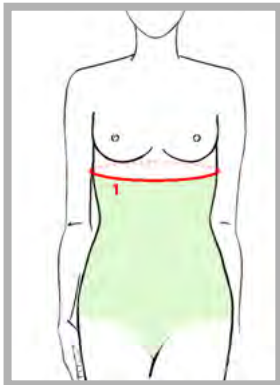


1. Oberer Abschluß

Der obere Abschluß wird waagrecht zirkulär auf Höhe der gewünschten oberen Länge gemessen.

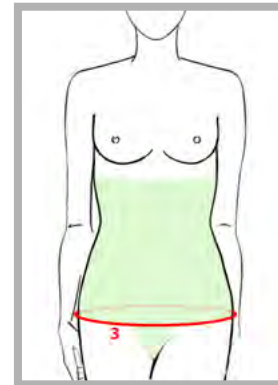


3. Unterer Abschluß

Auch der untere Abschluß wird waagrecht zirkulär auf Höhe der gewünschten unteren Länge gemessen.

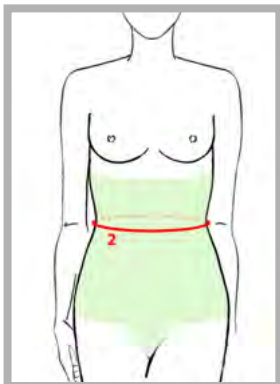


2. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird auch wieder waagrecht, zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung, oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.

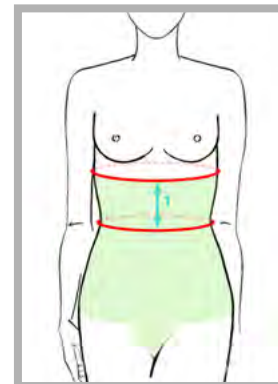


1. Taillenhöhe (Oberer Abschluß-Taille)

Hier wird vom oberen Abschluß vertikal bis zur Taillenhöhe gemessen.

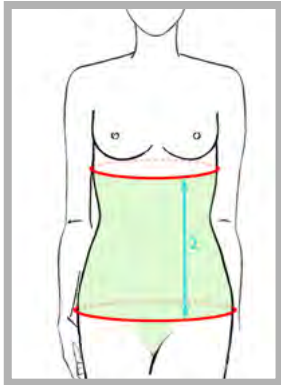

2. Gesamthöhe


Hier wird vertikal, vom oberen Abschluß bis zum unteren Abschluß gemessen.

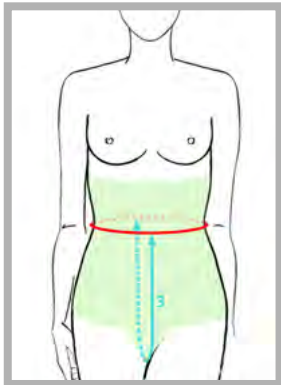

3. Schrittweite

Dieses Maß wird nur benötigt, wenn ein Schrittwinkel gewünscht ist. Hier wird von der vorderen Taillenhöhe (Mitte Taillenmaßband vorne) über den Schritt bis zur hinteren Taillenhöhe (Mitte Taillenmaßband hinten) gemessen.



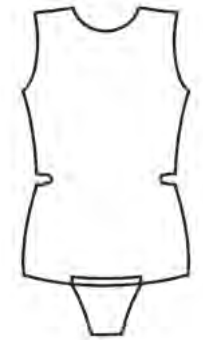

WESTE

Unsere BODYGUIDE®-Weste zeichnet sich besonders durch eine große Verstellbarkeit in der Höhe und in der Weite aus und ist somit als mitwachsende Versorgung oder auch für eine erste Beurteilung einer Soforthesenversorgung bestens geeignet. In Verbindung mit der Backbone Rückenverstärkung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Einfluss auf die Stabilität und Aufrichtung des Rumpfes zu nehmen. Die Rückenverstärkung aus bruchfestem Thermoplast lässt sich schnell und einfach mit einem Heißluftgebläse an die Körperkonturen anpassen und in der taschenartigen Konstruktion der Weste mittels Klettverschluss positionieren und fixieren.

Der Grundpreis beinhaltet:

Weste

- Vorderteil 2-lagig
- Rückenteil 1-lagig aus atmungsaktivem kaschiertem Schaumstoff
- Schrittzwickel (komplett abnehmbar)
- Mittels Klettverschlüssen stufenlos bis zu zwei Größen in Länge und Umfang verstellbar


Weste mit Backbone

- Vorderteil 2-lagig
- Rückenteil 2-lagig aus atmungsaktivem kaschiertem Schaumstoff mit integrierter Tasche für Backbone
- Thermoplastisch verformbare Rückenverstärkung Backbone
- Schrittzwickel (komplett abnehmbar)
- Mittels Klettverschlüssen stufenlos bis zu zwei Größen in Länge und Umfang verstellbar

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 WESTE

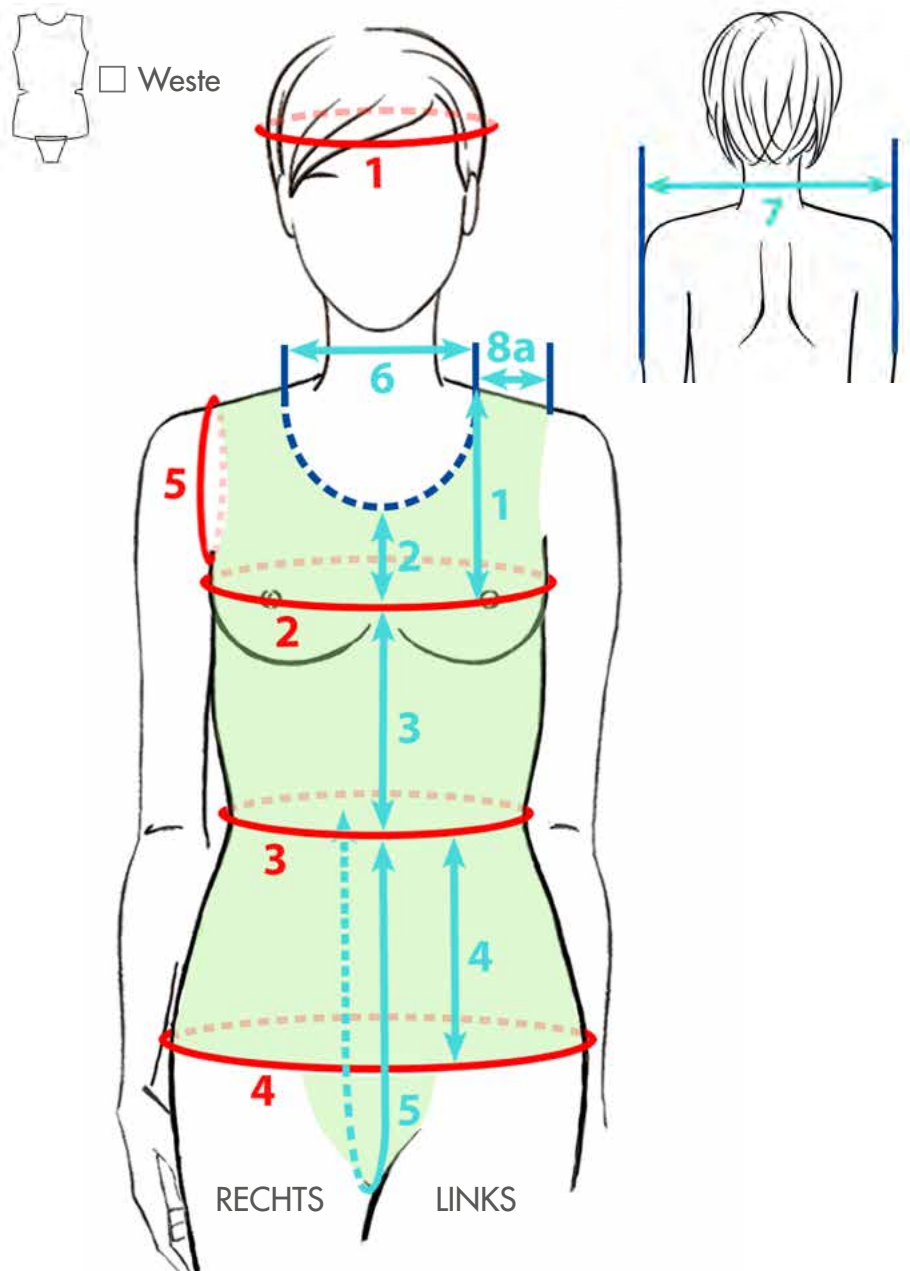

1. Kopfumfang.....

2. Brustumfang.....

3. Taillenumfang.....

4. Hüftumfang.....

4a. Umfang unterer Abschluss.....

5. Vertikaler Schulterumfang.....

Rechts	Links

UmfangsmäÙe

1. Brusthöhe (Schulter-Brust).....

2. Halsausschnitt Tiefe.....

3. Vorderlänge (Brust-Taile).....

4. Hüfttiefe (Taille-Hüfte).....

4a. Länge unterer Abschluss (Taille-Saum).....

5. Schrittlänge.....

6. Halsausschnittbreite.....

7. Gesamte Schulterbreite.....

8a. Trägerbreite.....

LängenmäÙe

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG	
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich	
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen) *

2. Ausführung: (Standardausführung Vorderteil 2-lagig, Rückenteil 1-lagig)

- Vorderteil 3-lagig
- Rückenteil 2-lagig

3. Verschluss: (zusätzlich)

- Reißverschluss
 - Vorne Rechts Links
 - Teilbar Nicht teilbar, lang Nicht teilbar, kurz
 - Mit Druckknöpfen unterlegt Reißverschluss umgedreht (öffnet von unten)

4. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

Bitte vorab ungefähre Position angeben, oder auf Maßblatt 3 einzeichnen. Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren, sowie Größe und Form angeben.

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

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
- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)
- Leicht verstärkt/stabilisiert
- Mit Verstärkungsrahmen (fest)
- Abdeckung mit Klettverschluss
 - Rechts befestigt Links befestigt
 - Oben befestigt Unten befestigt Lose

5. Zubehör:


- Backbone
- Abnehmbarer Ärmel*
 - Rechts Links

6. Schritzwinkel

- Klettverschluss vorne
- Druckknöpfe vorne
- Steckschließe vorne



Black

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

White



Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

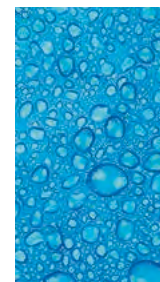

Rain



Zoo

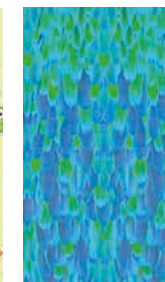

Wings



Wall




Fur



Silver



Flash

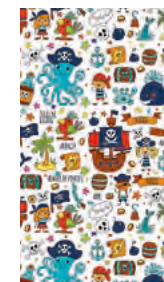

Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

7. Reißverschlüsse und Nähte

- Passend zum Design
- Kontrastfarbe:

<input type="checkbox"/> Schwarz	<input type="checkbox"/> Weiß	<input type="checkbox"/> Grau	<input type="checkbox"/> Blau	<input type="checkbox"/> Türkis	<input type="checkbox"/> Grün
<input type="checkbox"/> Gelb	<input type="checkbox"/> Orange	<input type="checkbox"/> Rot	<input type="checkbox"/> Pink	<input type="checkbox"/> Rosé	

*bitte zusätzlich das Maßblatt 1 + 2 „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 68 – 69 ausfüllen.



* Bei der Weste ist unabhängig vom Design der Rücken immer aus schwarzem Material.

SKIZZENBLATT WESTE

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

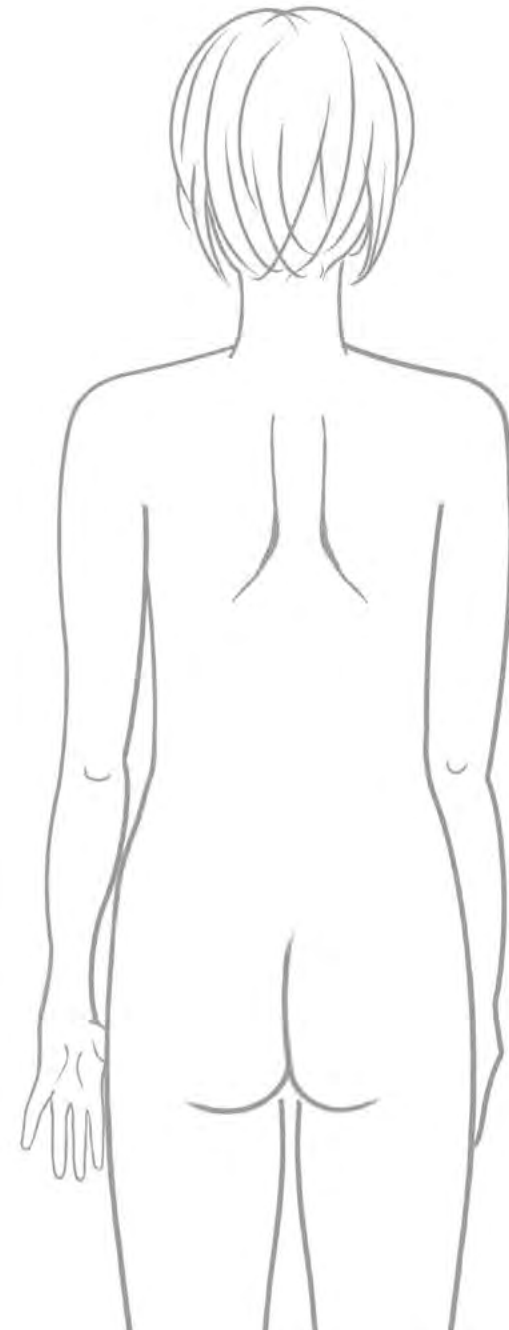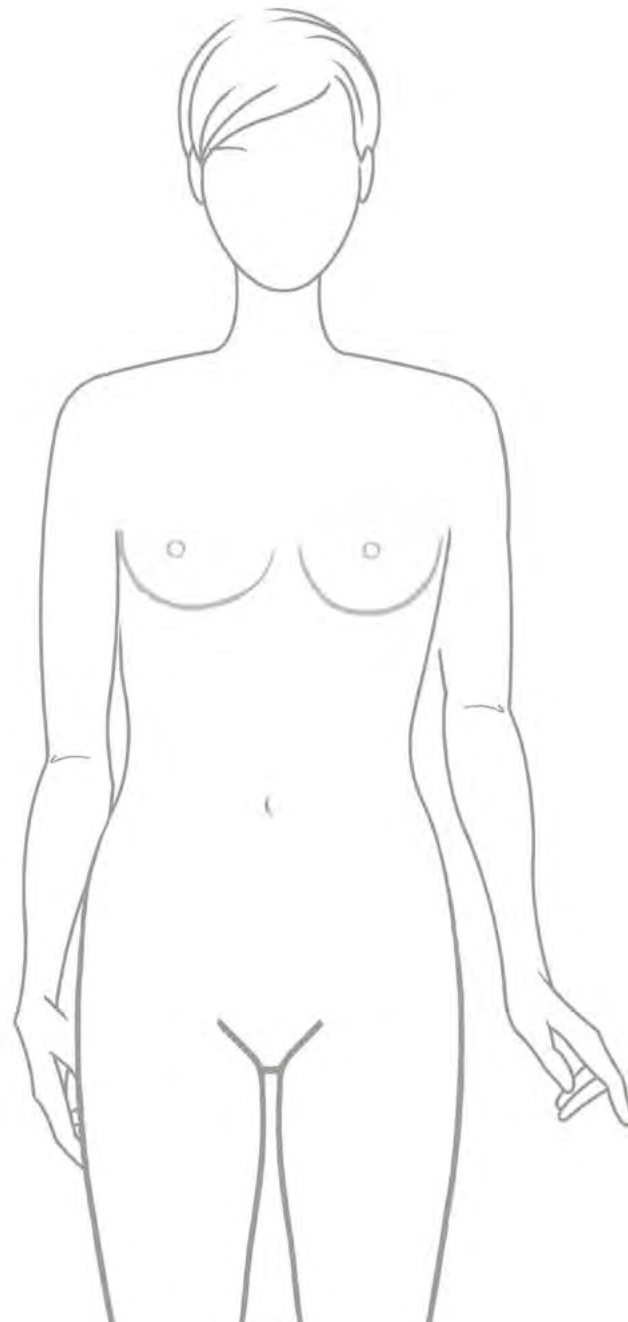

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.



TOP/BODY

Das BODYGUIDE®-Top und der ärmellose Body sind für die Versorgung von Wahrnehmungsdefiziten des Rumpfes sowie der Aufrichtung und Stabilisierung geeignet.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung
- 1 Verschlussart (Reißverschluss im Vorder-, oder Rückenteil, Klettverschluss oder Druckknöpfe an der Schulter)
- 1 Änderung nach der Anprobe

Beim Body ist zusätzlich ein vorne zu öffnender Schrittzwickel (Klettverschluss, Druckknöpfe oder Steckschließe) inklusive. Die Auslieferung erfolgt zunächst halbfertig.

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:


- 2- oder 3-lagige Ausführung
- Zusätzliche Verschlüsse
- Haftband am Saum
- Korrekturzüge
- Abnehmbarer Ärmel
- Abnehmbarer Schrittzwickel (beim Top)
- Stoma oder Sondenausschnitt mit oder ohne Abdeckung

Das Top und der ärmellose Body können mit den Leggings kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 TOP/BODY

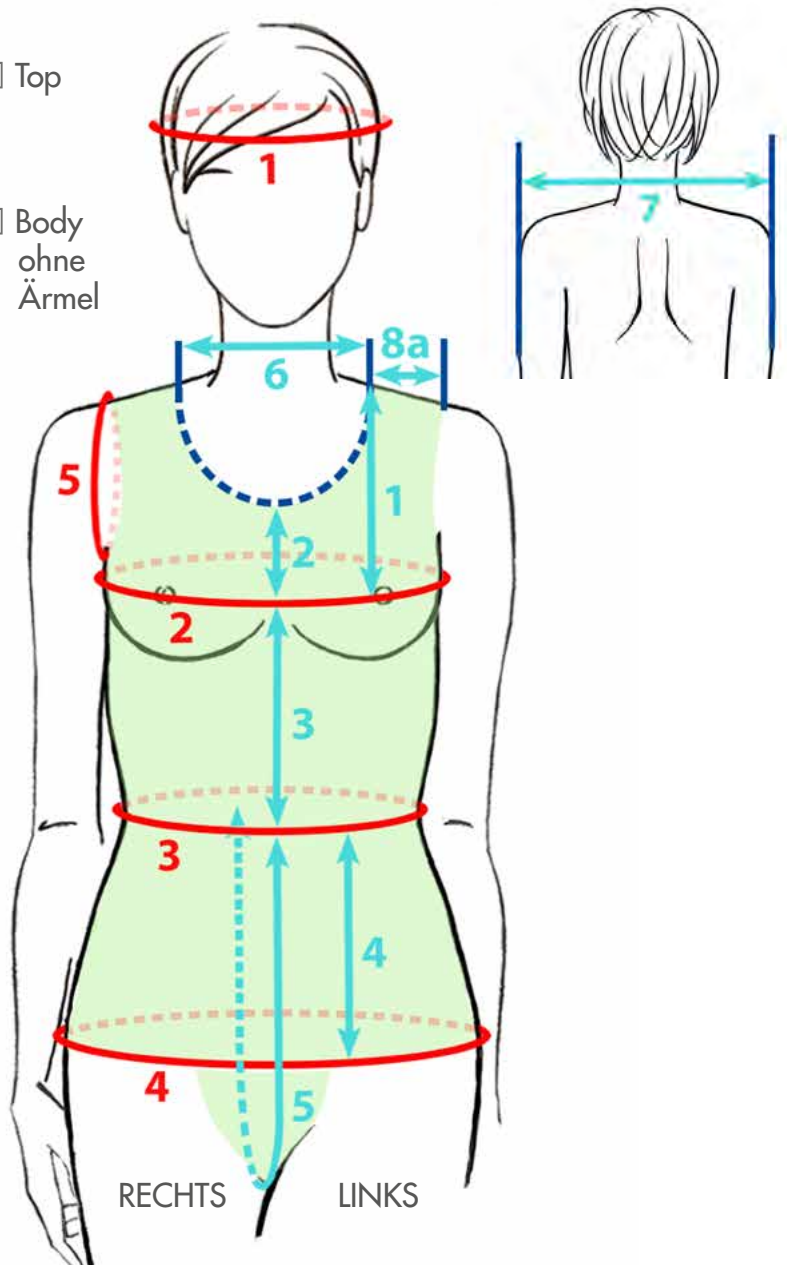

Umfangsmäße

1. **Kopfumfang**.....

2. **Brustumfang**.....

3. **Taillenumfang**.....

4. **Hüftumfang**.....

4a. Umfang unterer Abschluss.....

Rechts	Links

Längenmaße

1. **Brusthöhe (Schulter-Brust)**.....

2. **Halsausschnitt Tiefe**.....

3. **Vorderlänge (Brust-Taille)**.....

4. **Hüfttiefe (Taille-Hüfte)**.....

4a. Länge unterer Abschluss (Taille-Saum).....

5. **Schrittlänge (bei Body & Schritzwinkel)**.....

6. **Halsausschnittbreite**.....

7. **Gesamte Schulterbreite**.....

8a. **Trägerbreite**.....

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- Vorderteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig
 Rückenteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig
 Zweite Lage Vorder- und Rückenteil als separates Top

3. Haftband:

- Saum

4. Verschluss:

Reißverschluss Rumpf

- Vorne Hinten Rechts Links
 Teilbar Nicht teilbar Lang Kurz
 Mit Druckknöpfen unterlegt Reißverschluss umgedreht (öffnet von unten)

Verschluss Schulter

- Druckknöpfe Klettverschluss Reißverschluss Steckschließe
 Rechts Links
 Mit Druckknöpfen unterlegt

5. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

Bitte vorab ungefähre Position angeben, oder auf Maßblatt 3 einzeichnen. Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren, sowie Größe und Form angeben.

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst) Leicht verstärkt/stabilisiert
 Mit Verstärkungsrahmen (fest)
 Abdeckung mit Klettverschluss
 Rechts befestigt Links befestigt Oben befestigt
 Unten befestigt Lose

6. Schritzwinkel

- Klettverschluss: Vorne Hinten
 Druckknöpfe: Vorne Hinten
 Steckschließe: Vorne Hinten

7. Verbindung mit Leggings

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
Bitte bei der Anprobe Position der Überlappung markieren
 Druckknöpfe Klettverschluss Steckschließe

8. Abnehmbare Ärmel*


- Rechts Links



Black



White

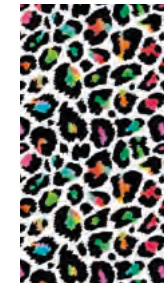

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

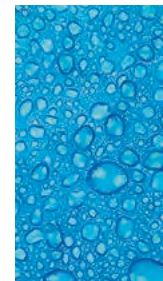

Rain




Zoo

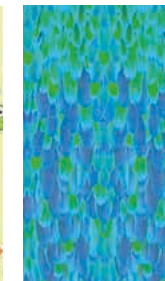

Wings



Wall

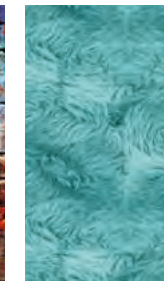

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

9. Reißverschlüsse und Nähte

- Passend zum Design

- Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |



*bitte zusätzlich das Maßblatt 1 + 2 „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 68 – 69 ausfüllen.

SKIZZENBLATT TOP/ BODY

Korrekturzüge:


Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

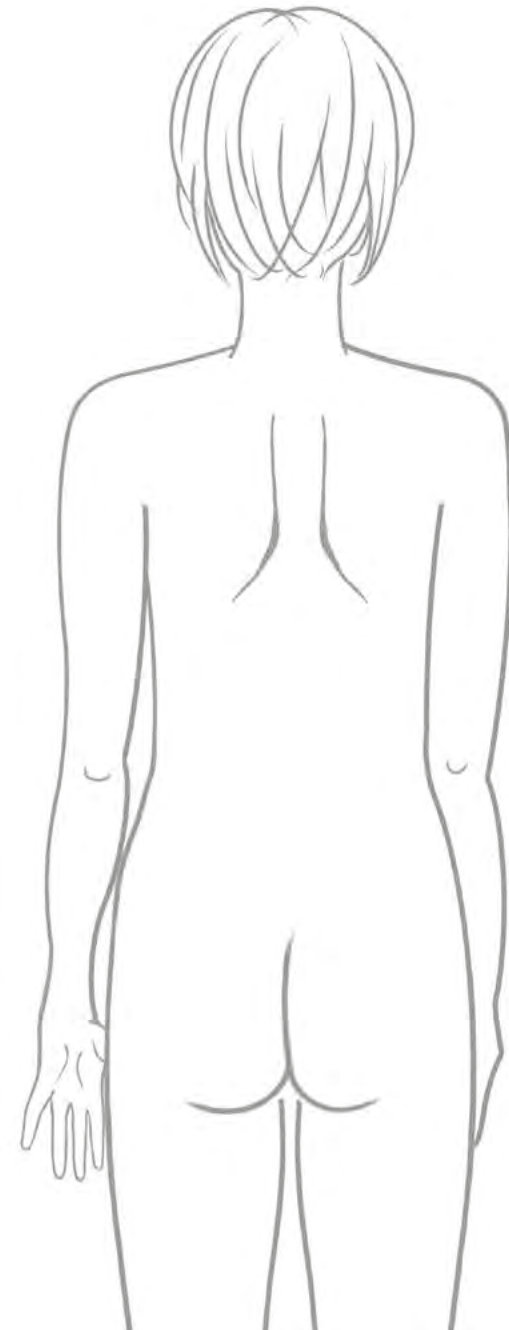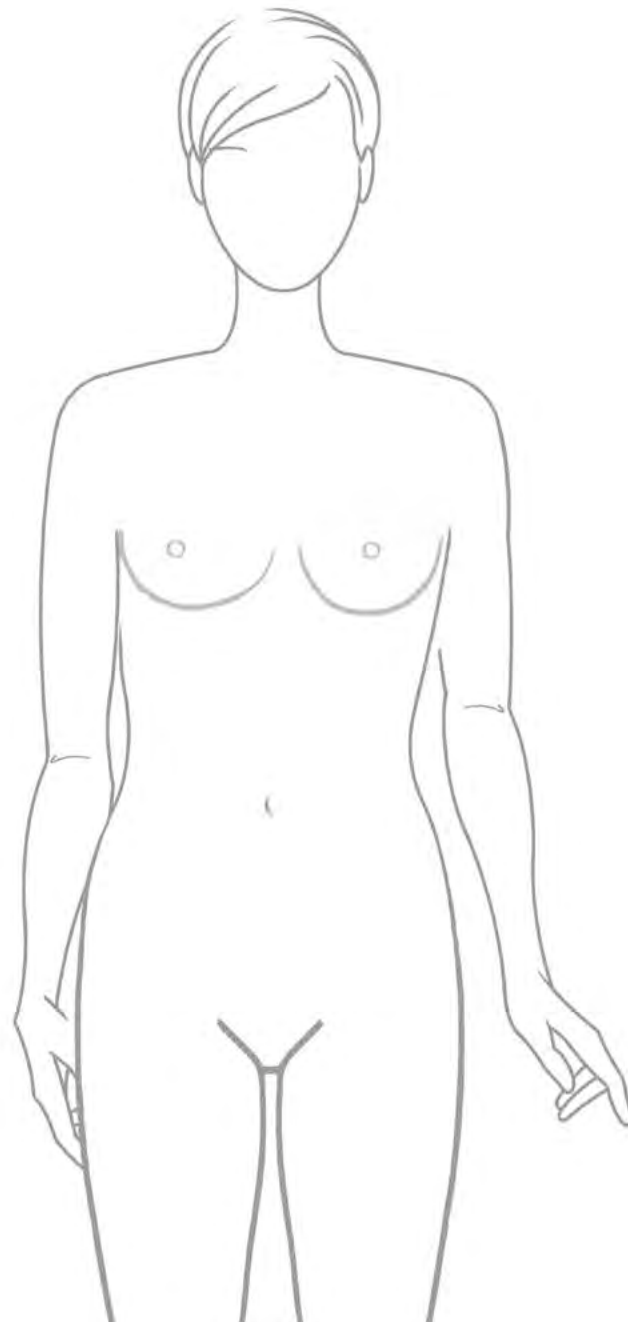

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

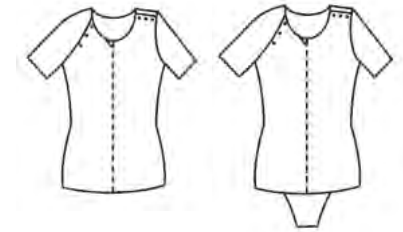

T-SHIRT/BODY

Das BODYGUIDE®-T-Shirt und der Body mit kurzen Ärmeln sind für Wahrnehmungsdefizite im Rumpfbereich sowie der oberen Extremitäten geeignet. Durch die Ärmel bzw. die schulterübergreifende Schnittkonstruktion kann eine bessere Stabilisierung und Aufrichtung des Rumpfes ermöglicht werden. Optional können Haltungskorrekturen durch zusätzliche Lagen oder Korrekturzüge vorgenommen werden.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung (Rumpf und Ärmel)
- 1 Verschlussart (Reißverschluss im Vorder-, oder Rückenteil, Klettverschluss oder Druckknöpfe an der Schulter)
- 1 Änderung nach der Anprobe

Beim Body ist zusätzlich ein vorne zu öffnender Schrittzwickel (Klettverschluss, Druckknöpfe oder Steckschließe) inklusive. Die Auslieferung erfolgt zunächst halbfertig.

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:

- 2- oder 3-lagige Ausführung
- Zusätzliche Verschlüsse
- Haftband am Saum und/ oder an den Ärmeln
- Korrekturzüge
- Abnehmbarer Schrittzwickel (beim T-Shirt)
- Stoma oder Sondenausschnitt mit oder ohne Abdeckung

Das T-Shirt und der Body mit kurzen Ärmeln können mit den Leggings kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.


MASSBLATT 1 KURZARM-SHIRT / BODY



Kurzarm-Shirt



Kurzarm-Body

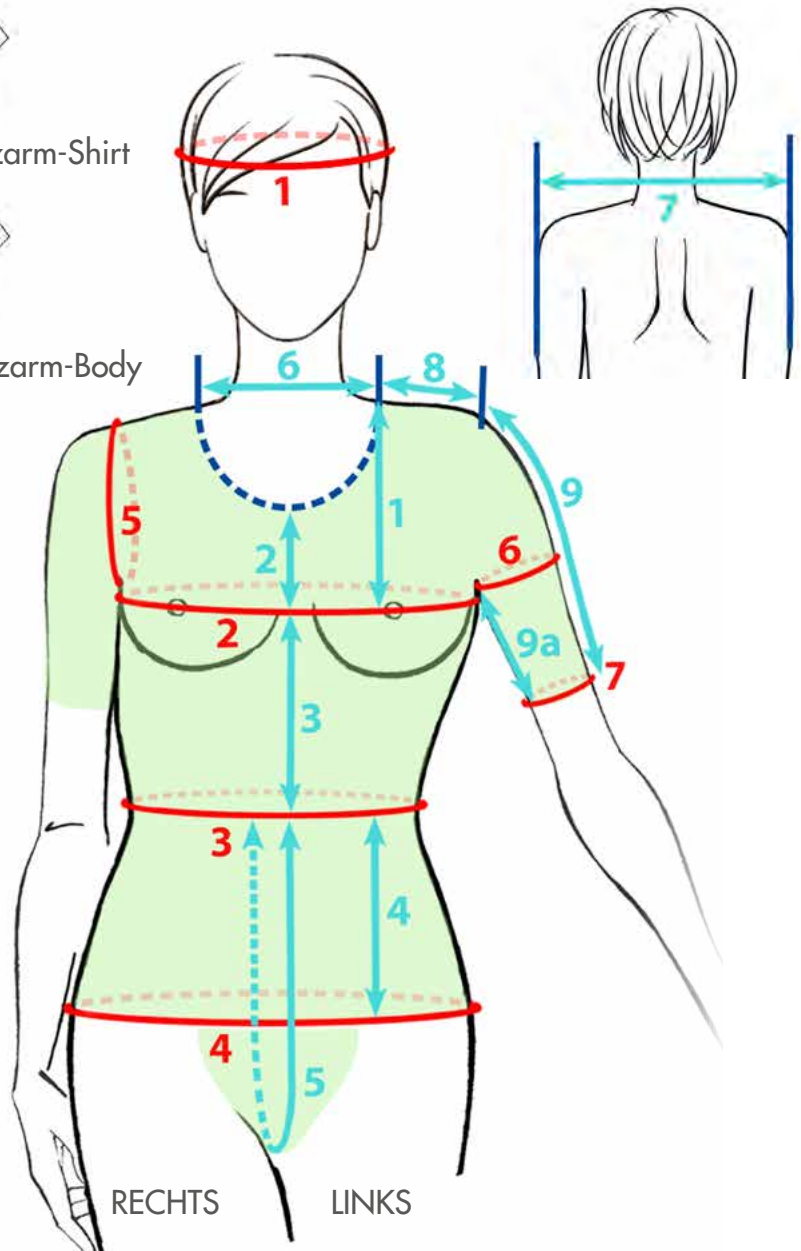

- 1. **Kopfumfang**.....
- 2. **Brustumfang**.....
- 3. **Taillenumfang**.....
- 4. **Hüftumfang**.....
- 4a. Umfang unterer Abschluss.....

Rechts	Links

Umfangsmße

- 5. **Vertikaler Schulterumfang**.....
- 6. **Oberarmumfang**.....
- 7. **Umfang Bizeps / Ärmelabschluss**.....

- 1. **Brusthöhe (Schulter-Brust)**.....
- 2. **Halsausschnitt Tiefe**.....
- 3. **Vorderlänge (Brust-Taille)**.....
- 4. **Hüfttiefe (Taille-Hüfte)**.....
- 4a. Länge unterer Abschluss (Taille-Saum).....
- 5. **Schrittlänge (bei Body & Schrittzwickel)**.....
- 6. **Halsausschnittbreite**.....
- 7. **Gesamte Schulterbreite**.....
- 8. **Schulterbreite**.....
- 9. **Ärmellänge gesamt**.....
- 9a. **Oberarmlänge bis Ärmelabschluss**.....

Rechts	Links

Längenmße

KONTAKTDATEN	<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:	
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:	
	Diagnose:	
Telefon:	Ansprechpartner:	
Datum:	Unterschrift:	

MASSBLATT 2 KURZARM-SHIRT / BODY

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- Vorderteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig Zweite Lage Vorder- und Rückenteil als separates Top
 Rückenteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig
 Ärmel 1-lagig 2-lagig 3-lagig

3. Haftband:

- Saum Ärmel

4. Verschluss:

Reißverschluss Rumpf

- Vorne Hinten Rechts Links
 Teilbar Nicht teilbar Lang Kurz
 Mit Druckknöpfen unterlegt Reißverschluss umgedreht (öffnet von unten)

Verschluss Schulter

- Druckknöpfe Klettverschluss Reißverschluss
 Rechts Links
 Mit Druckknöpfen unterlegt

5. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

Bitte vorab ungefähre Position angeben oder auf Maßblatt 3 einzeichnen. Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren sowie Größe und Form angeben.

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst) Leicht verstärkt/stabilisiert
 Mit Verstärkungsrahmen (fest)
 Abdeckung mit Klettverschluss
 Rechts befestigt Links befestigt Oben befestigt
 Unten befestigt Lose

6. Schritzwinkel

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
- Klettverschluss: Vorne Hinten
 Druckknöpfe: Vorne Hinten
 Steckschließe: Vorne Hinten

7. Verbindung mit Leggings


- Bitte bei der Anprobe Position der Überlappung markieren
 Druckknöpfe Klettverschluss Steckschließe

8. Belüftungslöcher unter Achsel


*bitte zusätzlich das Maßblatt 1 + 2 „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 68 – 69 ausfüllen.



Black

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

White

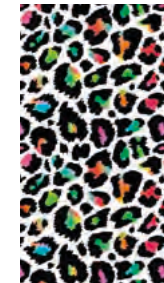

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

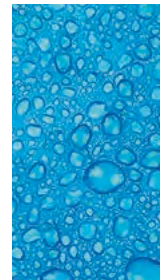

Rain




Zoo

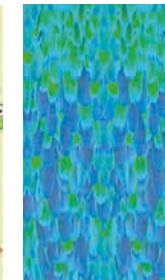

Wings



Wall

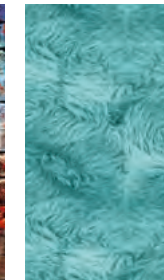

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

9. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- Schwarz Weiß Grau Blau Türkis Grün
 Gelb Orange Rot Pink Rosé



* Beim Body-Segment ist unabhängig vom Design der Rücken immer aus schwarzem Material.

SKIZZENBLATT KURZARM-SHIRT / BODY

Korrekturzüge:


Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

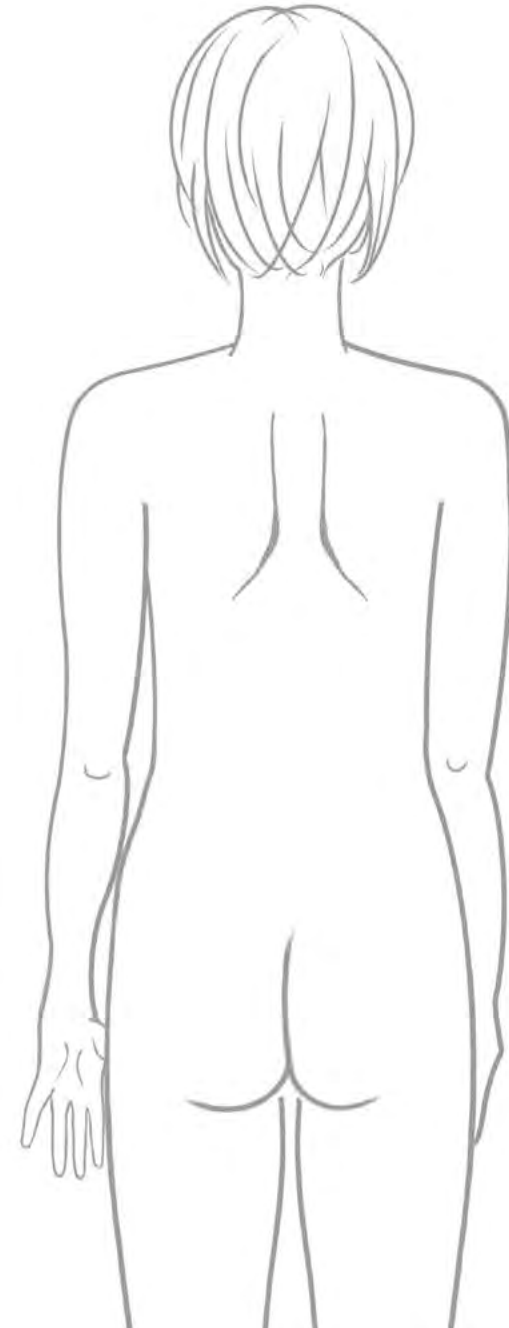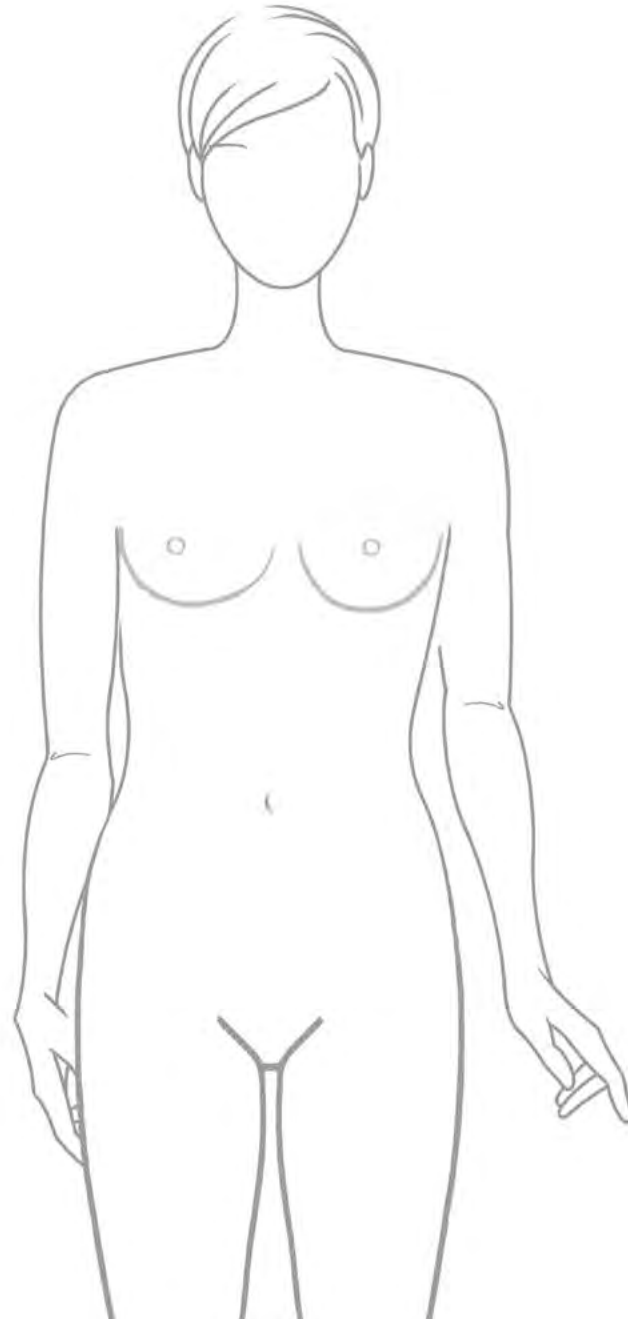

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

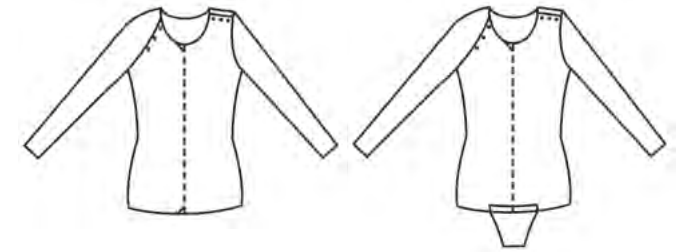

LANGARM-SHIRT/BODY

Das BODYGUIDE®-Langarmshirt und der Body mit langen Ärmeln sind für Wahrnehmungsdefizite im Rumpfbereich sowie der oberen Extremität geeignet. Durch die schulterübergreifende Schnittkonstruktion können eine bessere Stabilisierung und Aufrichtung des Rumpfes ermöglicht werden und durch die bis über das Handgelenk reichende Ärmellänge die Feinmotorik weiterhin unterstützt werden.

Optional können Haltungskorrekturen durch zusätzliche Lagen oder Korrekturzüge vorgenommen werden.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung (Rumpf und Ärmel)
- 1 Verschlussart (Reißverschluss im Vorder-, oder Rückenteil, Klettverschluss oder Druckknöpfe an der Schulter)
- 1 Änderung nach der Anprobe

Beim Body ist zusätzlich ein vorne zu öffnender Schrittzwickel (Klettverschluss, Druckknöpfe oder Steckschließe) inklusive. Die Auslieferung erfolgt zunächst halbfertig.

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:

- 2- oder 3-lagige Ausführung
- Zusätzliche Verschlüsse
- Haftband am Saum und/oder an den Ärmeln
- Korrekturzüge
- Abnehmbarer Schrittzwickel (beim Langarmshirt)
- Stoma oder Sondenausschnitt mit oder ohne Abdeckung

Das Langarmshirt und der Body mit langen Ärmeln können mit den Leggings kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 2 LANGARM-SHIRT / BODY

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- Vorderteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig
 Rückenteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig
 Ärmel 1-lagig 2-lagig 3-lagig

3. Haftband:

- Saum Ärmel

4. Verschluss:

Reißverschluss Rumpf

- Vorne Hinten Rechts Links
 Teilbar Nicht teilbar Lang Kurz
 Mit Druckknöpfen unterlegt Reißverschluss umgedreht (öffnet von unten)

Verschluss Schulter

- Druckknöpfe Klettverschluss Reißverschluss
 Rechts Links
 Mit Druckknöpfen unterlegt

5. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

Bitte vorab ungefähre Position angeben, oder auf Maßblatt 3 einzeichnen. Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren, sowie Größe und Form angeben.

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

- Flexibel (nur mit Naht eingefasst) Leicht verstärkt/stabilisiert
 Mit Verstärkungsrahmen (fest)
 Abdeckung mit Klettverschluss
 Rechts befestigt Links befestigt Oben befestigt
 Unten befestigt Lose

6. Schritzwinkel

- Klettverschluss: Vorne Hinten
 Druckknöpfe: Vorne Hinten
 Steckschließe: Vorne Hinten

7. Verbindung mit Leggings

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
Bitte bei der Anprobe Position der Überlappung markieren

- Druckknöpfe Klettverschluss Steckschließe


8. Belüftungslöcher unter Achsel

Anziehhilfe

Zweite Lage
 Vorder- und
 Rückenteil als
 separates Top



Black

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

White



Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

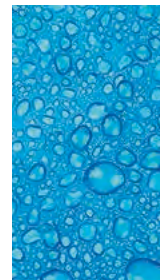

Rain




Zoo

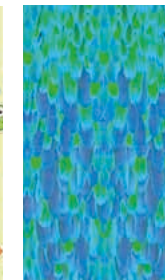

Wings



Wall

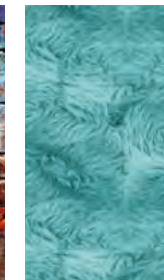


Fur



Silver



Flash

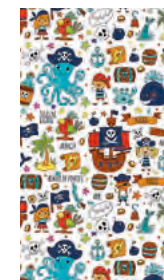

Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

9. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- Schwarz Weiß Grau Blau Türkis Grün
 Gelb Orange Rot Pink Rosé



*bitte zusätzlich das Maßblatt 1 + 2 „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 68 – 69 ausfüllen.

SKIZZENBLATT LANGARM-SHIRT / BODY

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

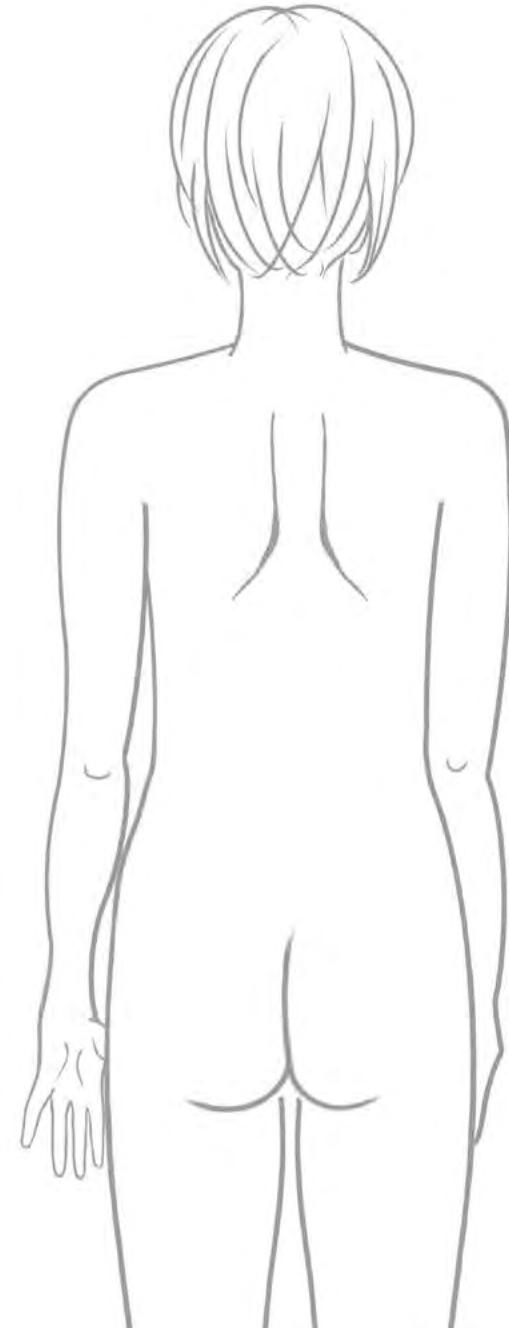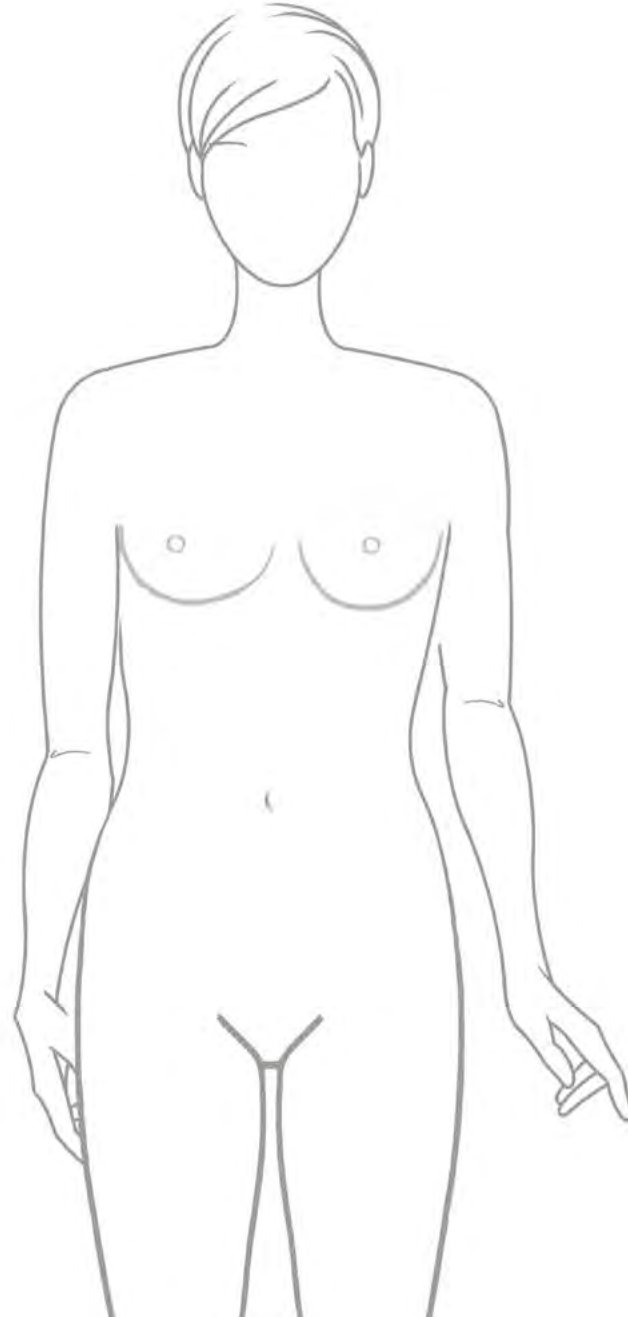

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

Das Zusatz-Maßblatt Oberteile ist für alle Bodyguide Oberteile geeignet, bei denen eine Mehrweite im Brustbereich benötigt wird. Hierbei kann zwischen verschiedenen Schnitttechnischen Varianten gewählt werden.



Wiener Naht:

ist eine senkrechte Teilungsnaht im Vorderteil deren Verlauf vom Saum oder der Taille über die Brust in einem sanften Bogen in das Armloch führt. Die Wiener Naht ist für alle Brustgrößen geeignet und zeichnet sich besonders durch eine sehr gute Passform und schöne Silhouette aus.



Abnäher:


ist eine kurze Naht durch die nicht benötigte Mehrweite rautenförmig herausgenommen wird. Der Abnäher beginnt unter der Brust, verläuft über der Taille und endet zwischen Saum und Taille. Der Abnäher ist besonders für kleine und mittlere Brustgrößen (Körbchen A-B) geeignet. Vorteile des Abnähers sind die schlichte, unauffällige Optik sowie die gute Passform für kleine und mittlere Brustgrößen.



Körbchen:

das Körbchen ist eine aus dem Wäschebereich stammende Nahführung, deren Verlauf halbrund unter der der Brust, sowie horizontal über die Brust verläuft. Das Körbchen ist optisch bedingt auch eher für kleine bis mittlere Brustgrößen geeignet. Vorteile des integrierten Körbchens sind die ebenfalls gute Passform und die Optisch schöne Nahführung. Nachteil: Es muss sehr genau gemessen werden um eine schöne und gut sitzende Form zu erreichen.

ZUSATZ-MASSBLATT OBERTEILE

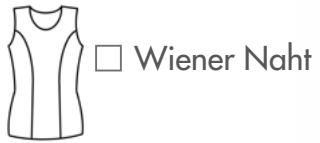


Wiener Naht



Abnäher



Körbchen

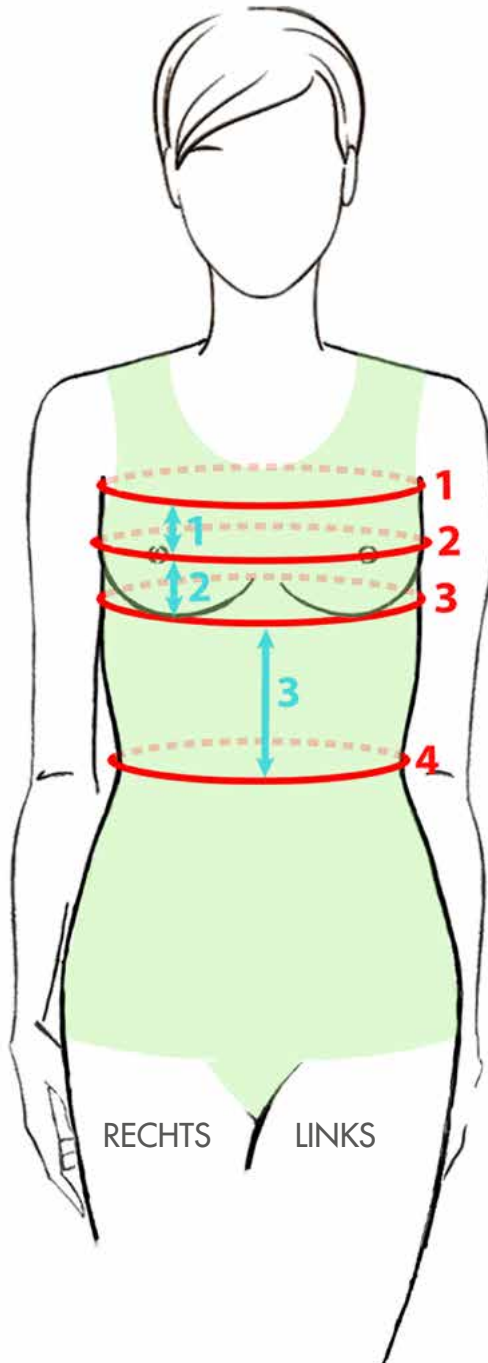

- 1. Umfang oberer Brustansatz.....
- 2. Brustumfang.....
- 3. Unterbrustumfang.....
- 4. Taillenumfang.....

Umfangmaße

- 1. Obere Brusthöhe.....
- 2. Untere Brusthöhe.....
- 3. Brusttiefe.....

Längenmaße

BH-Größe.....


--

KONTAKTDATEN	<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:
Anschrift:	Alter: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:
	Diagnose:
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:


MASSANLEITUNG

für BODYGUIDE® Zusatz-Maßblatt Oberteile

Das Zusatz-Maßblatt Oberteile ist für alle Bodyguide Oberteile geeignet bei denen eine Mehrweite im Brustbereich benötigt wird. Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil über anliegender Unterwäsche oder einem gut sitzenden BH zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren. Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**.

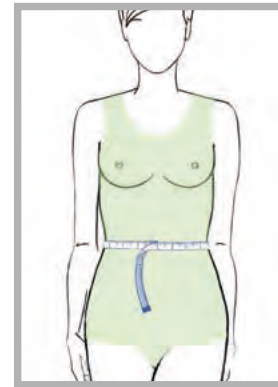


Als erstes sollte die Position der Taillenlinie festgelegt werden, indem man das Taillenmaßband waagrecht, zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung (meistens auf Bauchnabel Höhe) legt und dort belässt.

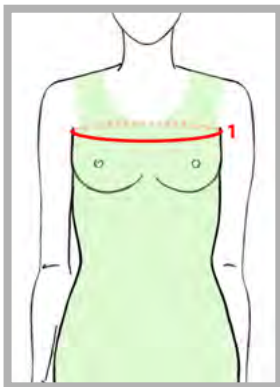


1. Umfang oberer Brustansatz

Hier wird waagrecht zirkulär auf Höhe des Brustansatz gemessen.

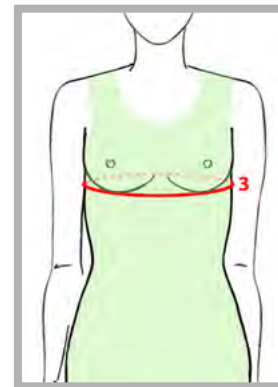


3. Unterbrustumfang

Gemessen wird waagrecht zirkulär an der engsten Stelle direkt unter der Brust.

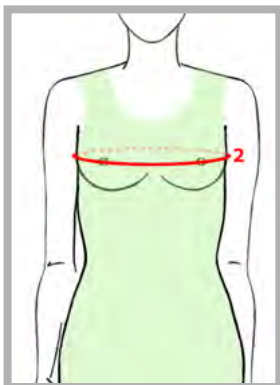


2. Brustumfang

Der Brustumfang wird waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Stelle der Brust bzw. des größten Brustumfangs (üblicherweise auf Höhe der Brustwarzen) nach hinten leicht ansteigend gemessen.

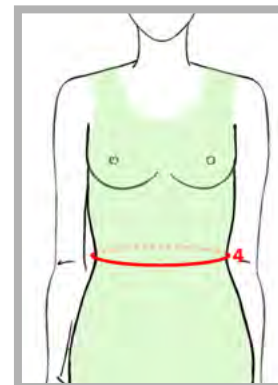


4. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung, oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.

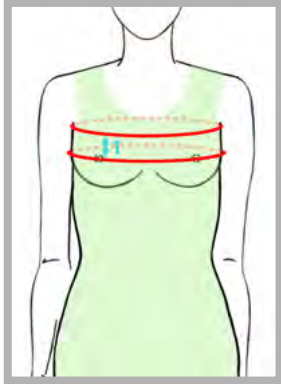


1. Obere Brusthöhe

Dieses Längenmaß wird vertikal auf Höhe der zuvor markierten Linie des Brustansatz bis zur Brusthöhe (auf Höhe des größten Brustumfangs) gemessen.

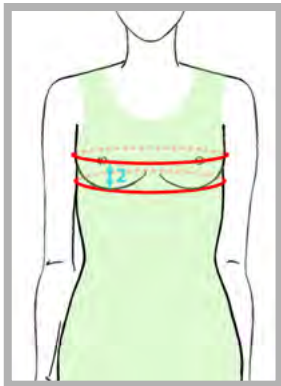

2. Untere Brusthöhe

Die untere Brusthöhe wird vertikal ab der Brusthöhe (auf Höhe des größten Brustumfangs) bis zur markierten Stelle der Unterbrustlinie gemessen.

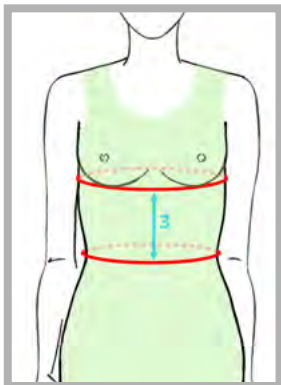

3. Brusttiefe

Hier wird von der zuvor markierten Unterbrustlinie, vertikal bis zur Taillenhöhe gemessen.




MASSANLEITUNG


für BODYGUIDE® Weste, Top, Body, T-Shirt und Langarm-Shirt

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil, über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten ist es sinnvoll, bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

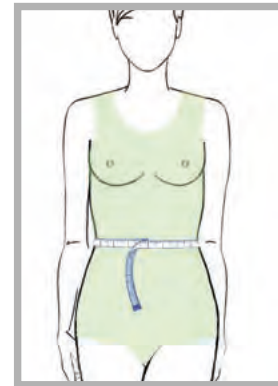


Als erstes sollte die Position der Taillenlinie festgelegt werden, indem man das Taillenmaßband waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhle (meistens auf Bauchnabelhöhe) legt und dort belässt.

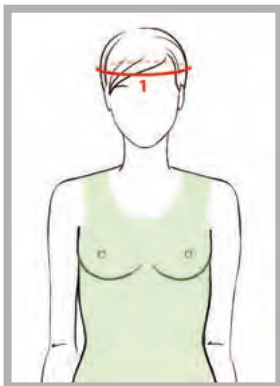


1. Kopfumfang

Hier wird waagrecht über die Stirn und den Hinterkopf auf Höhe des größten Kopfumfanges gemessen. Dieses Maß wird nur benötigt, wenn im Halsbereich kein Verschluss gewünscht wird.

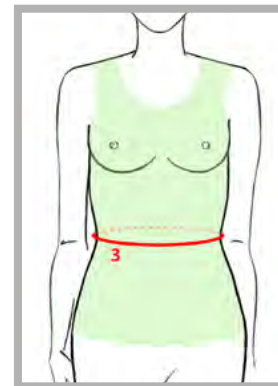


3. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Taillenhöhle, oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.

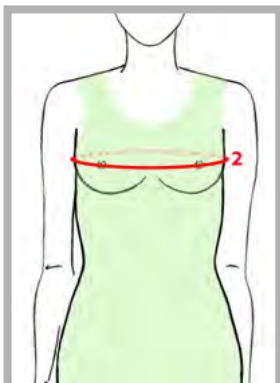

2. Brustumfang

Der Brustumfang wird waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Stelle der Brust bzw. des größten Brustumfangs (üblicherweise auf Höhe der Brustwarzen) nach hinten leicht ansteigend gemessen.

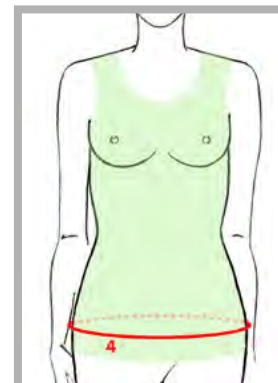

4. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie bei Taillen- und Brustumfang, waagrecht zirkulär gemessen. Die Position des Maßbandes liegt auf der stärksten Stelle des Gesäßes.




4a. Unterer Abschluß

Der Untere Abschluß muss nur bei Abweichung zum Hüftumfang gemessen werden. Er kann oberhalb oder unterhalb des Hüftumfanges liegen, je nach Länge des Shirts oder der Weste. Es wird auch wieder waagrecht zirkulär gemessen.




7. Umfang Bizeps / Ärmelabschluß T-Shirt

Auch hier wird auf Höhe des größten Umfangs des Bizeps bzw. beim T-Shirt auf Höhe der gewünschten Ärmellänge gemessen.

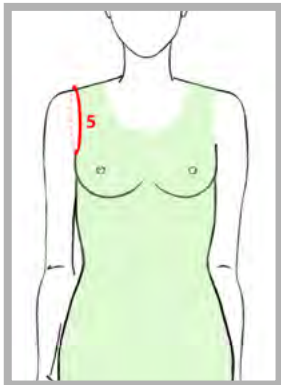


5. Vertikaler Schulterumfang

Hier wird von der Schulter ab vertikal zirkulär unter dem angelegten Arm durch die Achsel bis wieder zur Schulter hinauf gemessen.

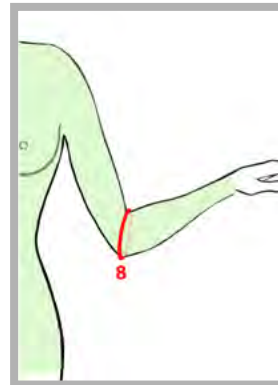


8. Umfang Ellenbogen

Beim Messen des Ellenbogenumfangs sollte der Ober- und Unterarm im rechten Winkel gebeugt werden. Dann wird in der Armbeuge über die stärkste Stelle des Ellenbogens Maß genommen.

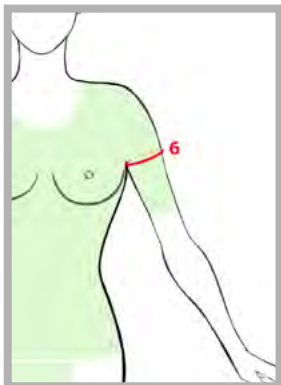


6. Oberarmumfang

Der Umfang des Oberarms wird direkt unter der Achsel hindurch über den Oberarmmuskel gemessen.

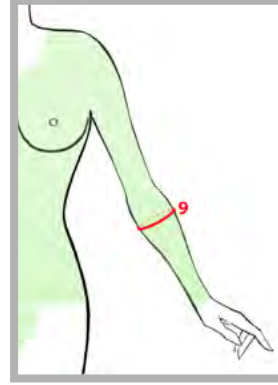


9. Stärkster Unterarm Umfang

Der Umfang des Unterarms wird auf Höhe der stärksten Stelle des Unterarmmuskels gemessen.

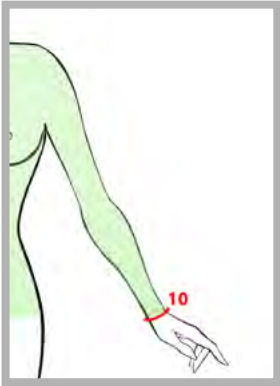


10. Handgelenkumfang

Beim Handgelenkumfang wird zirkulär über die Handwurzel gemessen.

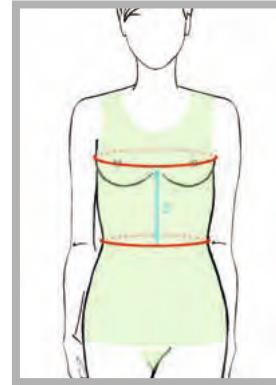


3. Vorderlänge (Brust-Taille)

Hier wird von der Brusthöhe vertikal bis zur Taillenhöhe gemessen.

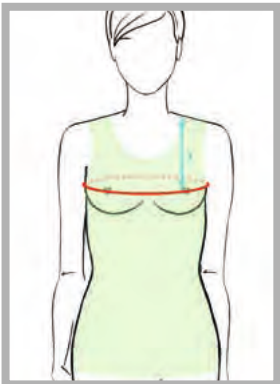


1. Brusthöhe (Schulter-Brust)

Hier wird vertikal, ab der Schultermitte, an der zuvor markierten Ausschnittbreite entlang bis zur Brusthöhe gemessen.

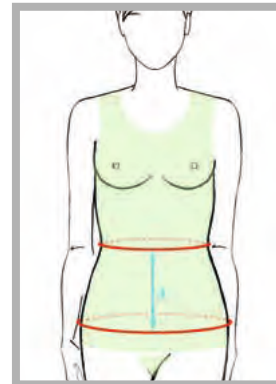


4. Hüfttiefe (Taille-Hüfte)

Die Hüfttiefe wird von der Taillenhöhe ab vertikal bis zur zuvor markierten Hüftlinie (Höhe stärkster Umfang der Hüfte) gemessen.

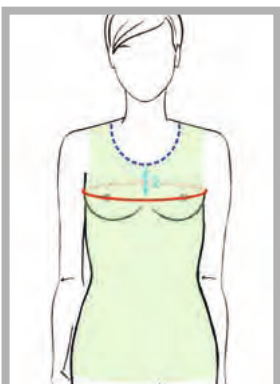


2. Halsausschnitt Tiefe

Dieses Längenmaß ist abhängig von der gewünschten Halsausschnitttiefe. Dabei wird von dem zuvor markierten Halsausschnitt vertikal bis zur Brusthöhe (auf Höhe des größten Brustumfangs) gemessen.

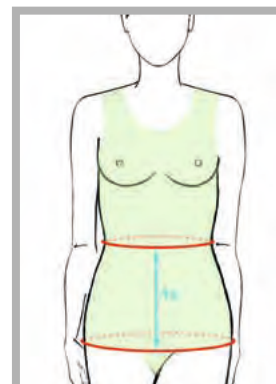


4a. Länge unterer Abschluss / Saum (Taille-Saum)

Dieses Längenmaß wird nur bei Abweichung zur Hüfttiefe (Punkt 4.) benötigt. Das Maß kann, je nach gewünschter Länge, kürzer oder länger als (Punkt 4.) sein. Es wird von der Taille ab vertikal bis zur gewünschten Länge gemessen.

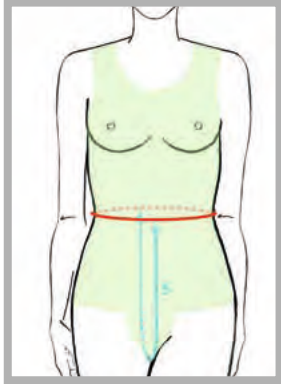


5. Schrittlänge

Dieses Maß wird bei der Weste, bei den Bodys oder wenn ein Schritzwinkel gewünscht ist, benötigt. Hier wird von der vorderen Taillenhöhe (Mitte Taillenmaßband vorne) über den Schritt bis zur hinteren Taillenhöhe (Mitte Taillenmaßband hinten) gemessen.

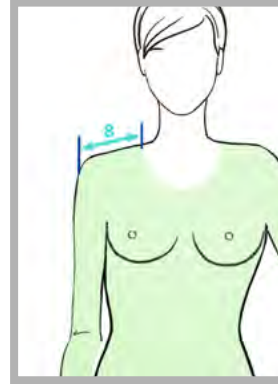


8. Schulterbreite

Dieses Längenmaß wird beim T-Shirt und beim Langarmshirt benötigt. Es wird jeweils rechts und links von der seitlichen Markierung der Halsausschnittbreite zum zuvor markierten jeweiligen äußersten Ende des Schulterknochens am Übergang zum Arm (Außenecke) gemessen.

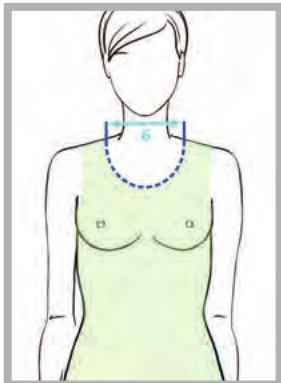


6. Halsausschnittbreite

Zuerst sollte die gewünschte Ausschnittweite mittels Markierungen seitlich vom Hals festgelegt werden. Danach wird waagrecht und halsnah von einer Markierung zur anderen gemessen.

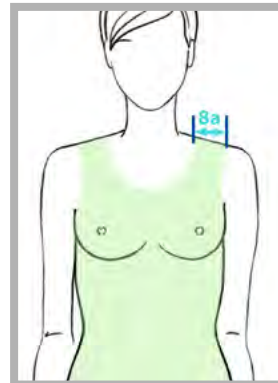


8a. Trägerbreite

Dieses Maß wird bei der Weste, beim Top und beim Body ohne Ärmel benötigt. Hier wird einfach die gewünschte Trägerbreite eingetragen. Die Trägerbreite ist in der Regel ein paar Zentimeter schmaler als die Schulterbreite.

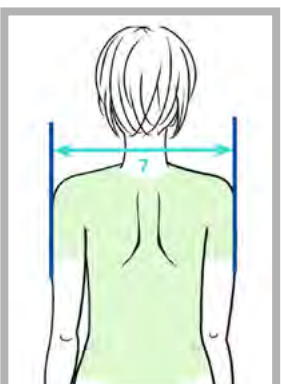


7. Gesamte Schulterbreite

Hier wird von der einen bis zur anderen Schulter jeweils am äußersten Ende der Schulterknochen am Übergang zum Arm (Außenecke) gemessen.

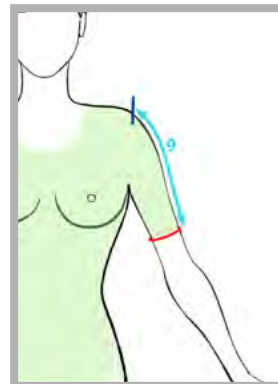


9. Ärmellänge gesamt (T-Shirt)

Dieses Maß wird beim T-Shirt vom zuvor markierten äußersten Ende des Schulterknochens ab, bis zur gewünschten Ärmellänge gemessen.

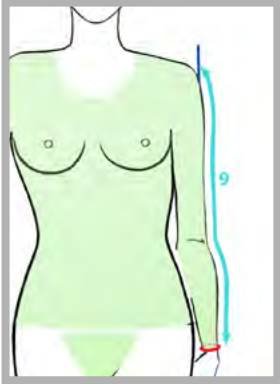


9. Ärmellänge gesamt (Langarmshirt)

Dieses Maß wird beim T-Shirt vom zuvor markierten äußersten Ende des Schulterknochens ab, bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.

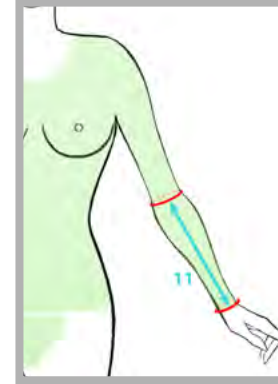


11. Unterarmlänge

Dieses Längenmaß wird nur beim Langarmshirt benötigt. Es wird von der Markierung Ellenbogen Armbeuge bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.

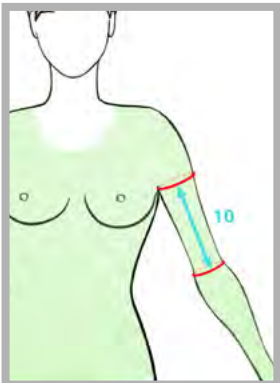


10. Oberarmlänge bis Ellenbogen

Dieses Maß wird nur beim Langarmshirt benötigt. Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur Markierung Ellenbogen Armbeuge gemessen.

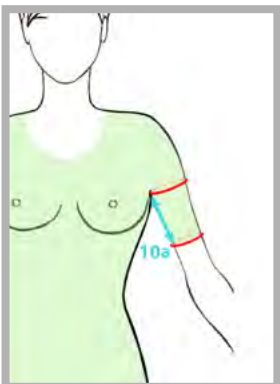


10a. Oberarmlänge bis Ärmelabschluss

Dieses Maß wird nur beim T-Shirt benötigt. Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur gewünschten Ärmellänge gemessen.

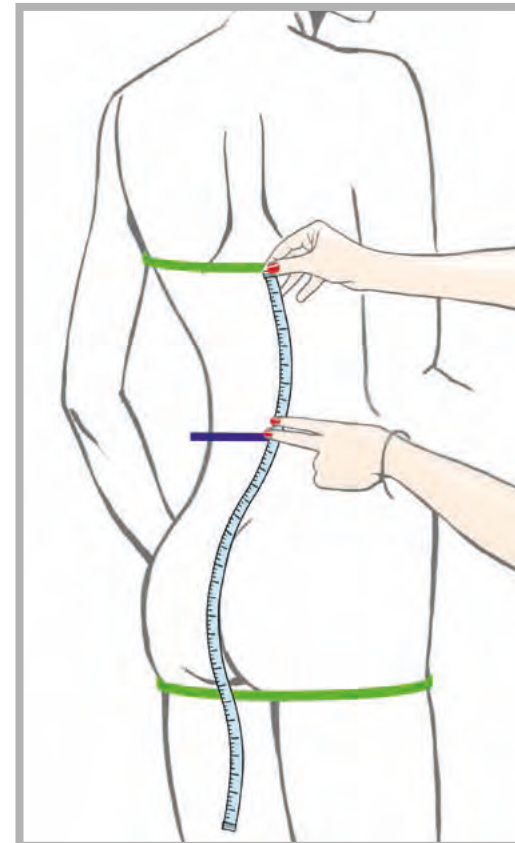

TIPP

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer glatt entlang der Körperform geführt werden.

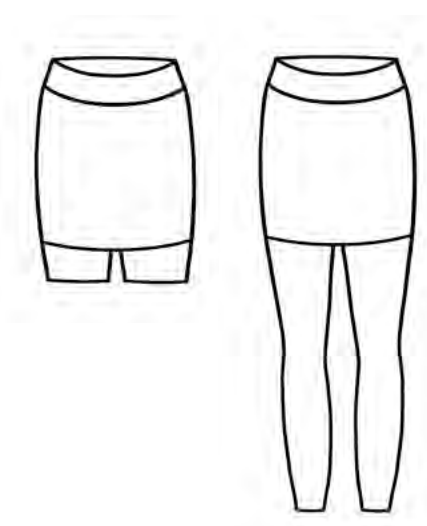

FROGGY-PANTY

Die Froggy-Panty wurde als Stabilisierungselement in Kombination mit unserer kurzen als auch langen Leggings entwickelt, um eine Unterstützung der Beine bei beeinträchtigter Funktion der Hüft-/Oberschenkeladduktoren zu bewirken und um ein seitliches Wegrutschen der Kniegelenke während des Krabbelns zu verhindern.

Das rockförmige, zirkuläre Stabilisierungselement steht hierbei in fester Verbindung mit der individuell gefertigten Leggings und verhindert somit ein ungewolltes Hochrutschen während der Bewegung.


Insbesondere im „Krabbelalter“, der wichtigsten motorischen Entwicklungsphase unterstützt die Froggy-Panty die Adduktion der Beine und ermöglicht eine kontrollierte krabbelnde Fortbewegung ohne Beeinträchtigung der notwendigen Flex- und Extensionsbewegung des Hüftgelenkes.

Der Grundpreis beinhaltet:


- 1-lagige Ausführung
- 1 Änderung nach der Anprobe



Druckknopfband als Alternative zu Klett- und Reißverschluss

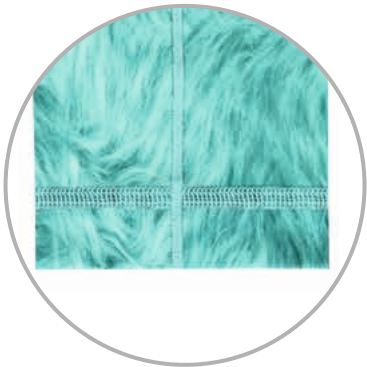

Der genähte, flexible Saum ist strapazierfähig und legt sich glatt am Körper an.

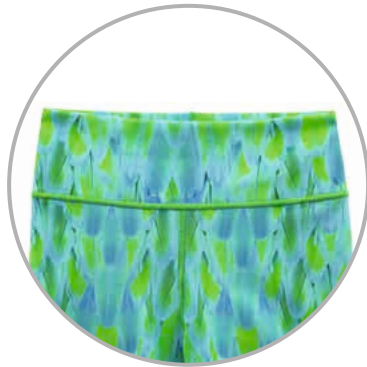

Der extra breite Bund sorgt für einen hohen Tragekomfort.



LEGGINS KURZ



Die BODYGUIDE®-Leggins wirkt Wahrnehmungsdefiziten und Fehlstellungen der Beine und des Hüftbereichs entgegen, unterstützt und stabilisiert. Zusätzlich können Haltungfehler mit speziell abgestimmten Korrekturzügen durch sanften Impuls reguliert werden. Die Leggins können mit allen Oberteilen kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.

Die kurze Leggins wird im fertigen Zustand ausgeliefert.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung
- 1 Änderung nach der Anprobe

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:


- 2-lagige Ausführung
- Reißverschluss vorne und/oder an den Seiten
- Herrenzwinkel
- Öffnung/Aussparung im Schritt
- Haftband am Bund oder den Säumen
- Korrekturzüge
- Offene Säume für Orthesenträger geeignet (ohne Aufpreis)

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 LEGGINS KURZ / FROGGY-PANTY KURZ

- Leggins kurz
- Froggy-Panty kurz

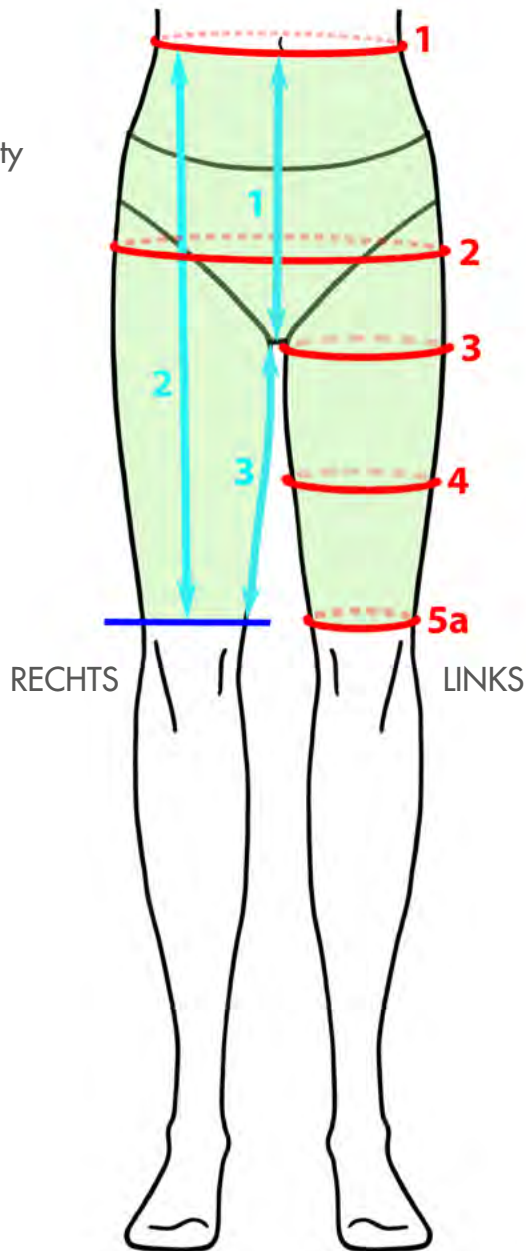

- 1. Taillenumfang**
- 2. Hüftumfang**
- 3. Oberschenkelumfang unter Pofalte**.....
- 4. Umfang Mitte Oberschenkel**
- 5a. Umfang unterer Abschluss**

Rechts	Links

Umfangsmasse

- 1. Leibhöhe**
- 2. Länge**
- 3. Innenbein Länge**

Rechts	Links

Längenmasse

Bundhöhe:

(nur ausfüllen falls Abweichung zu Bund in Taillenhöhe)

- Extra hoher Bund *+.....cm
- Extra niederer Bund *.....cm
- (*ab Taille messen)

KONTAKTDATEN	<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:
Anschrift:	Alter: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:
	Diagnose:
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:

MASSBLATT 2 LEGGINS KURZ / FROGGY-PANTY KURZ

1. Stoff (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung

- 1-lagig 2-lagig

3. Haftband




- Bund Saum

4. Saum offen (geschnittene Kante)

- rechts links


5. Zusätzliche Verschlüsse

- Reißverschluss Klettverschluss Druckknopfband

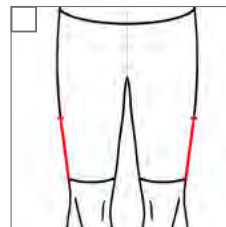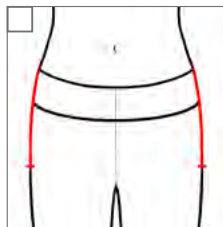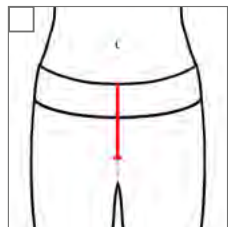

- Rechts Links


- Rechts Links

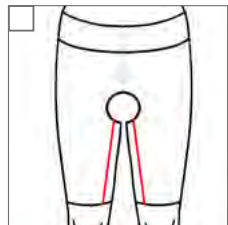

- Rechts Links

6. Sonstiges


Aussparung
(Bitte bei Anprobe markieren)

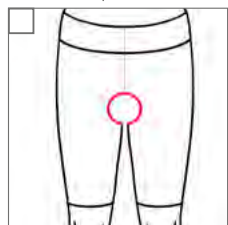


Herrenzwinkel
(Mehrweite im Genitalbereich)



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Black



White

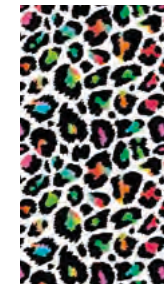

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

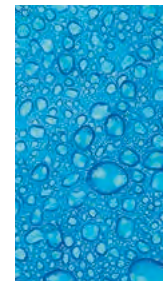

Rain




Zoo

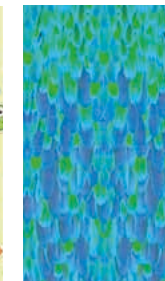

Wings



Wall

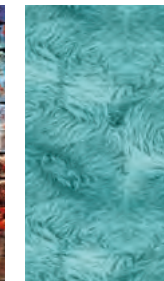

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

7. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:


- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

SKIZZENBLATT LEGGINS KURZ / FROGGY-PANTY KURZ

Korrekturzüge:


Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

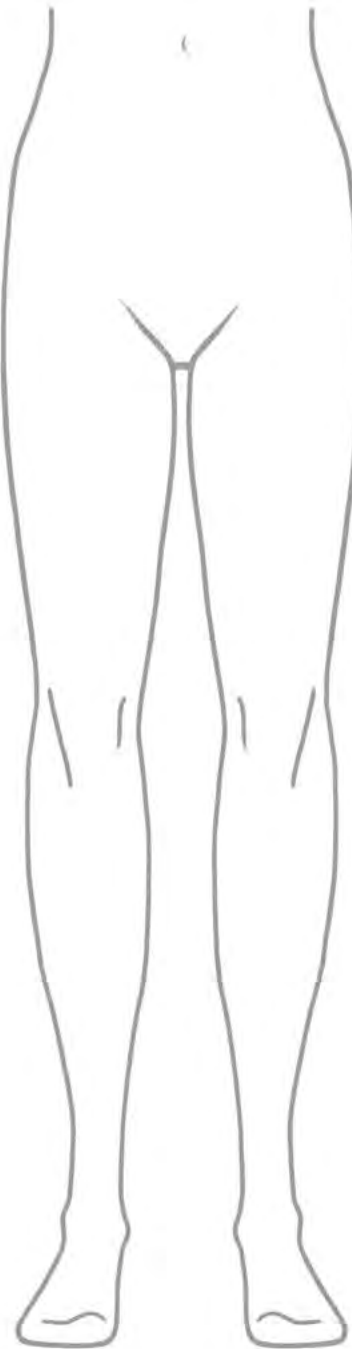

! Bitte nutzen Sie unsere **Skizzenblätter als Kopiervorlage.**

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

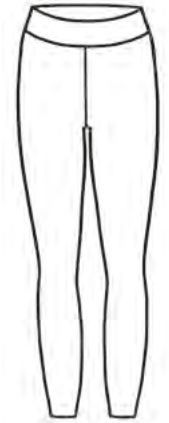

LEGGINS LANG

Die BODYGUIDE®-Leggins wirkt Wahrnehmungsdefiziten und Fehlstellungen der Beine und des Hüftbereichs entgegen, unterstützt und stabilisiert. Zusätzlich können Haltungsfelder mit speziell abgestimmten Korrekturzügen durch sanften Impuls reguliert werden. Die Leggins können mit allen Oberteilen kombiniert werden und so die Gesamtkörperwahrnehmung noch weiter verbessern.

Die lange Leggins wird im fertigen Zustand ausgeliefert.

Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung
- 1 Änderung nach der Anprobe

Optional können gegen Aufpreis folgende Positionen bestellt werden:

- 2-lagige Ausführung
- Reißverschluss vorne und/oder an den Seiten sowie an den Säumen
- Herrenzwinkel
- Öffnung/Aussparung im Schritt
- Haftband am Bund und/oder an den Säumen
- Korrekturzüge
- Offene Säume für Orthesenträger geeignet (ohne Aufpreis)



Offener Saum
(Empfohlen für Orthesenträger)



Für leichteres An- und Ausziehen, besonders bei mehrlagiger Versorgung können optional Reißverschlüsse am Beinabschluss und am Bund bestellt werden.



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.


MASSBLATT 1 LEGGINS LANG / FROGGY-PANTY LANG



Leggins lang



Froggy-Panty lang

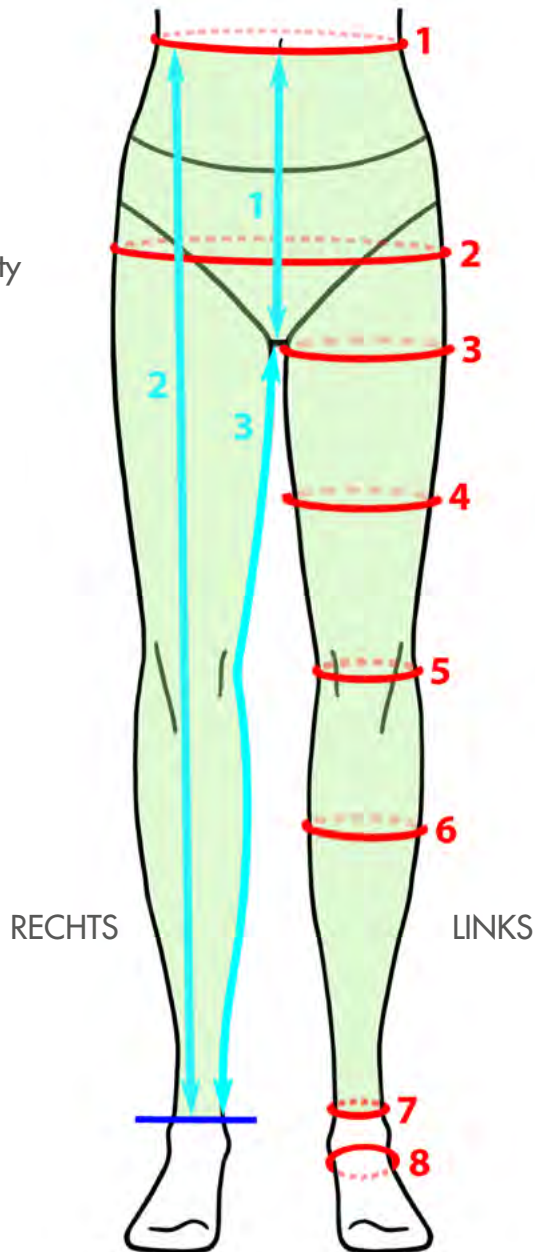

- 1. **Taillenumfang**.....
- 2. **Hüftumfang**.....
- 3. **Oberschenkelumfang unter Pofalte**.....
- 4. **Umfang Mitte Oberschenkel**.....
- 5. **Knieumfang**.....
- 6. **Umfang stärkste Stelle Wade**.....
- 7. **Fesselumfang**.....
- 8. **Rist (Fersenumfang)**.....

Rechts	Links

Umfangsmäße

- 1. **Leibhöhe**.....
- 2. **Länge**.....
- 3. **Innenbein Länge**.....

Rechts	Links

Längenmaße

Bundhöhe:

(nur ausfüllen falls Abweichung zu Bund in Taillenhöhe)

Extra hoher Bund *+.....cm

Extra niederer Bund *-.....cm

(*ab Taille messen)

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 LEGGINS LANG / FROGGY-PANTY LANG

1. Stoff (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung

- 1-lagig 2-lagig

3. Haftband


- Bund Saum

4. Saum offen (geschnittene Kante/empfohlen für Orthesenträger)

- rechts links

5. Zusätzliche Verschlüsse


- Reißverschluss (nur bis 60 cm Länge) Klettverschluss Druckknopfband

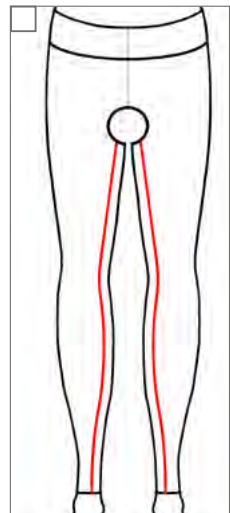


- Rechts Links



- Rechts Links

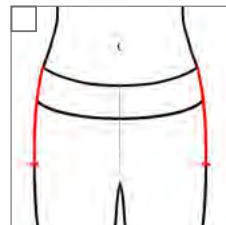

- Rechts Links

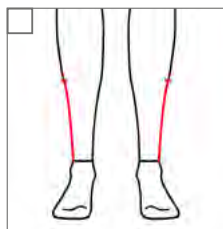

- Rechts Links

6. Sonstiges

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
Aussparung
(Bitte bei Anprobe markieren)



Herrenzwinkel
(Mehrweite im Genitalbereich)



Black



White




Leo



Zebra




Fire

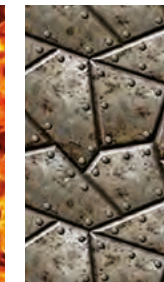

Metal




Rose

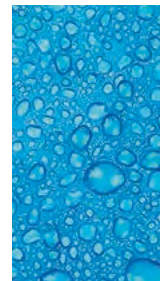

Rain




Zoo

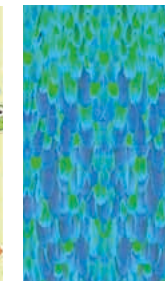

Wings



Wall

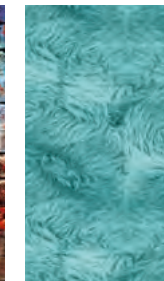

Fur




Silver



Flash



Pirates

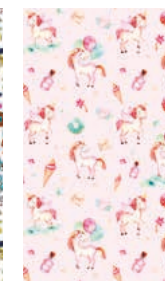

Unicorn



Splash Pink



Flowers

7. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

Schwarz

Weiß

Grau

Blau

Türkis

Grün

Gelb

Orange

Rot

Pink

Rosé

SKIZZENBLATT LEGGINS LANG / FROGGY-PANTY LANG


Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

! Bitte nutzen Sie unsere **Skizzenblätter als Kopiervorlage.**

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

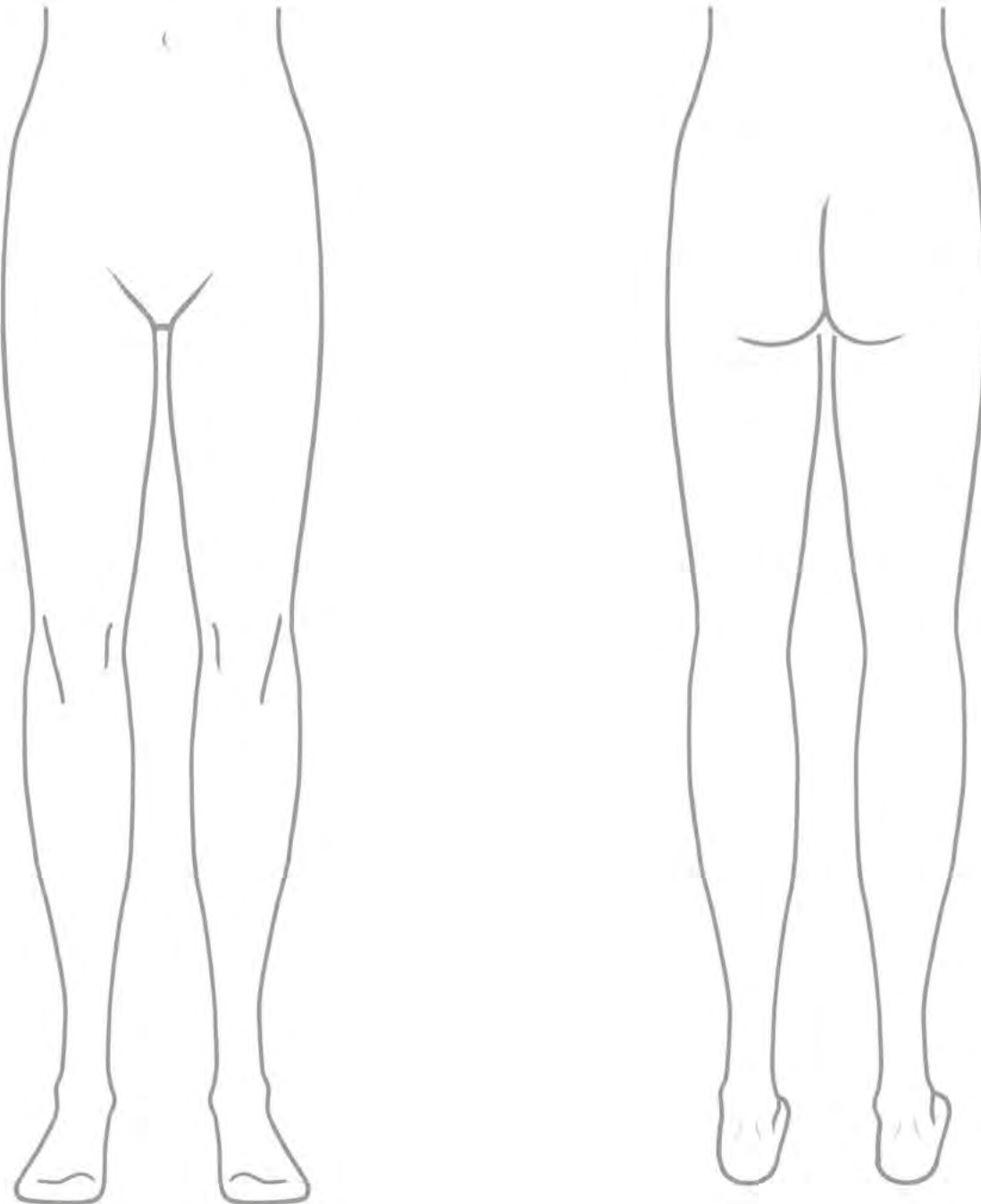


MASSANLEITUNG


für **BODYGUIDE**® Leggins und Froggy-Panty

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil, über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

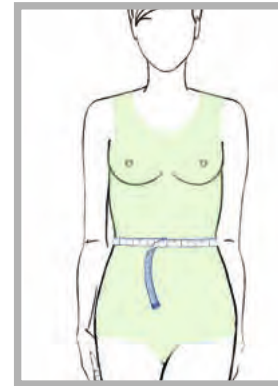


Als erstes sollte die Position der Taillenlinie festgelegt werden, indem man das Taillenmaßband waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung (meistens auf Bauchnabelhöhe) legt und dort belässt.

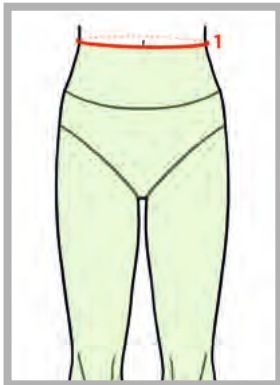


1. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.

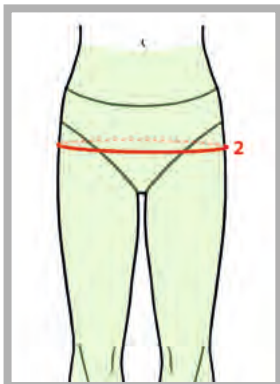


2. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie beim Taillenumfang waagrecht gemessen. Die Position des Maßbandes liegt auf der stärksten Stelle des Gesäßes.

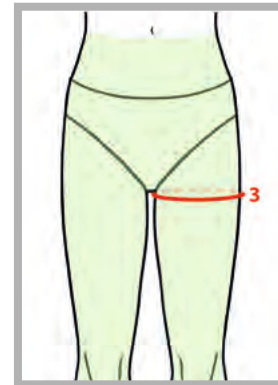


3. Oberschenkelumfang

Der Oberschenkelumfang wird waagrecht auf Schritthöhe (direkt unter der Gesäßfalte) gemessen.

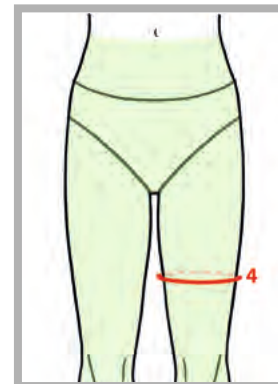


4. Umfang Mitte Oberschenkel

Hier wird zwischen dem Oberschenkelumfangsmaß und dem Knieumfang waagrecht gemessen.

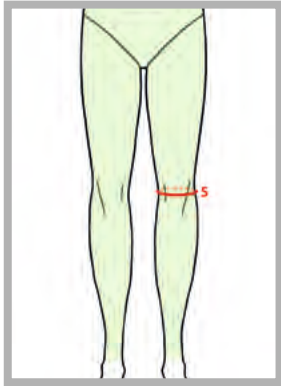


5. Knieumfang

Den Knieumfang misst man waagrecht auf Mitte der Kniescheibe, bzw. an der stärksten Stelle des Knies.

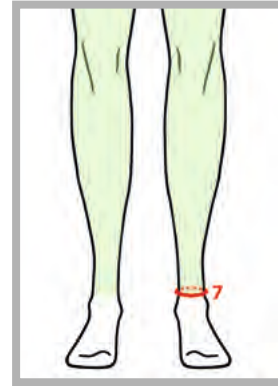


7. Fesselumfang

Der Umfang der Fessel wird waagrecht direkt oberhalb des Knöchels an der schmalsten Stelle des Unterschenkels gemessen. Er bestimmt meist auch gleichzeitig das Längenmaß bei der langen Leggins.

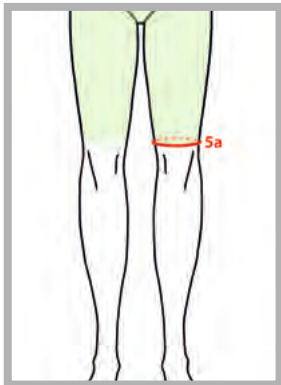


5a. Unterer Abschluss

Dieses Maß wird nur bei der kurzen Leggins benötigt und wird auf der gewünschten Höhe festgelegt. Auf dieser Höhe wird dann waagrecht zirkulär gemessen.

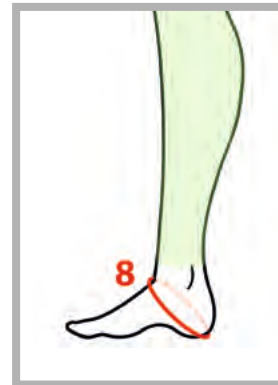


8. Rist (Fersenumfang)

Dieser Umfang wird diagonal über die Fersenrundung und den Rist gemessen.

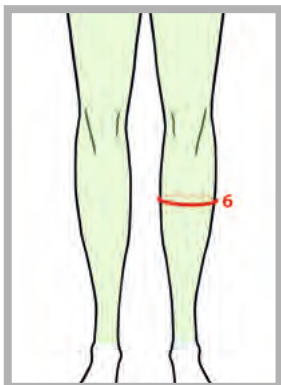


6. Wadenumfang

Der Wadenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Stelle der Wade gemessen. Sie befindet sich meist im oberen Bereich der Wade.

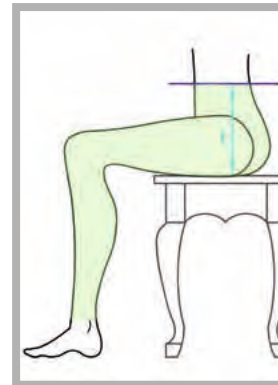


1. Leibhöhe

Die Leibhöhe wird sitzend, von der Taille abwärts über die Hüfte bis zur Sitzfläche gemessen.

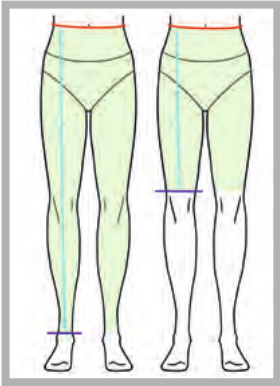


2. Gewünschte Länge

Dieses Längenmaß wird seitlich von der Taille abwärts über die Hüfte, am Verlauf des Beins entlang bis zur gewünschten Länge gemessen.

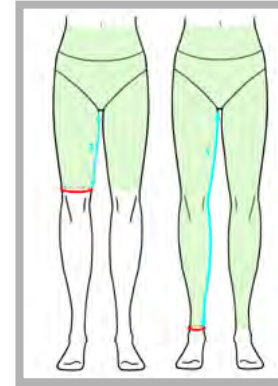


3. Innenbein Länge

Dieses Längenmaß wird vom Schritt abwärts innen am Verlauf des Beins entlang bis zur gewünschten Länge gemessen.

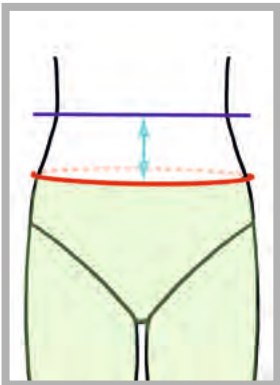


Bundhöhe – Tiefer Bund

Dieses Höhenmaß wird nur benötigt, falls ein tieferer Bund als in Taillenhöhe gewünscht wird. Hierbei wird dann zunächst die gewünschte Höhe festgelegt und danach von von der Taille abwärts senkrecht bis zu dieser Stelle gemessen.

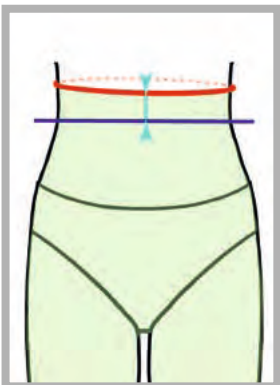

Bundhöhe + Hoher Bund

Dieses Höhenmaß wird nur benötigt, falls ein höherer Bund als in Taillenhöhe gewünscht wird. Hierbei wird dann zunächst die gewünschte Höhe festgelegt und danach von von der Taille aufwärts senkrecht bis zu dieser Stelle gemessen.

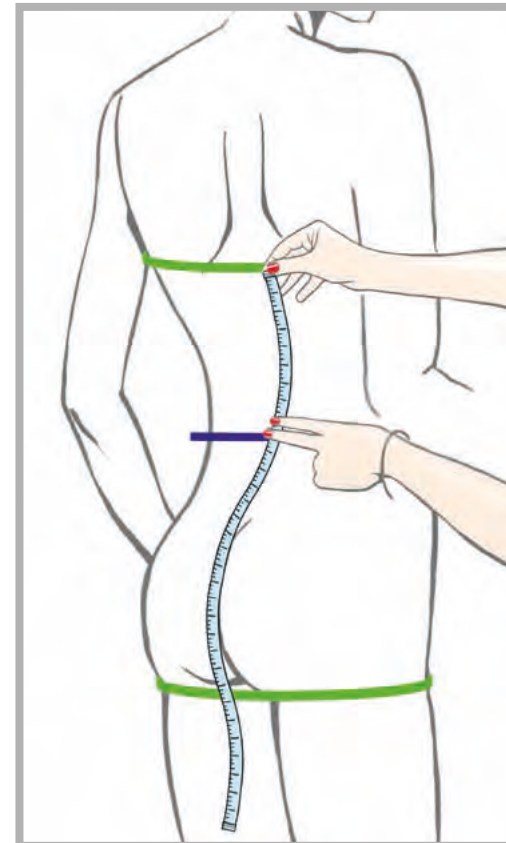

TIPP

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer glatt entlang der Körperform geführt werden.

JUMPSUIT

Neben Weste, Shirt und Leggins haben wir zur Becken-übergreifenden Versorgung den Jumpsuit in unserer BODY-GUIDE-Serie. Durch die aufwendige Schnittkonstruktion entstehen nach Ihren Angaben maßgeschneiderte Softorthesen auf höchstem Niveau, die für die Versorgung von komplexen Beeinträchtigungen des Rumpfes, der Arme, Hüfte und Beine eingesetzt werden können. Die Jumpsuits können wahlweise mit kurzen oder langen Beinen, mit kurzen, langen oder ohne Ärmel bestellt werden. Optional können zum Jumpsuit ohne Ärmel auch die abnehmbaren Ärmel verwendet werden, die durch eine Klettverbindung oder durch Druckknöpfe im Schulterbereich befestigt werden.






JUMPSUIT KURZ

Der Grundpreis beinhaltet:

- Vorder- und Rückenteil 1-lagig
- 1-Verschußart
- 1 Änderung nach der Anprobe

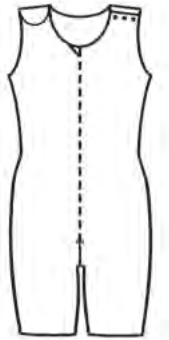

JUMPSUIT KURZ MIT KURZEN ÄRMELN

Der Grundpreis beinhaltet:


- Ärmel, Vorder- und Rückenteil 1-lagig
- 1-Verschußart
- 1 Änderung nach der Anprobe



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.


MASSBLATT 1 JUMPSUIT KURZ

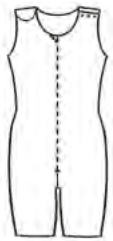

Jumpsuit kurz



Jumpsuit kurz
mit kurzen Ärmeln
(+ Zusatzmassblatt
kurze Ärmel)

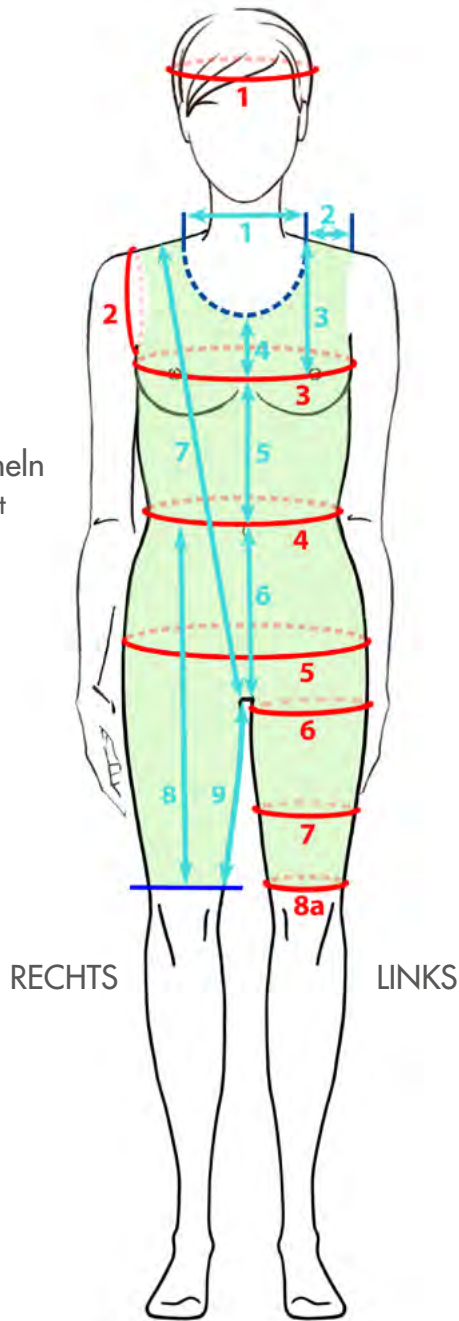

- 1. Kopfumfang
- 2. Vertikaler Schulterumfang
- 3. Brustumfang
- 4. Taillenumfang
- 5. Hüftumfang

Rechts	Links

Umfangsmäße

- 6. Oberschenkelumfang unter Pofalte.....
- 7. Umfang mitte Oberschenkel.....
- 8a. Umfang Saumabschluss.....

- 1. Halsausschnittbreite
- 2. Trägerbreite (bei Jumpsuit ohne Ärmel)
- 3. Brusthöhe (Schulter-Brust)
- 4. Halsausschnitt Tiefe
- 5. Vorderlänge (Brust-Taile)
- 6. Hüfttiefe (Taille-Schritt).....
- 7. Rumpfhöhe (Schulter-Schritt)
- 8. Beinlänge (Taille-Gewünschte Länge).....
- 9. Innenbein Länge.....


Längenmäße

KONTAKTDATEN ANGEBOT BESTELLUNG

Kundennr.:	Kommission:
Anschrift:	Alter: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:
	Diagnose:
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:

ZUSATZ-MASSBLATT KURZE ÄRMEL

JUMPSUIT KURZ

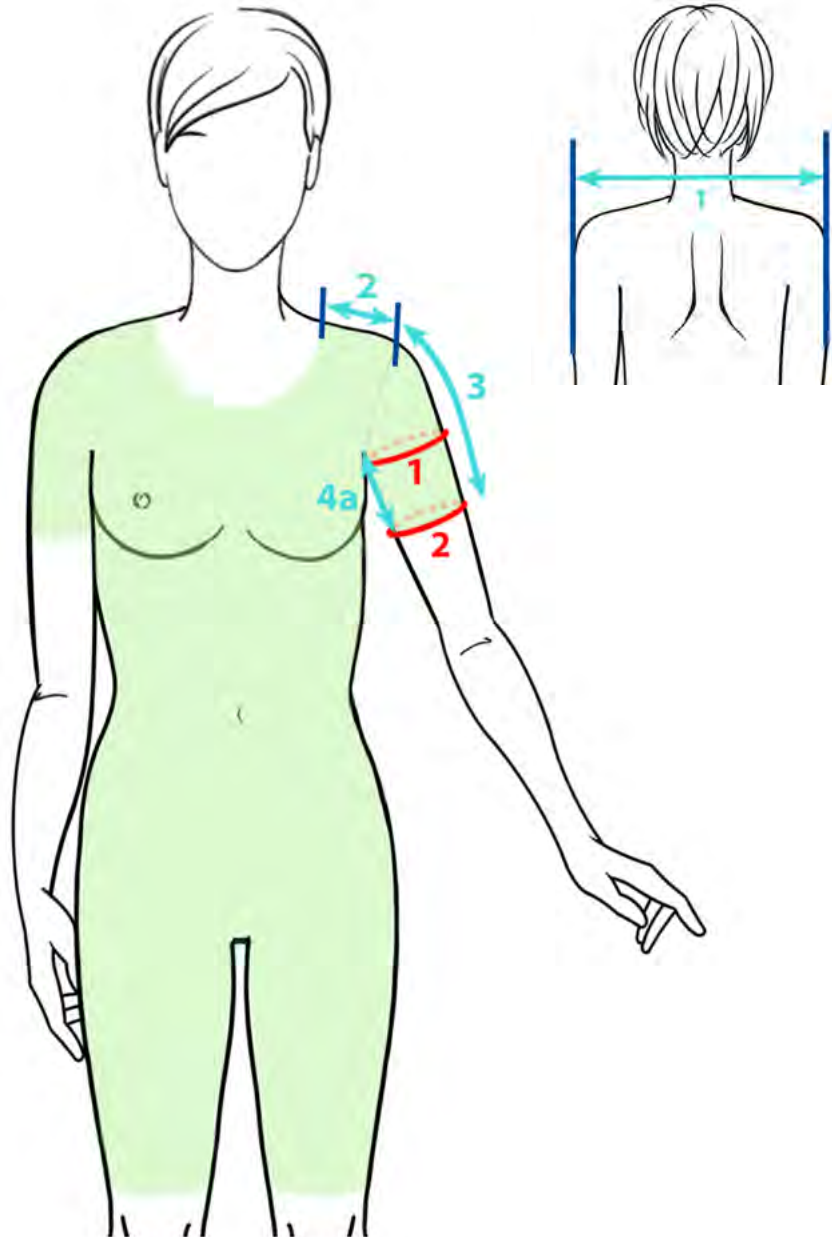

1. Oberarmumfang.....
2. Umfang Bizeps / Ärmelabschluss.....

Rechts	Links

Umfangmaße

1. Gesamte Schulterbreite.....
2. Schulterbreite.....
3. Ärmellänge gesamt.....
- 4a. Oberarmlänge bis Ärmelabschluss.....

Längenmaße

KONTAKTDATEN	<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:
Anschrift:	Alter: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:
	Diagnose:
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:

MASSBLATT 2 JUMPSUIT KURZ

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

ohne Ärmel

2. Ausführung:

mit Ärmel*

Vorderteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig

Rückenteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig

Ärmel* 1-lagig 2-lagig 3-lagig

3. Haftband:

Saum Ärmelsaum* rechts links Arme* Beine

4. Saum offen (geschnitten Kante):

5. Verschluss:

Reißverschluss Rumpf

vorne hinten rechts links

teilbar nicht teilbar lang kurz

Mit Druckknöpfen unterlegt

Verschluss Schulter

Druckknöpfe Klettverschluss Steckschließe

rechts links

6. Zusätzliche Verschlüsse:

Reißverschluss Klettverschluss

Druckknopfband


7. Sonstiges:

Aussparung
(Bitte bei Anprobe markieren)

Herrenzwinkel
(Mehrweite im Genitalbereich)




Rechts Links

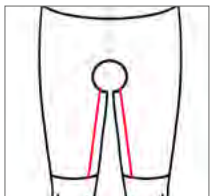

Rechts Links



Rechts Links

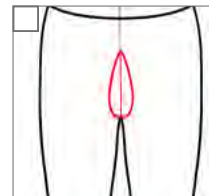

Rechts Links

8. Stomaöffnung

Öffnung für Sonde

Bitte vorab ungefähre Position angeben, oder auf Maßblatt 3 einzeichnen.

Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren, sowie Größe und Form angeben.

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

Flexibel (nur mit Naht eingefasst)

Leicht verstärkt/stabilisiert

Mit Verstärkungsrahmen (fest)

Abdeckung mit Klettverschluss

Rechts befestigt Links befestigt

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
Oben befestigt Unten befestigt Lose

9. Abnehmbare Ärmel*


rechts links

* bitte zusätzlich das Maßblatt „Abnehmbarer Ärmel“
Seite 68 – 69 ausfüllen.

10. Belüftungslöcher unter Achsel



Black

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

White




Leo



Zebra




Fire

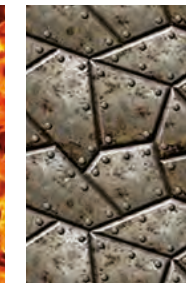

Metal




Rose

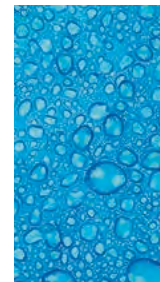

Rain



Zoo

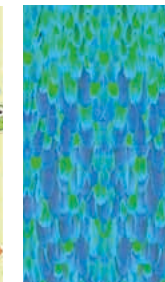

Wings



Wall



Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

11. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

Schwarz Weiß Grau

Gelb Orange Rot


Blau Türkis Grün

Pink Rosé

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

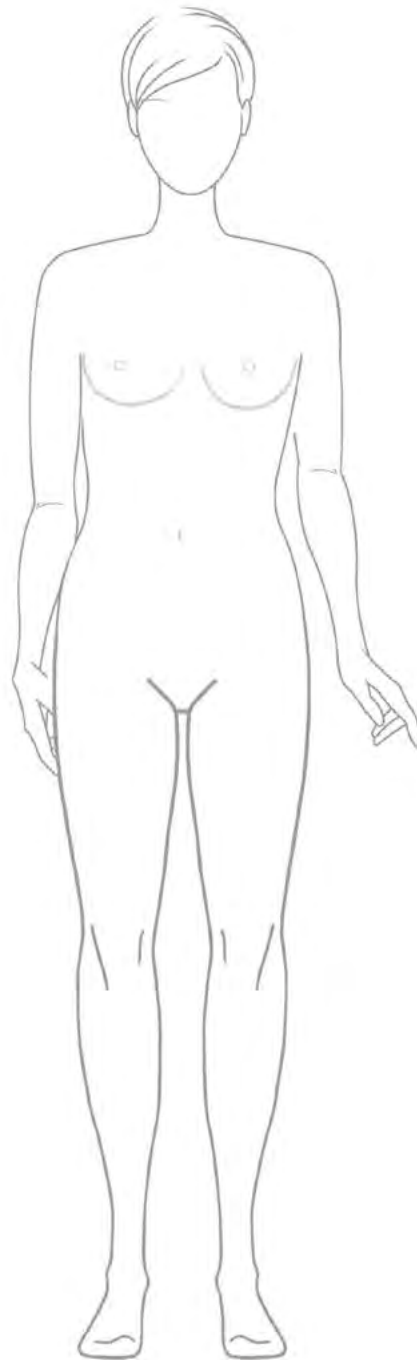

! Bitte nutzen Sie unsere **Skizzenblätter als Kopiervorlage.**

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

Für Windelträger oder zum einfachen Toilettengang kann optional bei Leggins oder Jumpsuit eine Aussparung mit Reißverschlüssen, Klettverschluss oder Druckknopfband am Innenbein bestellt werden.



Druckknopfband als Alternative zu Klett- und Reißverschluss

Aussparung


Teilbare Reißverschlüsse



JUMPSUIT LANG

Der Grundpreis beinhaltet:


- Vorder- und Rückenteil 1-lagig
- 1-Verschußart
- 1 Änderung nach der Anprobe

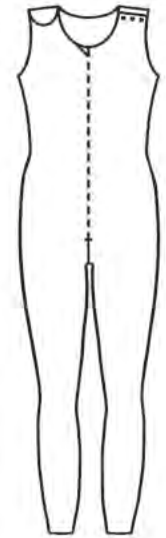

JUMPSUIT LANG MIT LANGEN ÄRMELN

Der Grundpreis beinhaltet:


- Ärmel, Vorder- und Rückenteil 1-lagig
- 1-Verschußart
- 1 Änderung nach der Anprobe

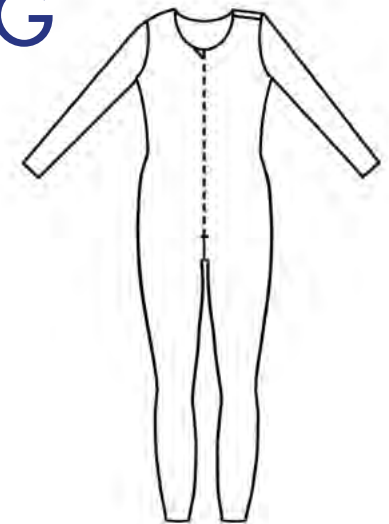


! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.


MASSBLATT 1 JUMPSUIT LANG

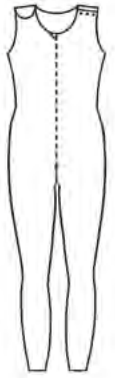

Jumpsuit lang

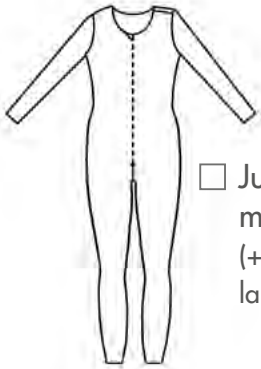

Jumpsuit lang mit langen Ärmeln (+ Zusatzmassblatt lange Ärmel)

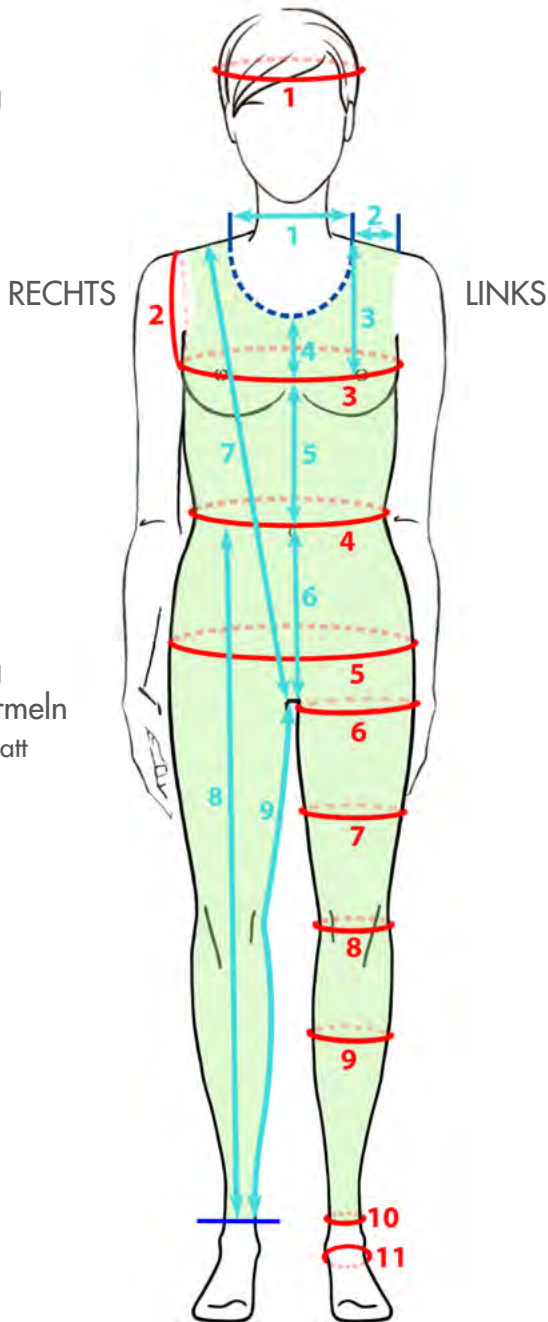

- 1. Kopfumfang
- 2. Vertikaler Schulterumfang
- 3. Brustumfang
- 4. Taillenumfang
- 5. Hüftumfang
- 6. Oberschenkelumfang unter Pofalte.....
- 7. Umfang Mitte Oberschenkel
- 8. Knieumfang
- 9. Umfang stärkste Stelle Wade
- 10. Fesselumfang
- 11. Rist (Fersenumfang)

Rechts	Links	

Umfangsmasse


- 1. Halsausschnittbreite
- 2. Trägerbreite (bei Jumpsuit ohne Ärmel).....
- 3. Brusthöhe (Schulter-Brust)
- 4. Halsausschnitt Tiefe
- 5. Vorderlänge (Brust-Taile)
- 6. Leibhöhe (Taille-Schritt)
- 7. Rumpfhöhe (Schulter-Schritt)
- 8. Beinlänge (Taille-Fessel)
- 9. Innenbeinlänge

Längenmasse

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG	
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

ZUSATZ-MASSBLATT LANGE ÄRMEL

JUMPSUIT LANG

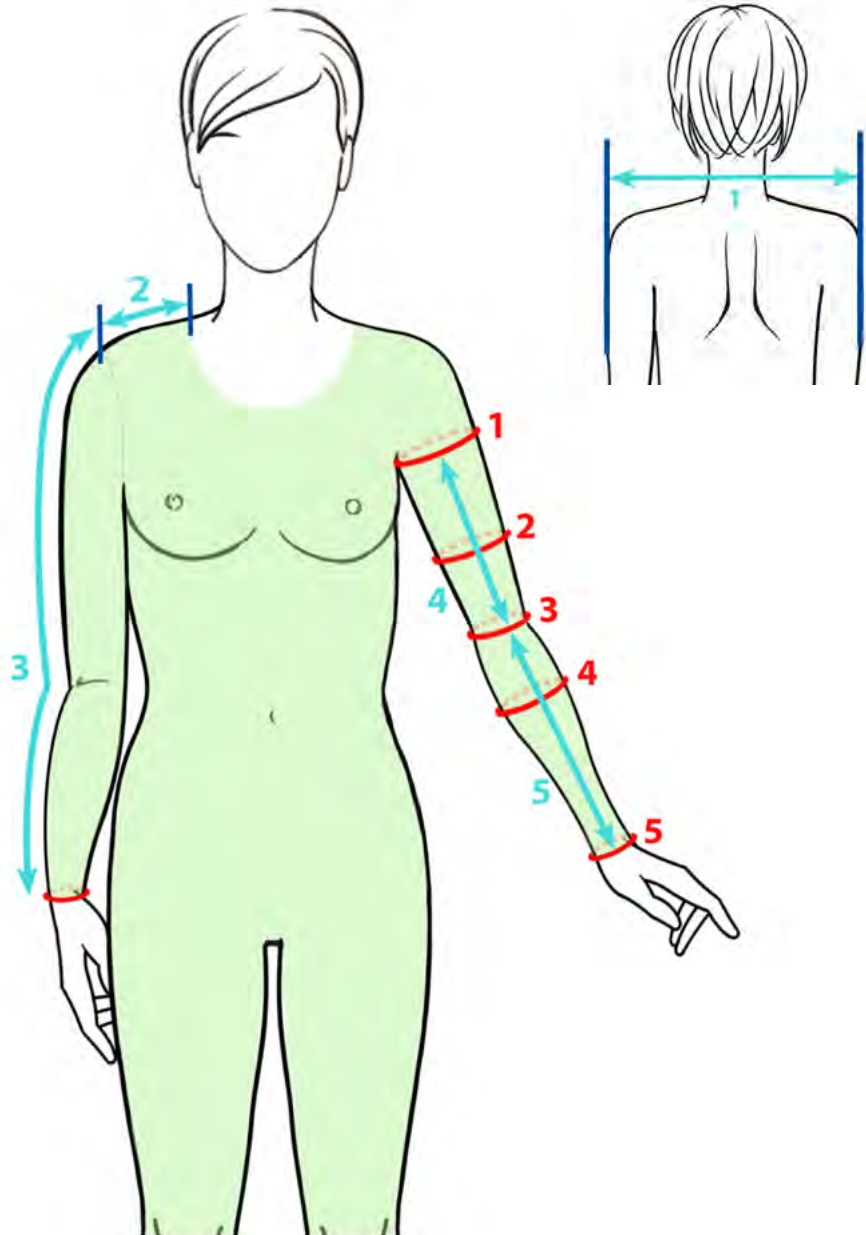

1. Oberarmumfang.....
2. Umfang Bizeps.....
3. Umfang Ellenbogen.....
4. Stärkster Unterarm Umfang.....
5. Handgelenkumfang.....

Rechts	Links

Umfangsmasse

1. Gesamte Schulterbreite.....
2. Schulterbreite.....
3. Ärmellänge gesamt.....
4. Oberarmlänge bis Ellenbogen.....
5. Unterarmlänge.....

Längenmasse

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 JUMPSUIT LANG

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

Anziehhilfe ohne Ärmel

2. Ausführung:

mit Ärmel*

Vorderteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig

Rückenteil 1-lagig 2-lagig 3-lagig

Ärmel* 1-lagig 2-lagig 3-lagig

3. Haftband:

Saum Ärmelsaum* rechts links Arme* Beine

4. Saum offen (geschnittene Kante):

5. Verschluss:

Reißverschluss Rumpf

vorne hinten rechts links

teilbar nicht teilbar lang kurz

Mit Druckknöpfen unterlegt

Verschluss Schulter

Druckknöpfe Klettverschluss Steckschließe

rechts links

6. Zusätzliche Verschlüsse:

Reißverschluss (nur bis 60 cm Länge) Klettverschluss Druckknopfband


7. Sonstiges:

Aussparung (Bitte bei Anprobe markieren)

Herrenzwinkel (Mehrweite im Genitalbereich)



Rechts Links

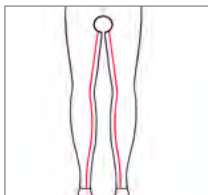

Rechts Links



8. Stomaöffnung Öffnung für Sonde

Bitte vorab ungefähre Position angeben oder auf Maßblatt 3 einzeichnen.

Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren sowie Größe und Form angeben.

Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma

Flexibel (nur mit Naht eingefasst)

Leicht verstärkt/stabilisiert

Mit Verstärkungsrahmen (fest)

Abdeckung mit Klettverschluss

Rechts befestigt Links befestigt

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
Oben befestigt Unten befestigt Lose

9. Abnehmbare Ärmel*


rechts links

* bitte zusätzlich das Maßblatt „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 68 – 69 ausfüllen.


10. Belüftungslöcher unter Achsel



Black

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

White

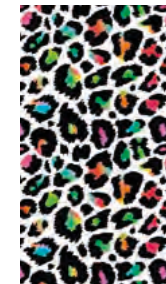


Leo



Zebra




Fire

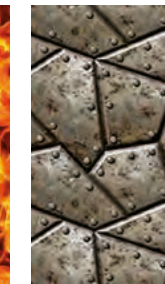

Metal




Rose

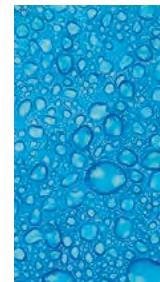

Rain



Zoo

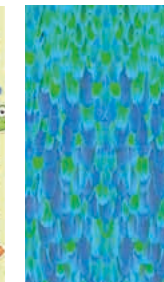

Wings



Wall



Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

11. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

Schwarz Weiß Grau

Gelb Orange Rot


Blau Türkis Grün

Pink Rosé

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

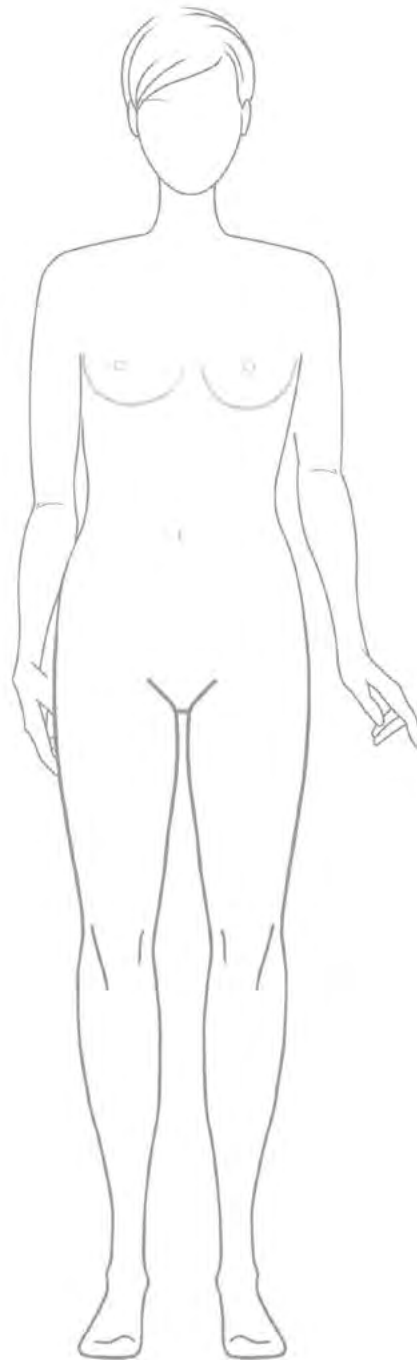

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für **BODYGUIDE**® Jumpsuit

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil, über anliegender Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

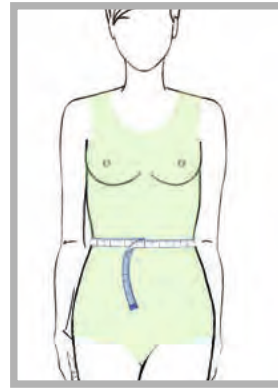


Als erstes sollte die Position der Taillenlinie festgelegt werden, indem man das Taillenmaßband waagrecht zirkulär auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung (meistens auf Bauchnabelhöhe) legt und dort belässt.

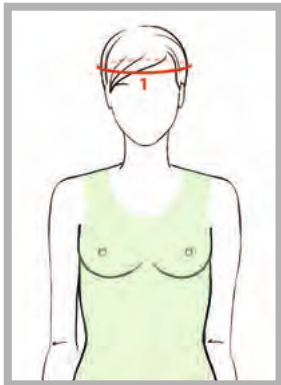


1. Kopfumfang

Hier wird waagrecht über die Stirn und den Hinterkopf auf Höhe des größten Kopfumfanges gemessen.

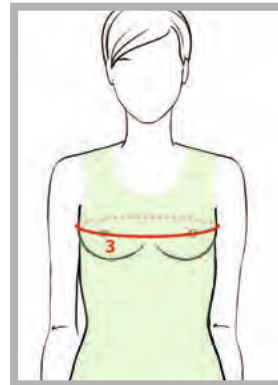


3. Brustumfang

Der Brustumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Stelle der Brust bzw. des größten Brustumfangs (üblicherweise auf Höhe der Brustwarze) nach hinten leicht ansteigend gemessen.

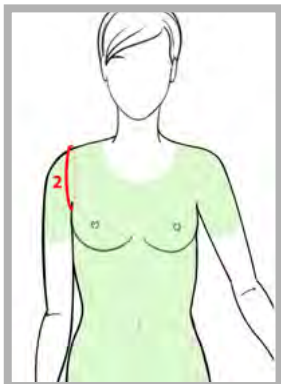

2. Vertikaler Schulterumfang

Hier wird von der Schulter ab vertikal unter dem angelegten Arm durch die Achsel bis wieder zur Schulter hinauf gemessen.

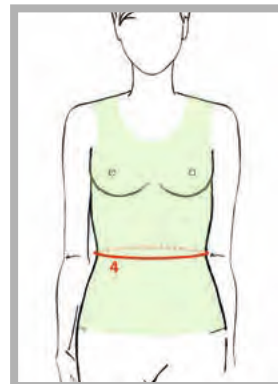


4. Taillenumfang

Der Taillenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Taillenhöhlung, oberhalb des Beckenkamms (meistens auf Bauchnabelhöhe) gemessen.




5. Hüftumfang

Hier wird ebenso wie bei Taillen- und Brustumfang, waagrecht gemessen. Die Position des Maßbandes liegt auf der stärksten Stelle des Gesäßes.

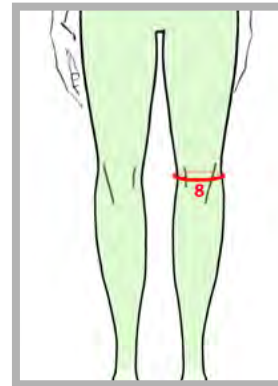


8. Knieumfang

Den Knieumfang misst man waagrecht auf Mitte der Kniescheibe bzw. an der stärksten Stelle des Knies.

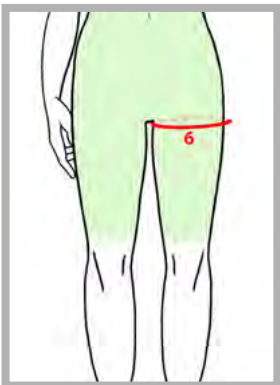


6. Oberschenkelumfang

Der Oberschenkelumfang wird waagrecht auf Schritthöhe (direkt unter der Gesäßfalte) gemessen.

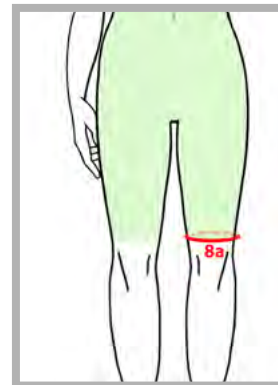


8a. Umfang Saumabschluß

Dieses Maß wird nur beim kurzen jumpsuit benötigt und wird auf der gewünschten Höhe bzw. Beinlänge festgelegt. Auf dieser Höhe wird dann waagrecht gemessen.

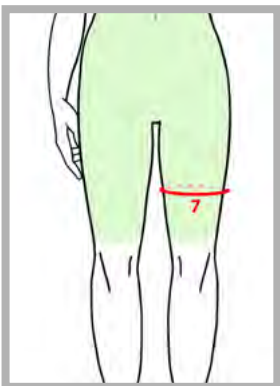


7. Umfang Mitte Oberschenkel

Hier wird zwischen dem Oberschenkelumfangsmaß und dem Knieumfang waagrecht gemessen.

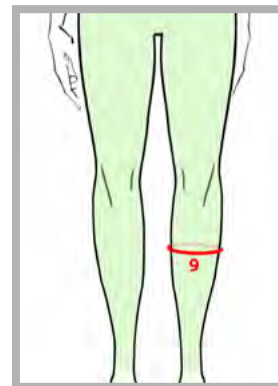


9. Wadenumfang

Der Wadenumfang wird waagrecht auf Höhe der stärksten Stelle der Wade gemessen. Sie befindet sich meist im oberen Bereich der Wade.

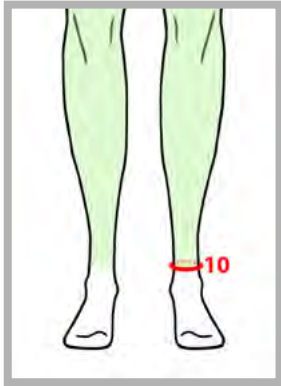

10. Fesselumfang

Der Umfang der Fessel wird direkt oberhalb des Knöchels an der schmalsten Stelle des Unterschenkels gemessen. Er bestimmt meist auch gleichzeitig die Beinlänge beim langen Jumpsuit.

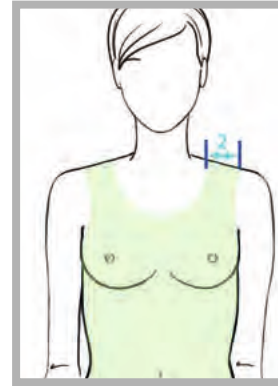


2. Trägerbreite

Hier wird einfach die gewünschte Trägerbreite eingetragen. Die Trägerbreite ist in der Regel ein paar cm schmaler als die Schulterbreite.




11. Rist (Fersenumfang)

Dieser Umfang wird diagonal über die Fersenrundung und den Rist gemessen.

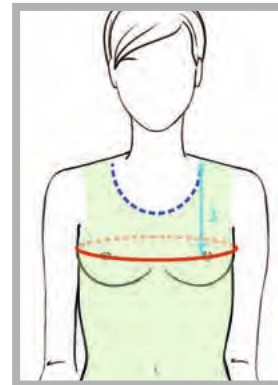


3. Brusthöhe (Schulter-Brust)

Hier wird vertikal ab der Schultermitte an der zuvor markierten Ausschnittbreite entlang bis zur Brusthöhe gemessen.

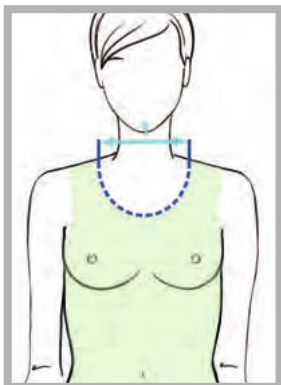


1. Halsausschnittbreite

Zuerst sollte die gewünschte Ausschnittweite mittels Markierungen seitlich vom Hals festgelegt werden. Danach wird waagrecht und halsnah von einer Markierung zur anderen gemessen.

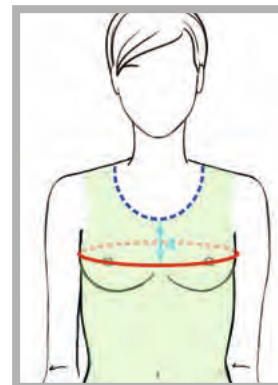


4. Halsausschnitttiefe

Dieses Längenmaß ist abhängig von der gewünschten Halsausschnitttiefe. Dabei wird von dem zuvor markierten Halsausschnitt vertikal bis zur Brusthöhe (auf Höhe des größten Brustumfangs) gemessen.

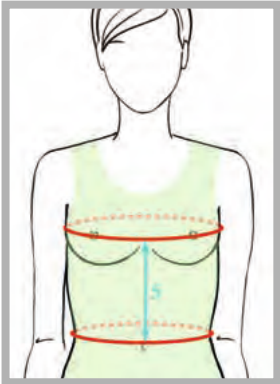


5. Vorderlänge (Brust-Taille)

Hier wird von der Brusthöhe vertikal bis zur Taillenhöhe gemessen.

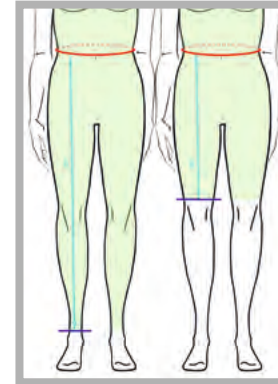


8. Beinlänge (Taille-Fessel)

Dieses Längenmaß wird seitlich von der Taille abwärts über die Hüfte am Verlauf des Beins entlang bis zur gewünschten Länge gemessen.

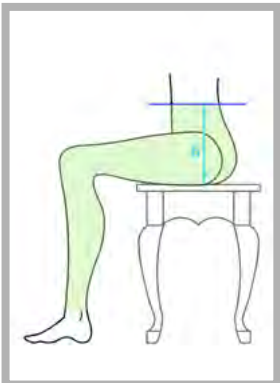


6. Leibhöhe

Die Leibhöhe wird sitzend von der Taille abwärts über die Hüfte bis zur Sitzfläche gemessen.

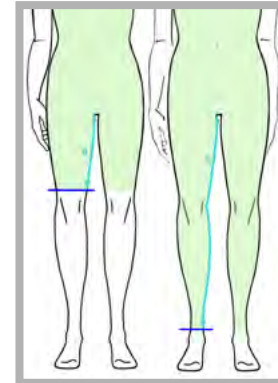


9. Innenbein Länge

Dieses Längenmaß wird vom Schritt abwärts innen am Verlauf des Beins entlang bis zur gewünschten Länge gemessen.

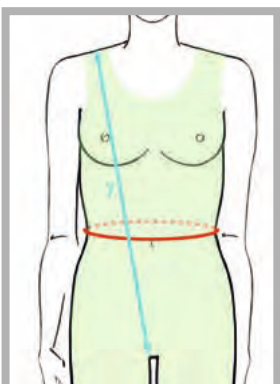

7. Rumpfhöhe (Schulter-Schritt)

Dieses Längenmaß wird sitzend von der Schultermitte abwärts über den Rücken bis zur Sitzfläche gemessen.

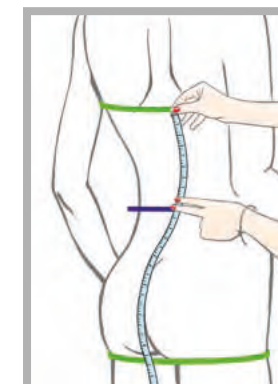


TIPP

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer glatt entlang der Körperform geführt werden.


MASSANLEITUNG

für **BODYGUIDE**® Zusatz-Massblatt Jumpsuit mit Ärmeln

Um eine gute Passform zu erreichen ist es von Vorteil, über die anliegende Unterwäsche zu messen. Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

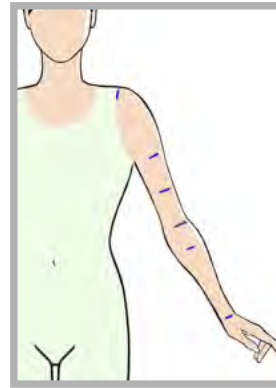


Um genaue Längenmaße zu erreichen, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

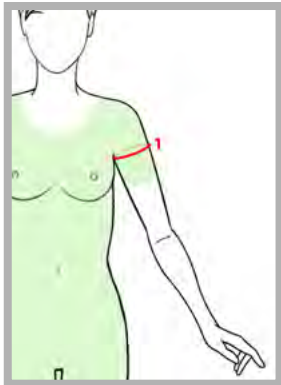


1. Oberarmumfang

Der Umfang des Oberarms wird zirkulär direkt unter der Achsel hindurch über den Oberarmmuskel gemessen.

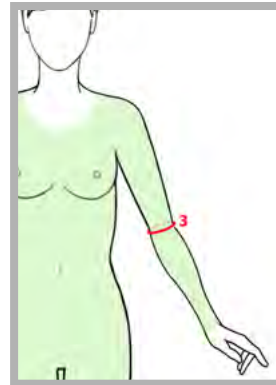


3. Umfang Ellenbogen

Beim Messen des Ellenbogenumfangs sollte der Ober- und Unterarm im rechten Winkel gebeugt werden. Dann wird in der Armbeuge über die stärkste Stelle des Ellenbogens zirkulär Maß genommen.

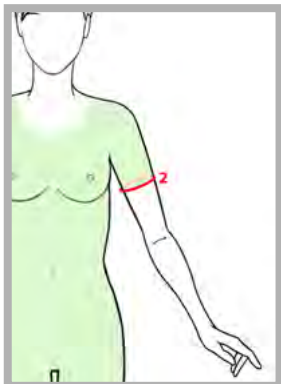


2. Umfang Bizeps/Ärmelabschluss

Auch hier wird zirkulär auf Höhe des größten Umfangs des Bizeps bzw. beim Jumpsuit mit kurzen Ärmeln auf Höhe der gewünschten Armlänge gemessen.

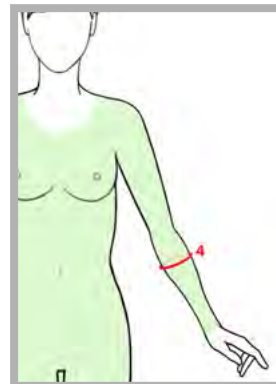


4. Stärkster Unterarm Umfang

Der Umfang des Unterarms wird zirkulär auf Höhe der stärksten Stelle des Unterarmmuskels gemessen.

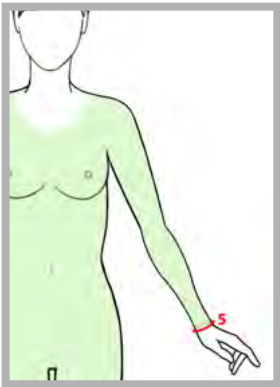


5. Handgelenkumfang

Beim Handgelenkumfang wird zirkulär über die Handwurzel gemessen.

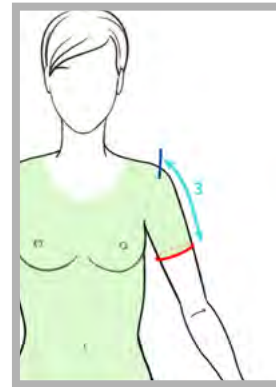

3. Ärmellänge gesamt (Kurzer Ärmel)

Dieses Maß wird beim Jumpsuit mit kurzen Ärmeln vom zuvor markierten Ende der Schulter bis zur gewünschten Ärmellänge gemessen.

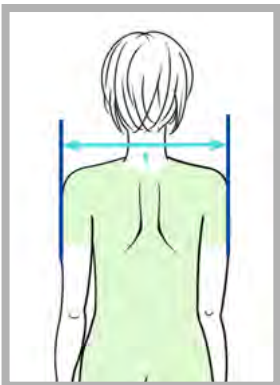


1. Gesamte Schulterbreite

Hier wird von der einen bis zur anderen Schulter jeweils am äußersten Ende der Schulterknochen am Übergang zum Arm (Außenecke) gemessen.




3. Ärmellänge gesamt (langer Ärmel)

Dieses Maß wird beim Jumpsuit mit langen Ärmeln vom zuvor markierten Ende der Schulter, bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.

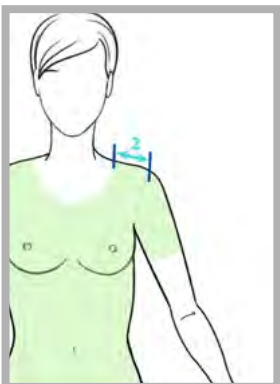


2. Schulterbreite

Es wird jeweils rechts und links von der seitlichen Markierung der Halsausschnittbreite zum zuvor markierten jeweiligen äußersten Ende des Schulterknochens am Übergang zum Arm (Außenecke) gemessen.

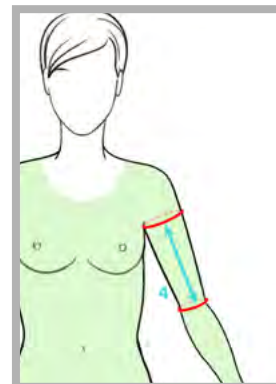


4. Oberarmlänge bis Ellenbogen

Dieses Maß wird nur beim Jumpsuit mit langen Ärmeln benötigt. Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur Markierung Ellenbogen Armbeuge gemessen.

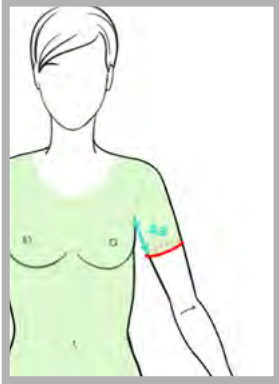


4a. Oberarmlänge bis Ärmelabschluss

Dieses Maß wird nur beim Jumpsuit mit kurzen Ärmeln benötigt. Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur gewünschten Ärmellänge gemessen.

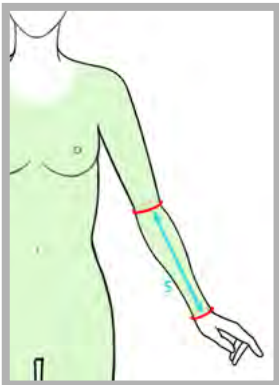



5. Unterarmlänge

Dieses Längenmaß wird nur beim Jumpsuit mit langen Ärmeln benötigt. Es wird von der Markierung Ellenbogen Armbeuge bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.

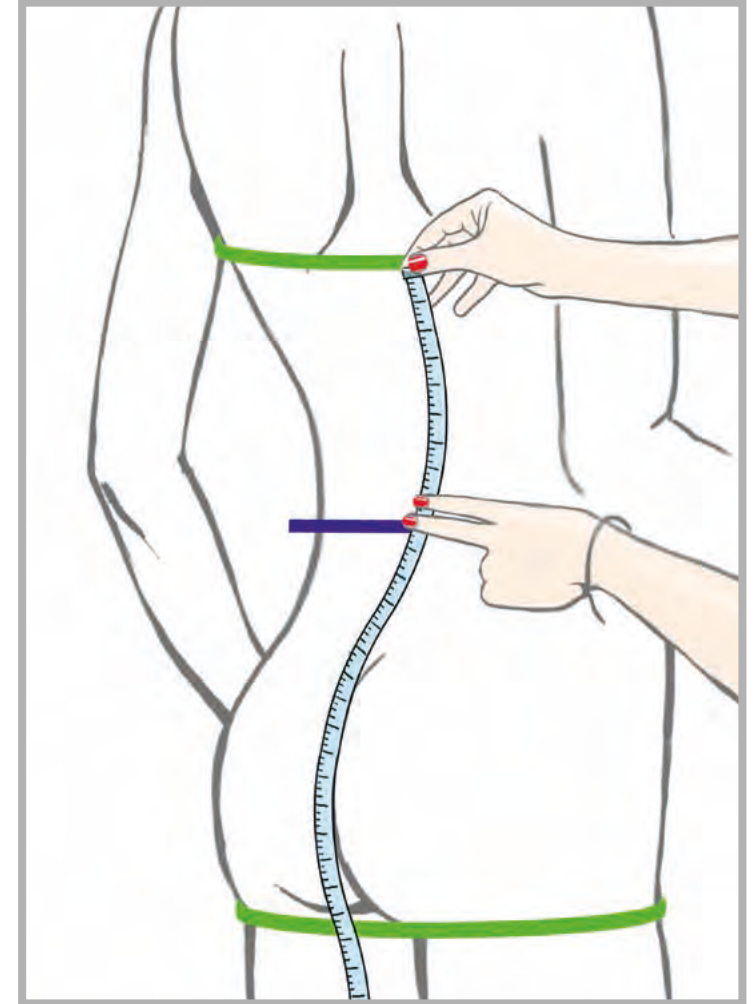

TIPP

Um exakte Höhenmaße zu erhalten, sollte das Maßband immer glatt entlang der Körperform geführt werden.

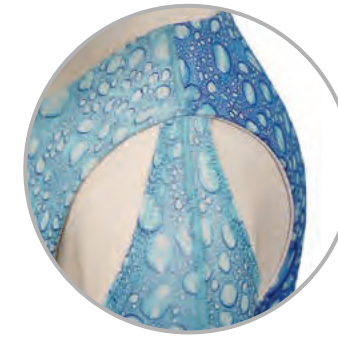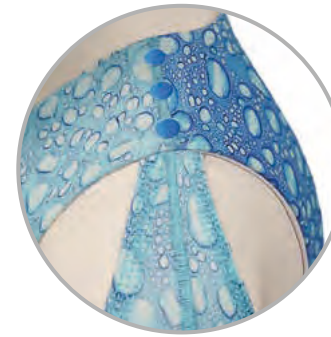

Bei den Ärmelverbindungen zum Oberteilträger kann zwischen der Verschlussart Klettverschluss oder Druckknöpfen, sowie über dem Träger liegendem oder unter dem Träger liegendem Ärmel gewählt werden.



ABNEHMBARER ÄRMEL




Als Erweiterung zu unseren BODYGUIDE® Produkten: Weste, Jumpsuit und Top sind zukünftig auch abnehmbare Ärmel in den unterschiedlichen Dekor erhältlich. Die Befestigung an der Rumpfvorsorgung erfolgt wahlweise mit Klett-Flauschbesatz oder Druckknöpfen die im Bereich des Schulterdaches befestigt werden.

Die individuell gefertigten Ärmel können einlagig oder für eine höhere Kompressionswirkung auch doppellagig bestellt werden. Die bei 30 °C waschbaren Unikate können optional auch mit einem speziellen Haftband am Saum versehen werden, um ein Hochrutschen des Ärmels bei Bewegungen des Ellenbogens zu verhindern.

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 ABNEHMBARER ÄRMEL

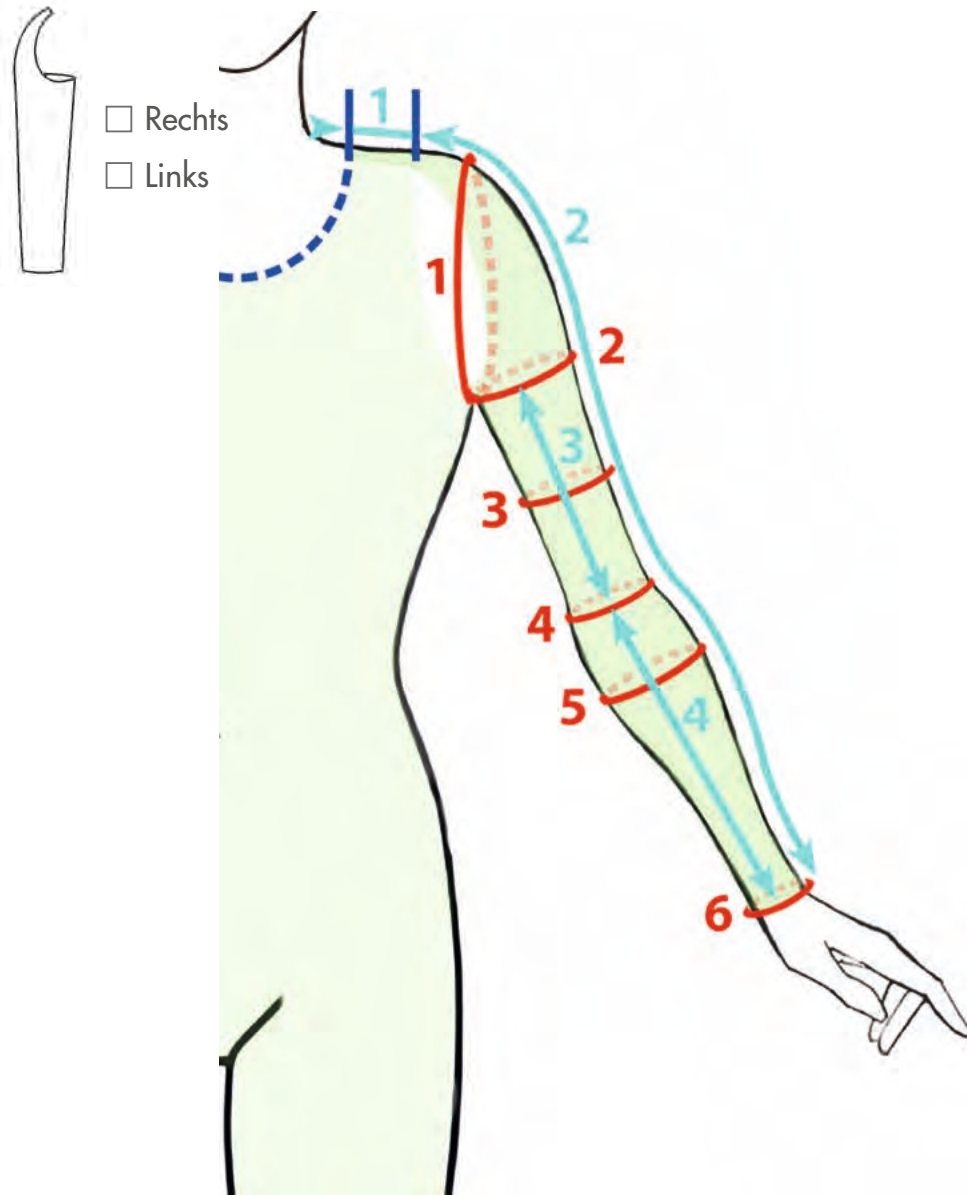

- 1. Vertikaler Schulterumfang**
- 2. Oberarmumfang**
- 3. Umfang Bizeps**
- 4. Umfang Ellenbogen**
- 5. Stärkster Unterarm Umfang**
- 6. Handgelenkumfang**

Rechts	Links

Umfangmaße

- 1. Trägerbreite**
- 2. Ärmellänge ab Träger**
- 3. Oberarmlänge bis Ellenbogen**
- 4. Unterarmlänge**

Rechts	Links

Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

MASSBLATT 2 ABNEHMBARER ÄRMEL

1. **Stoff:** (Design bitte ankreuzen)

Anziehhilfe

2. **Ausführung:**

1-lagig

2-lagig

3. **Haftband:**

Saum

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
4. **Verschluss:** mit Oberteil verbunden

Ärmelverbindung unter Oberteilträger liegend


Ärmelverbindung über Oberteilträger liegend

Klettverschluss


Druckknöpfe



Black

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

White

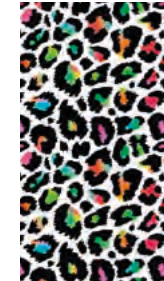

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

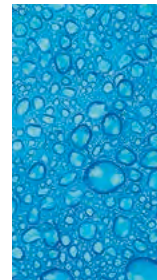

Rain




Zoo

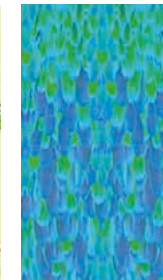

Wings



Wall

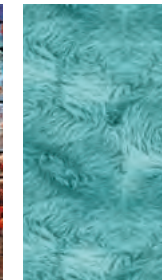

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

5. **Reißverschlüsse und Nähte**

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

Schwarz

Weiß

Grau

Blau

Türkis

Grün

Gelb

Orange

Rot

Pink


Rosé

SKIZZENBLATT ABNEHMBARER ÄRMEL

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

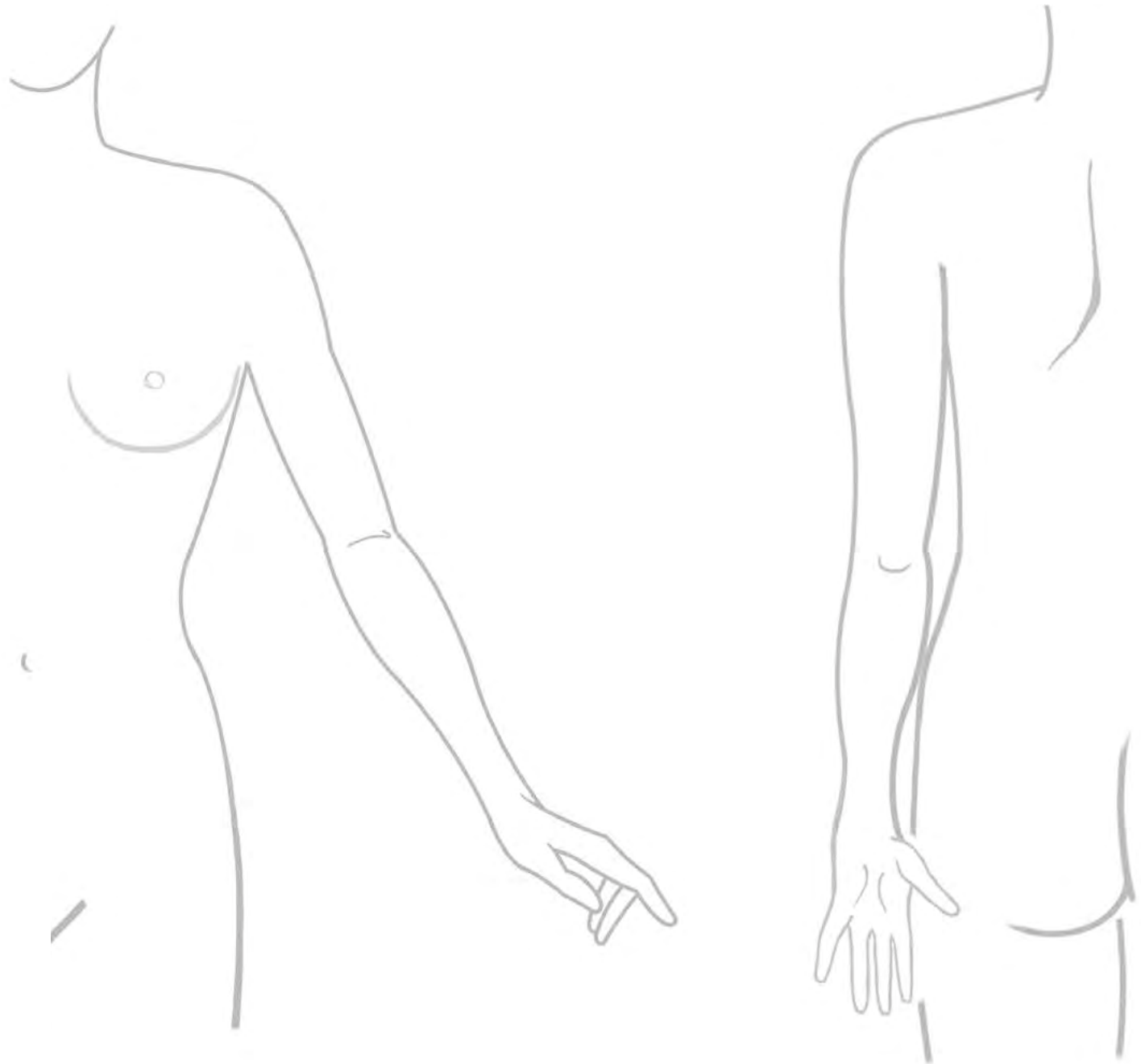

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

MASSANLEITUNG

für **BODYGUIDE**® Abnehmbarer Ärmel


Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Das Maßnehmen für den abnehmbaren Ärmel sollte im Zusammenhang mit dem dazu gehörigen Oberteil (Weste, Top oder Jumpsuit) erfolgen.

Wird ein abnehmbarer Ärmel zu einem späteren Zeitpunkt bestellt, sollte beim Maßnehmen das dazu gehörige Oberteil angezogen werden, um korrekte Längenmaße zu erhalten.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längsmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.




Um genaue Längsmaße zu erhalten ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren, hautfreundlichen Stift auf dem Körper zu markieren.

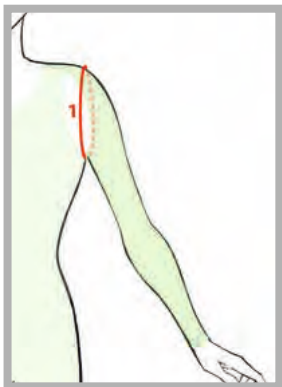


1. Vertikaler Schulterumfang

Hier wird von der Schulter ab, vertikal unter dem angelegten Arm durch die Achsel bis wieder zu Schulter hinauf gemessen

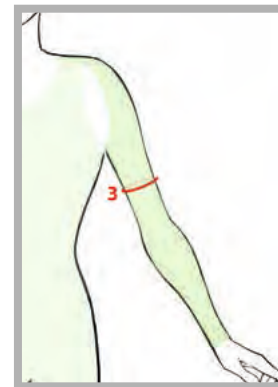


3. Umfang Bizeps

Auch hier wird auf Höhe des größten Umfangs des Bizeps gemessen.

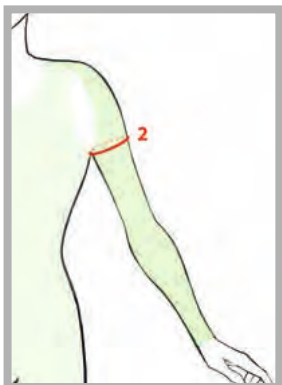


2. Oberarmumfang

Der Umfang des Oberarms wird direkt unter der Achsel hindurch über den Oberarmmuskel gemessen.

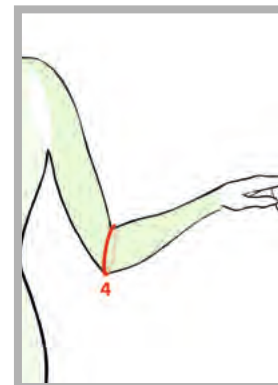


4. Umfang Ellenbogen

Beim Messen des Ellenbogenumfangs sollte der Ober- und Unterarm im rechten Winkel gebeugt werden. Dann wird in der Armbeuge über die stärkste Stelle des Ellenbogens Maß genommen.

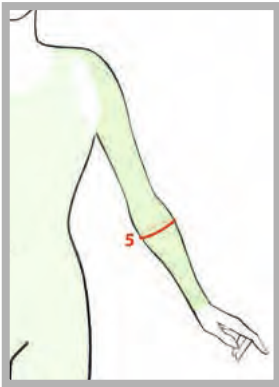

5. Stärkster Unterarm Umfang

Der Umfang des Unterarms wird auf Höhe der stärksten Stelle des Unterarmmuskels gemessen.

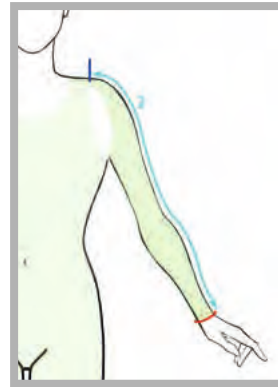


2. Ärmellänge ab Träger

Dieses Maß wird ab der zuvor markierten äußeren Position des Trägers über den leicht angewinkelten Ellenbogen bis zum Handgelenk, oder bis zur gewünschten Ärmellänge gemessen. Wird der abnehmbare Ärmel nachträglich bestellt, wird bei angezogenem Oberteil von der äußeren Trägerkante ab gemessen.




6. Handgelenkumfang

Beim Handgelenkumfang wird zirkulär über die Handwurzel gemessen.

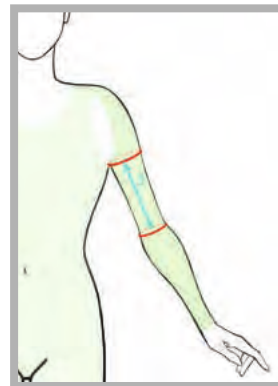


3. Oberarmlänge bis Ellenbogen

Hier wird vom Armansatz in der Achsel bis zur Markierung Ellenbogen Armbeuge gemessen.

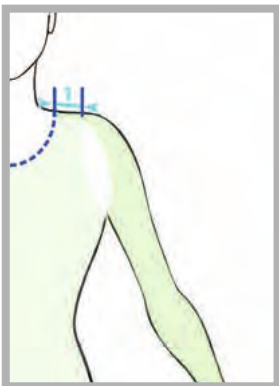

1. Trägerbreite

Hier wird die Trägerbreite des dazu gehörigen Oberteils (Weste, Top, Jumpsuit) gemessen.

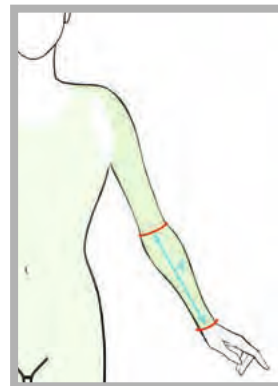

4. Unterarmlänge

Die Unterarmlänge wird von der Markierung Ellenbogen Armbeuge bis zum Handgelenk oder der gewünschten Ärmellänge gemessen.



HANDSCHUH


Ergänzend zu den abnehmbaren Ärmeln und den Arm- und Beinsleeves können Sie bei uns auch maßangefertigte Handschuhe in den farnefrohen Designvarianten bestellen. Hierbei werden die Fingergrundgelenke zirkulär eingefasst und der Daumen separat geführt. Optional können der obere und untere Abschluss mit einem speziellen Haftband versehen werden. Wie auch bei den Arm- und Beinsleeves besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Korrekturzüge zur Stabilisierung und Korrektur einzuarbeiten. Neben den unterschiedlichen Korrekturmöglichkeiten bewirkt das Tragen der eng anliegenden Handschuhe eine Verbesserung der sensorischen Wahrnehmung und eine Erhöhung der feinmotorischen Handfunktionen.



! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 HANDSCHUH

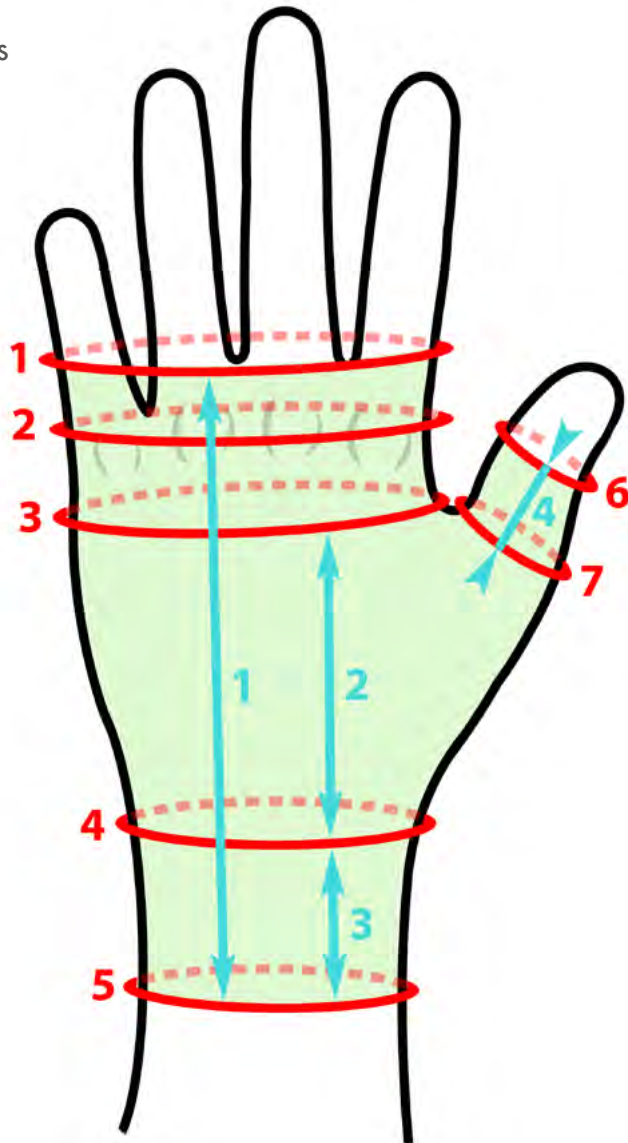

1. Abschluss distal.....
2. Umfang Fingergrundgelenke MCP.....
3. Mittelhandumfang.....
4. Handgelenkumfang.....
5. Umfang Handgelenk-Abschluss.....
6. Umfang Daumen-Abschluss.....
7. Daumenumfang Grundgelenk.....

Rechts	Links

Umfangmaße

1. Gesamtlänge.....
2. Mittelhandlänge.....
3. Schafflänge Handgelenk.....
4. Daumenlänge.....

Rechts	Links

Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig

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
3. Haftband:

- Fingerabschluss
- Handgelenk


4. Verschluss:

- Reißverschluss
- Klettverschluss


(Bitte Position und Länge auf dem Skizzenblatt einzeichnen oder angeben.)



Black

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

White

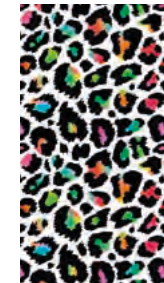

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

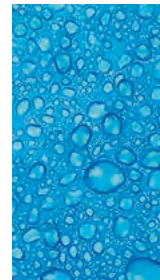

Rain




Zoo

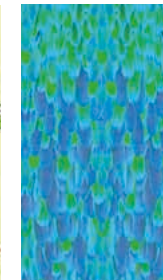

Wings



Wall

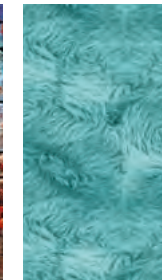

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

5. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

SKIZZENBLATT HANDSCHUH

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.



! Bitte nutzen Sie unsere **Skizzenblätter als Kopiervorlage.**


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

MASSANLEITUNG

für **BODYGUIDE**® Handschuh

Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

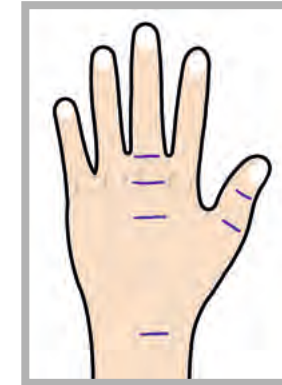


Vorab wird die Gesamtlänge, danach alle benötigten Umfangsmaße ermittelt und anschließend auf der Hand markiert. Dies ermöglicht ein zügiges und genaues Maßnehmen.




1. Abschluss Distal

Hier wird der Umfang an der zuvor festgelegten Position des Handschlusses distal gemessen. Diese Position liegt in der Regel direkt am Ende der Fingergrundgelenke (distal).

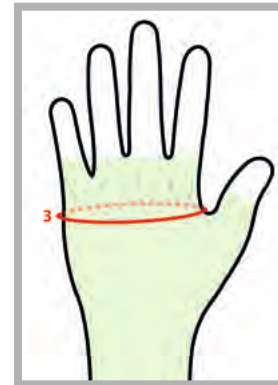


3. Mittelhandumfang

Hier wird am Anfang der Daumenfalte über den Handrücken und Innenfläche der Hand bei leicht gespreizten Fingern gemessen.

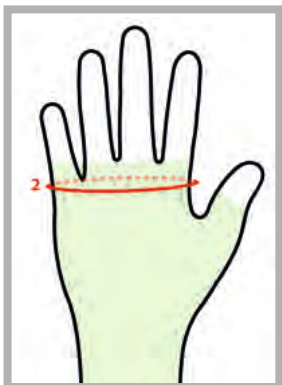


2. Umfang Fingergrundgelenke (MCP)

Dieser Umfang wird über den Fingergrundgelenken des Zeige-, Mittel-, Ring- und kleinen Fingers gemessen.

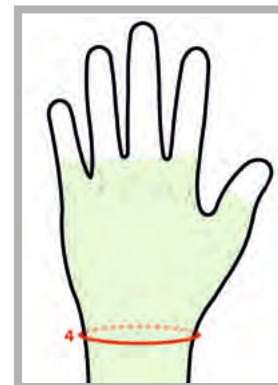


4. Handgelenkumfang

Der Handgelenkumfang wird direkt über die Handwurzel gemessen.

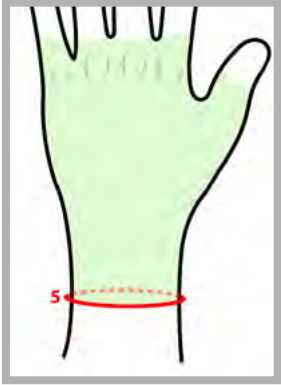

5. Umfang Handgelenk-Abschluss

Hier wird der Umfang, der zuvor festgelegten Position des gewünschten proximalen Handschuh-Abschlusses gemessen. Wird ein längerer Handschuhschaft gewünscht, z. B. bis Mitte Unterarm, kann Zusätzlich das Massblatt Armsleeve (Seite 82) genutzt werden.

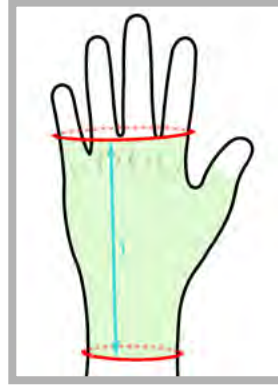


1. Gesamtlänge

Dieses Längenmaß bezieht sich beim normal langen Handschuh auf den distalen Abschluss bis zum proximalen Abschluss hinter dem Handgelenk. (von Umfangsmaß Position 1– 5).



6. Umfang Daumen-Abschluss

Dieses Umfangsmaß wird am gewünschten distalen Ende des Daumenabschlusses gemessen.

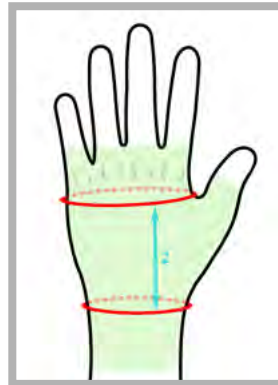


2. Mittelhand Länge

Dieses Längenmaß wird von der Position des Handgelenks bis zur Position der Mittelhand (Höhe Daumenfalte gemessen).




7. Daumenumfang Grundgelenk

Hier wird über das Daumengrundgelenk, am Ansatz der Daumenfalte entlang gemessen.

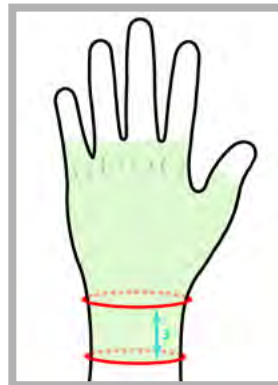

3. Schaftlänge Handgelenk

Hier wird vom Handgelenk bis zur gewünschten proximalen Länge des Handschuhs gemessen. (Von Umfangsmaß Position 4 – 5).

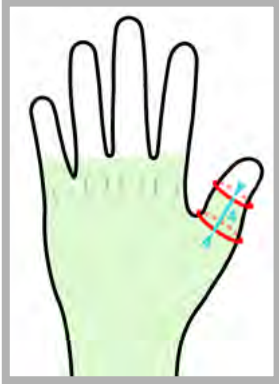

4. Daumenlänge

Dieses Maß wird vom Daumengrundgelenk bis zum Daumenabschluss distal gemessen.





Bein-Sleeve mit Naht in Kontrastfarbe, Haftband am oberen Abschluss und offenem Saum.



Flexible Naht am oberen Abschluss.




Offener Saum (Empfohlen für Orthesenträger).



Silikonfreies transparentes Haftband für oberen Abschluss und Saum.



Arm-Sleeve mit Naht passend zum Design.

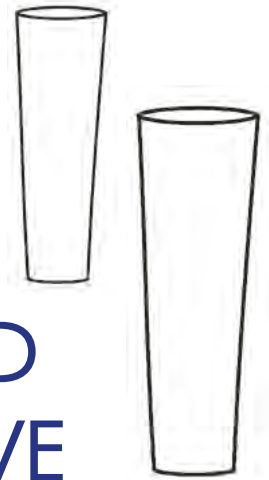

ARM- UND BEINSLEEVE

Zusätzlich im Programm unserer BODYGUIDE®-Serie gibt es die Arm- und Beinsleeves, die sowohl einzeln als auch in Verbindung mit einer Rumpfvorsorgung eingesetzt werden können. Wie auch bei den abnehmbaren Ärmeln und Handschuhen können die Sleeves mit einem speziellen Haftband am oberen und unteren Abschluss bestellt werden. Des Weiteren bieten wir unterschiedliche funktionsunterstützende Korrekturzüge an, die fest in die Vorsorgung eingearbeitet werden. Hierbei haben Sie beispielweise die Möglichkeit, über einen gelenkübergreifenden Korrekturzug Einfluss auf die Streckung oder auch Rotation der betroffenen Extremität zu nehmen.


! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

MASSBLATT 1 ARM-SLEEVE



Rechts
 Links

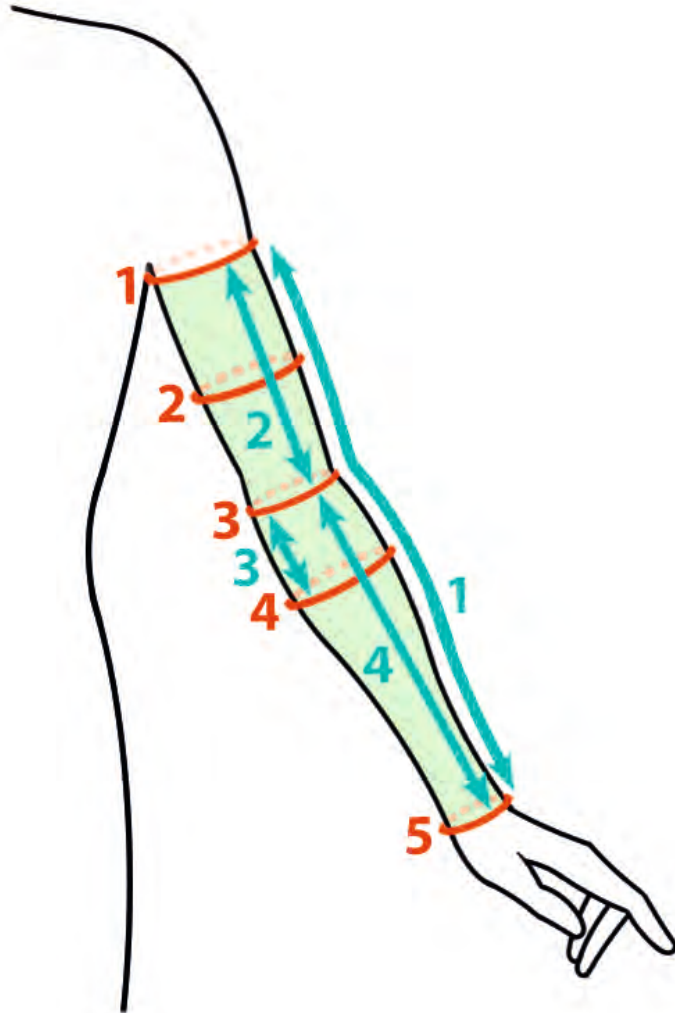

1. Umfang oberer Abschluss.....
2. Umfang Bizeps.....
3. Umfang Ellenbogen.....
4. Unterarmumfang.....
5. Umfang Handgelenk.....

Rechts	Links

UmfangsmäÙe

1. Gesamtlänge.....
2. Oberarmlänge.....
3. Ellenbogen bis Unterarmmuskel.....
4. Ellenbogen bis unterer Abschluss.....

Rechts	Links

LängenmäÙe

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig

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
3. Haftband:

- Oberer Abschluss
- Unterer Abschluss


4. Verschluss:

- Reißverschluss
- Klettverschluss


(Bitte Position und Länge auf dem Skizzenblatt einzeichnen oder angeben.)



Black

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

White

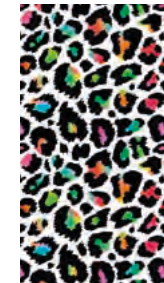

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

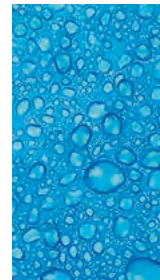

Rain




Zoo

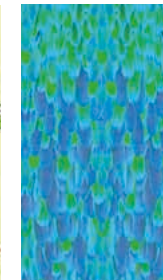

Wings



Wall

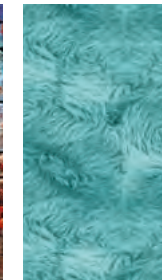

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

5. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:


- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

SKIZZENBLATT ARM-SLEEVE

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

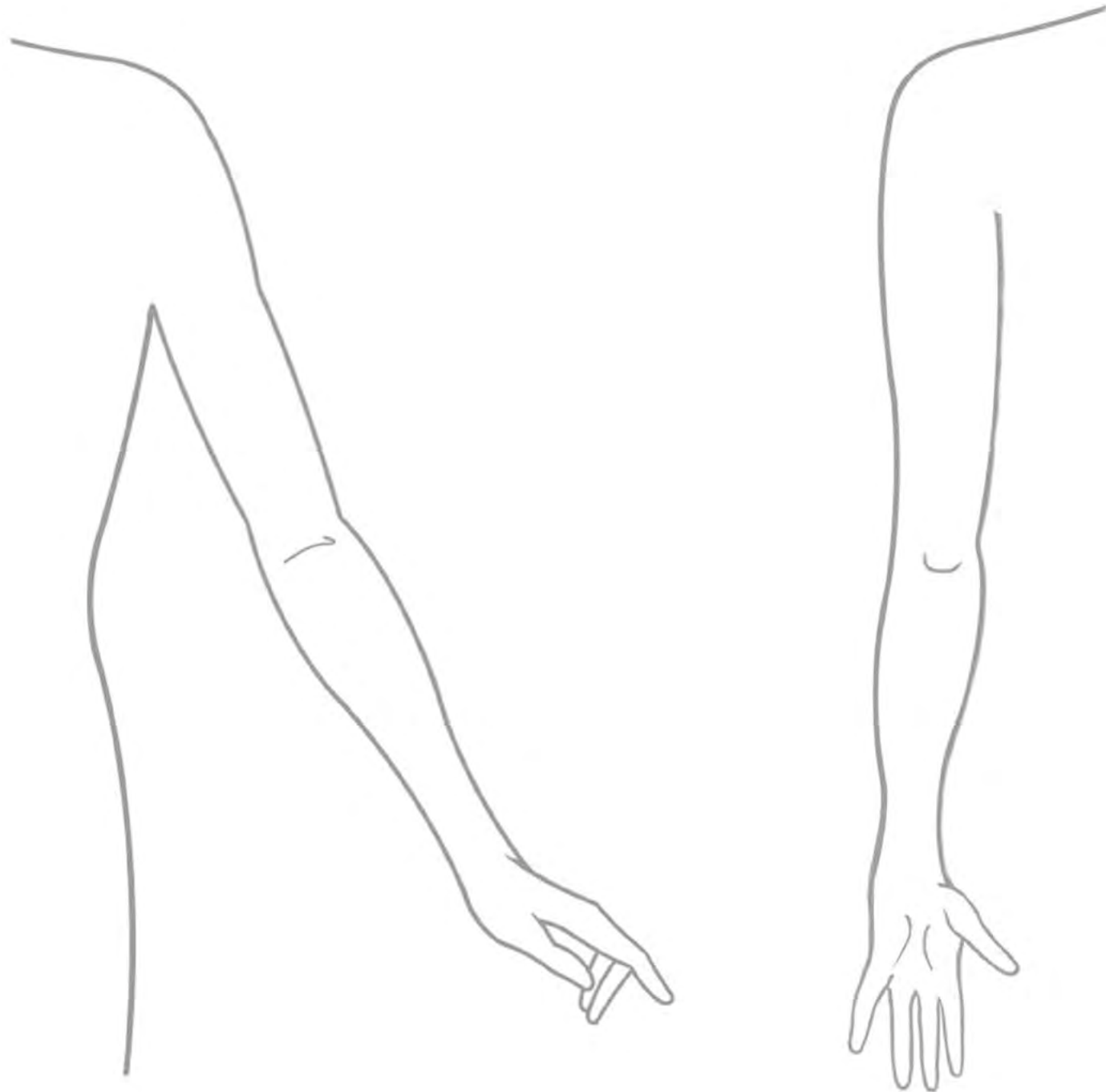

! Bitte nutzen Sie unsere **Skizzenblätter als Kopiervorlage.**

Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungen, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für **BODYGUIDE**® Arm-Sleeve

Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren, hautfreundlichen Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.




Als erstes sollte die Gesamtlänge des Armsleeves festgelegt werden und auf dem Arm markiert werden. Danach werden alle dazwischen liegenden, benötigten Umfangsmaße ermittelt und ebenfalls markiert. Liegt ein Umfangsmaß des Maßblattes außerhalb des späteren Sleeves, muss es selbstverständlich nicht genommen werden.

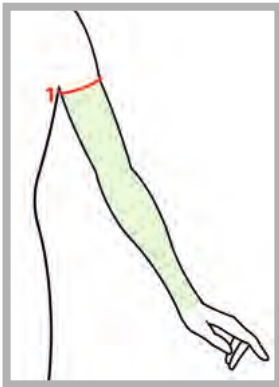


1. Umfang oberer Abschluss

Dieses Umfangsmaß liegt normalerweise im Bereich des Oberarms und wird an der zuvor markierten Position gemessen.

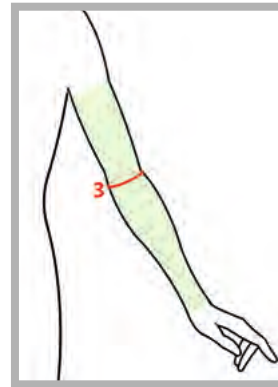


3. Umfang Ellenbogen

Beim Messen des Ellenbogenumfangs sollte der Ober- und Unterarm im rechten Winkel gebeugt werden. Dann wird in der Armbeuge über die stärkste Stelle des Ellenbogens Maß genommen.

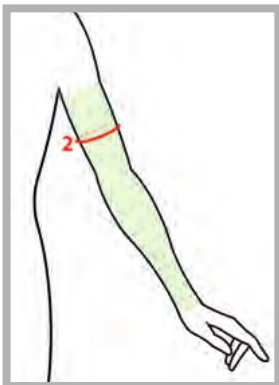


2. Umfang Bizeps

Hier wird auf Höhe des größten Umfangs des Bizeps gemessen.

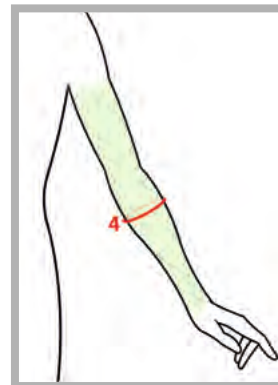


4. Unterarmumfang

Der Umfang des Unterarms wird auf der Höhe der stärksten Stelle des Unterarmmuskels gemessen.

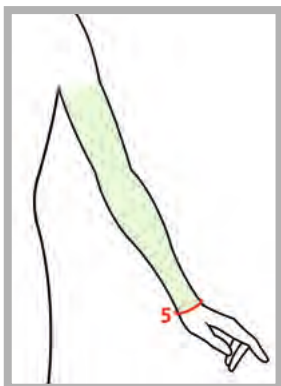


5. Umfang Handgelenk unterer Abschluss

Beim Handgelenkumfang wird zirkulär über die Handwurzel gemessen. Er bildet gleichzeitig auch das untere Abschlussmaß. Falls ein kürzerer Sleeve gewünscht ist, muss das abweichende Maß genommen werden.

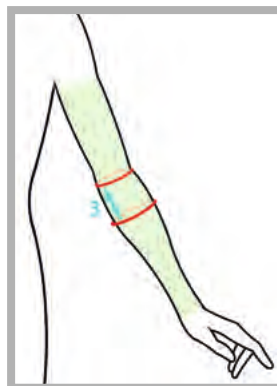


3. Ellenbogen bis Unterarmmuskel

Bei diesem Längenmaß wird von der Armbeuge Ellenbogen ab bis zur zuvor markierten Stelle Unterarmmuskel gemessen.

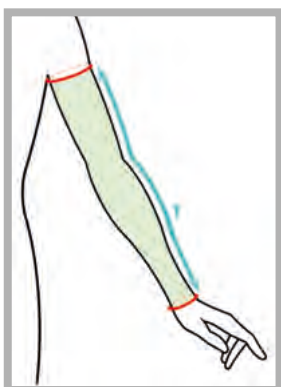


1. Gesamtlänge

Hier wird entlang der Armform vom zuvor markierten oberen Abschluss bis zum unteren Abschluss gemessen.

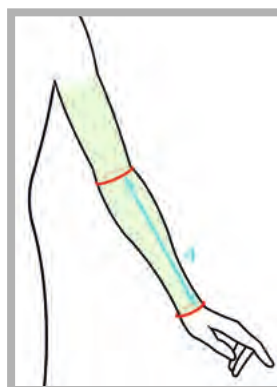

4. Ellenbogen bis Handgelenk unterer Abschluss

Hier wird von der Armbeuge Ellenbogen bis zum unteren Ärmelabschluss bzw. Handgelenk gemessen.

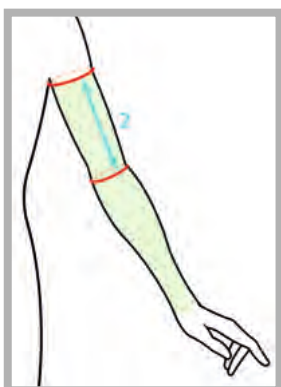


2. Oberarmlänge

Dieses Maß wird wieder entlang der Armform vom oberen Abschluss bis zur Armbeuge gemessen.



- Rechts
- Links

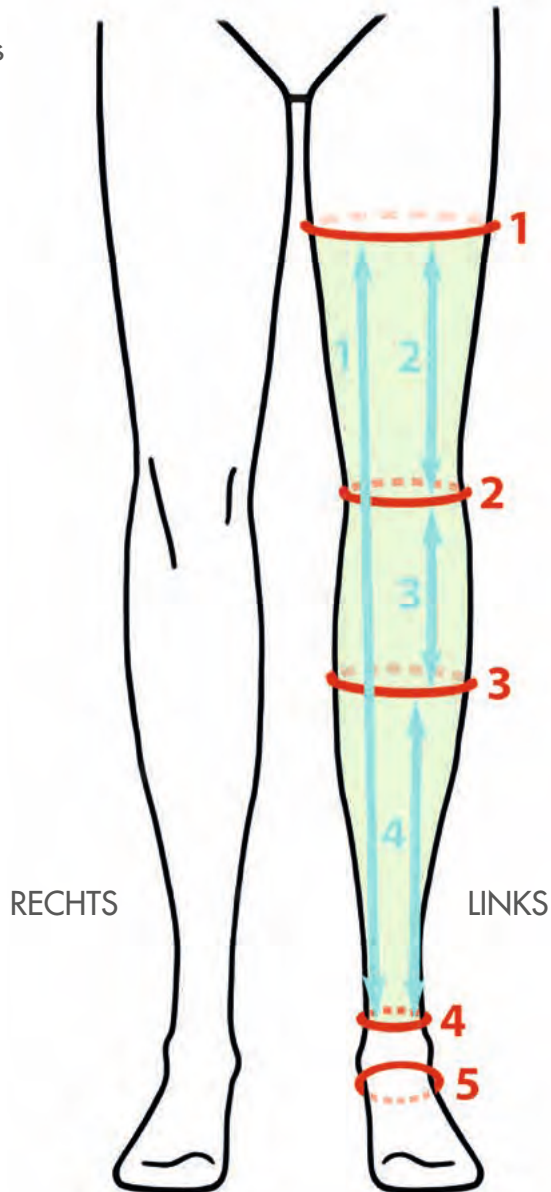

1. Oberer Abschluss Umfang.....
2. Knieumfang.....
3. Wadenumfang.....
4. Unterer Abschluss.....
5. Ristumfang.....

Rechts	Links

Umfangmaße

1. Gesamtlänge.....
2. Oberer Abschluss - Knie.....
3. Knie - Wade.....
4. Wade - unterer Abschluss.....

Rechts	Links

Längenmaße

KONTAKTDATEN	<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:
Anschrift:	Alter: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:
	Diagnose:
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
- 2-lagig

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
3. Haftband:

- Oberer Abschluss
- Unterer Abschluss


4. Verschluss:

- Reißverschluss
- Klettverschluss


(Bitte Position und Länge auf dem Skizzenblatt einzeichnen oder angeben.)



Black

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

White

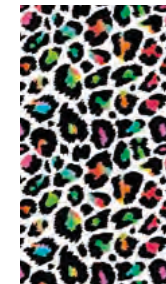

Leo



Zebra




Fire



Metal




Rose

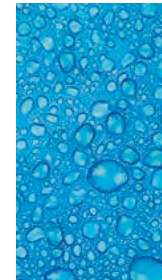

Rain




Zoo

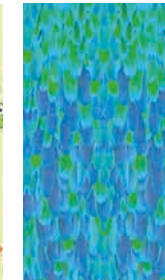

Wings



Wall

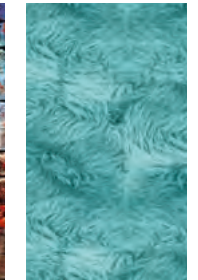

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

5. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design

Kontrastfarbe:


- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

SKIZZENBLATT BEIN-SLEEVE

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

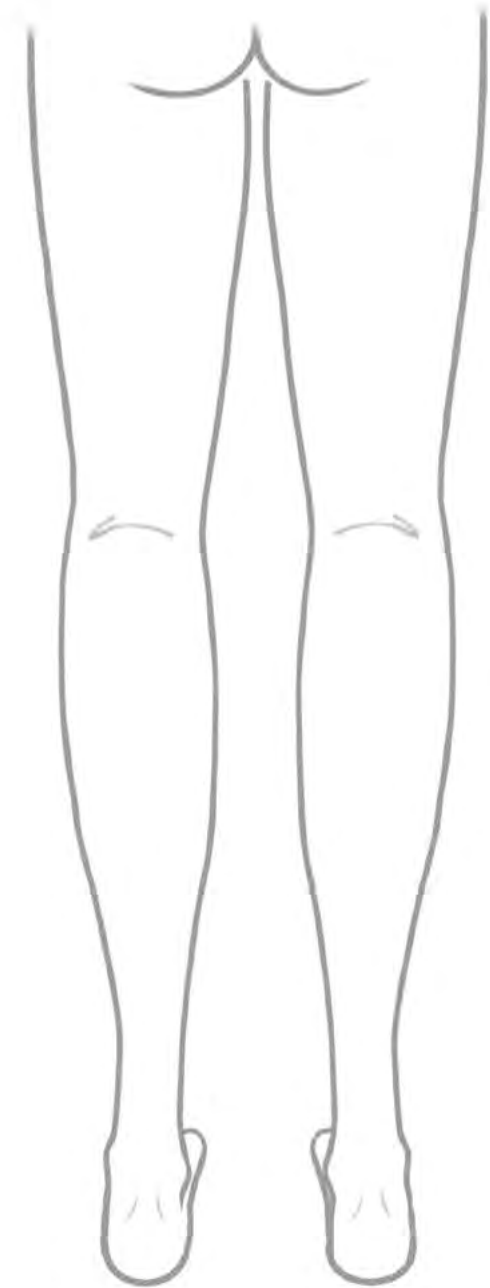

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungs-, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für BODYGUIDE® Bein-Sleeve

Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren, hautfreundlichen Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

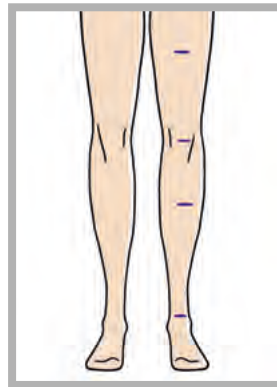


Als erstes sollte die Gesamtlänge des Beinsleeves festgelegt werden und auf dem Bein markiert werden. Danach werden alle dazwischen liegenden, benötigten Umfangsmaße ermittelt und ebenfalls markiert. Liegt ein Umfangsmaß des Maßblattes außerhalb des späteren Sleeves, muss es selbstverständlich nicht genommen werden.

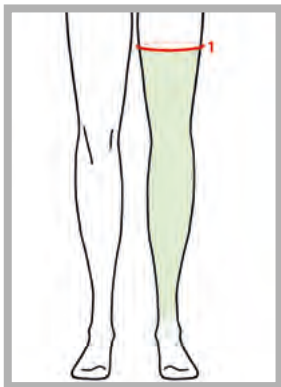


1. Oberer Abschluss

Der obere Abschluss liegt üblicherweise im Bereich des Oberschenkels und wird auf Höhe der zuvor festgelegten Position waagrecht gemessen.

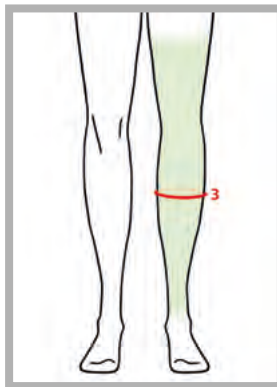


3. Wadenumfang

Der Wadenumfang wird waagrecht, auf Höhe der stärksten Stelle der Wade gemessen. Sie befindet sich meist im oberen Bereich der Wade.

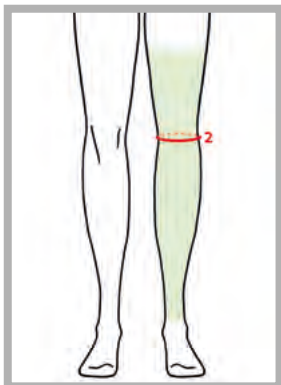

2. Knie

Den Knieumfang misst man waagrecht auf Mitte der Kniescheibe, bzw. der stärksten Stelle des Knies.

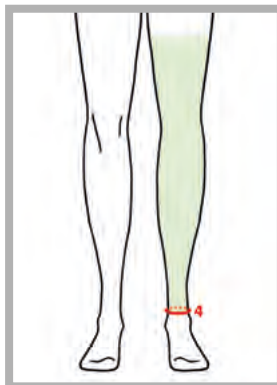


4. Unterer Abschluss

Der Umfang des unteren Abschlusses wird an der zuvor markierten Position gemessen. Er liegt meist im Bereich der Fessel.



5. Ristumfang

Dieser Umfang wird diagonal über die Fersenrundung und dem Rist gemessen.

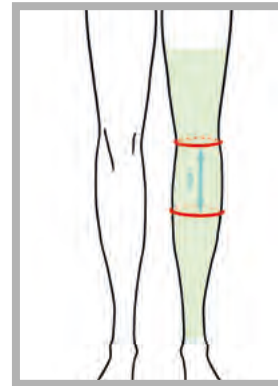


3. Knie - Wade

Hier wird die Strecke zwischen den zuvor markierten Positionen Mitte Knie Scheibe bis zum stärksten Umfang der Wade gemessen.




1. Gesamtlänge

Hier wird vom oberen Abschluss entlang der seitlichen Bein form bis zum unteren Abschluss gemessen

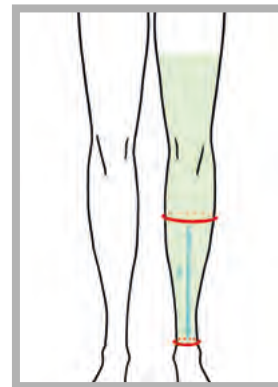

4. Wade - unterer Abschluss

Dieses Längenmaß wird ab der stärksten Stelle der Wade bis zur gewünschten Länge des Sleeves gemessen. (Diese Position liegt meist im Bereich der Fessel).

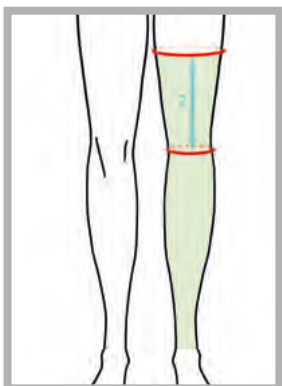

2. Oberer Abschluss - Knie

Dieses Längenmaß wird wie bei der Gesamtlänge vom oberen Abschluss entlang der seitlichen Bein form bis zur Mitte der Knie Scheibe gemessen.

FUSSHEBE-SLEEVE

Als Erweiterung unserer BODYGUIDE®-Serie im Bereich zur Versorgung der Extremitäten ist der Fuß/Unterschenkel-Fußhebesleeve mit fußhebenden Eigenschaften entwickelt worden. Durch die Schnittkonstruktion und der Integration von Korrekturzügen unterstützt der „Fußhebesleeve“ die Anhebung des Fußes in Richtung Dorsalextension. Insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit leichten muskulären Defiziten der fußhebenden Muskelgruppen oder auch schlaffen Lähmungen wie z. B. Fallfuß kann durch das Tragen eine Minimierung der Stolpergefahr während der Schwungphase und eine Verbesserung des Gangbildes erzeugt werden. Das Haftband am proximalen Ende verhindert ein verrutschen des Strumpfes auch bei höheren Aktivitäten. Optional kann der Strumpf auch 2-lagig und einem zusätzlichen Haftband am distalen Ende des Strumpfes gefertigt werden.





Der Grundpreis beinhaltet:

- 1-lagige Ausführung
- Korrekturzüge
- Haftband am oberen Abschluss
- 1 Änderung nach Anprobe

! Bitte nutzen Sie unsere Maßblätter als Kopiervorlage.

Für eine Bestellung bitte jeweils Maßblatt 1 für die Maßangaben sowie Kontaktdaten und Maßblatt 2 für die gewünschte Ausführung ausfüllen.

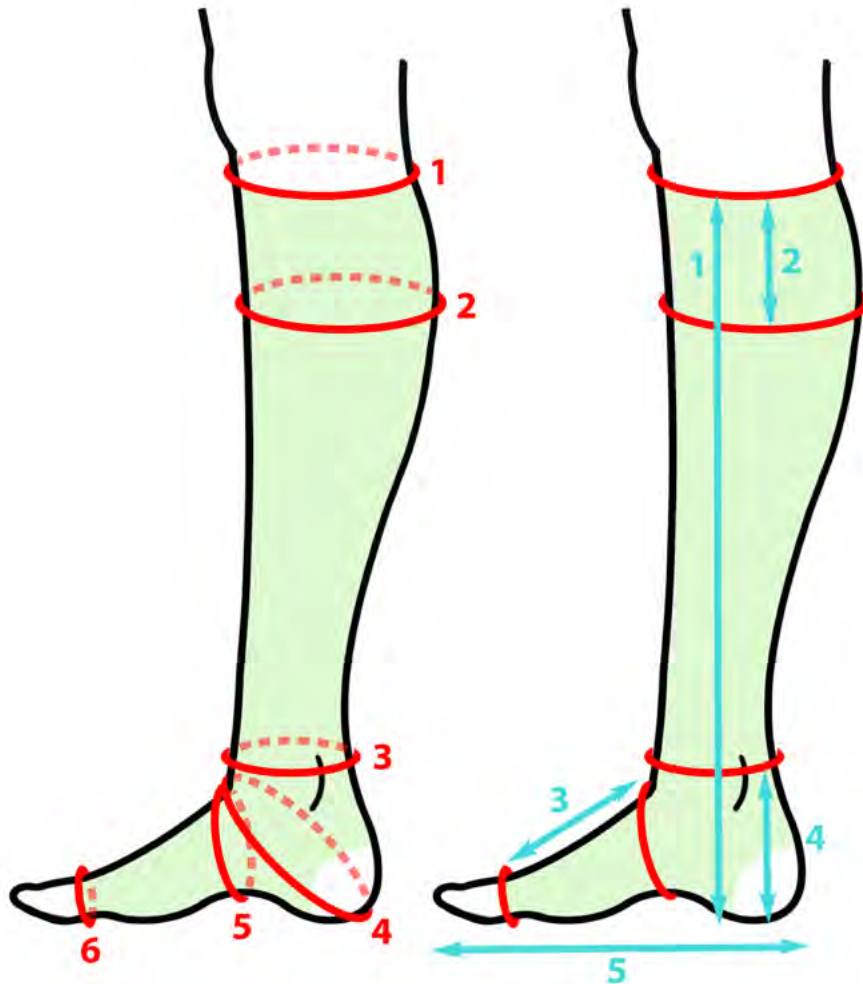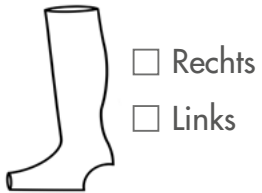

- 1. Oberer Abschluss
- 2. Wadenumfang
- 3. Fesselumfang
- 4. Rist (Fersenumfang)
- 5. Spann
- 6. Unterer Abschluss

Umfangmaße

- 1. Gesamtlänge (Oberer Abschluss-Sohle)
- 2. Wadentiefe (Oberer Abschluss-Wade)
- 3. Spannlänge (Unterer Abschluss-Rist)
- 4. Fesselhöhe (Fessel-Sohle)
- 5. Fußlänge (Zehen-Ferse)

Längenmaße

KONTAKTDATEN	<input type="checkbox"/> ANGEBOT <input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:
Anschrift:	Alter: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:
	Diagnose:
Telefon:	Ansprechpartner:
Datum:	Unterschrift:

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)

2. Ausführung:

- 1-lagig
 2-lagig

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
3. Haftband:

- Oberer Abschluss
 Unterer Abschluss


4. Verschluss:

- Reißverschluss Klettverschluss


(Bitte Position und Länge auf dem Skizzenblatt einzeichnen oder angeben.)



Black

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

White

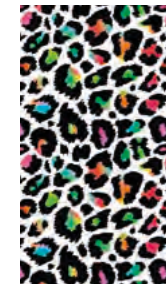


Leo



Zebra




Fire

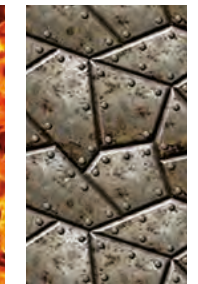

Metal




Rose

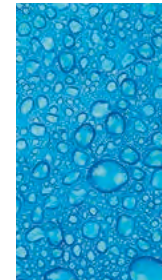

Rain




Zoo

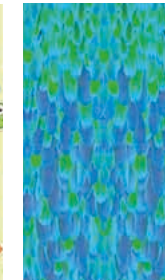

Wings



Wall

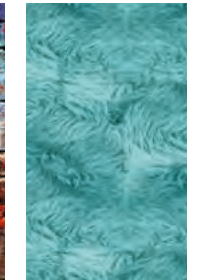

Fur



Silver



Flash



Pirates



Unicorn



Splash Pink



Flowers

5. Reißverschlüsse und Nähte

Passend zum Design


Kontrastfarbe:

- | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé | |

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.

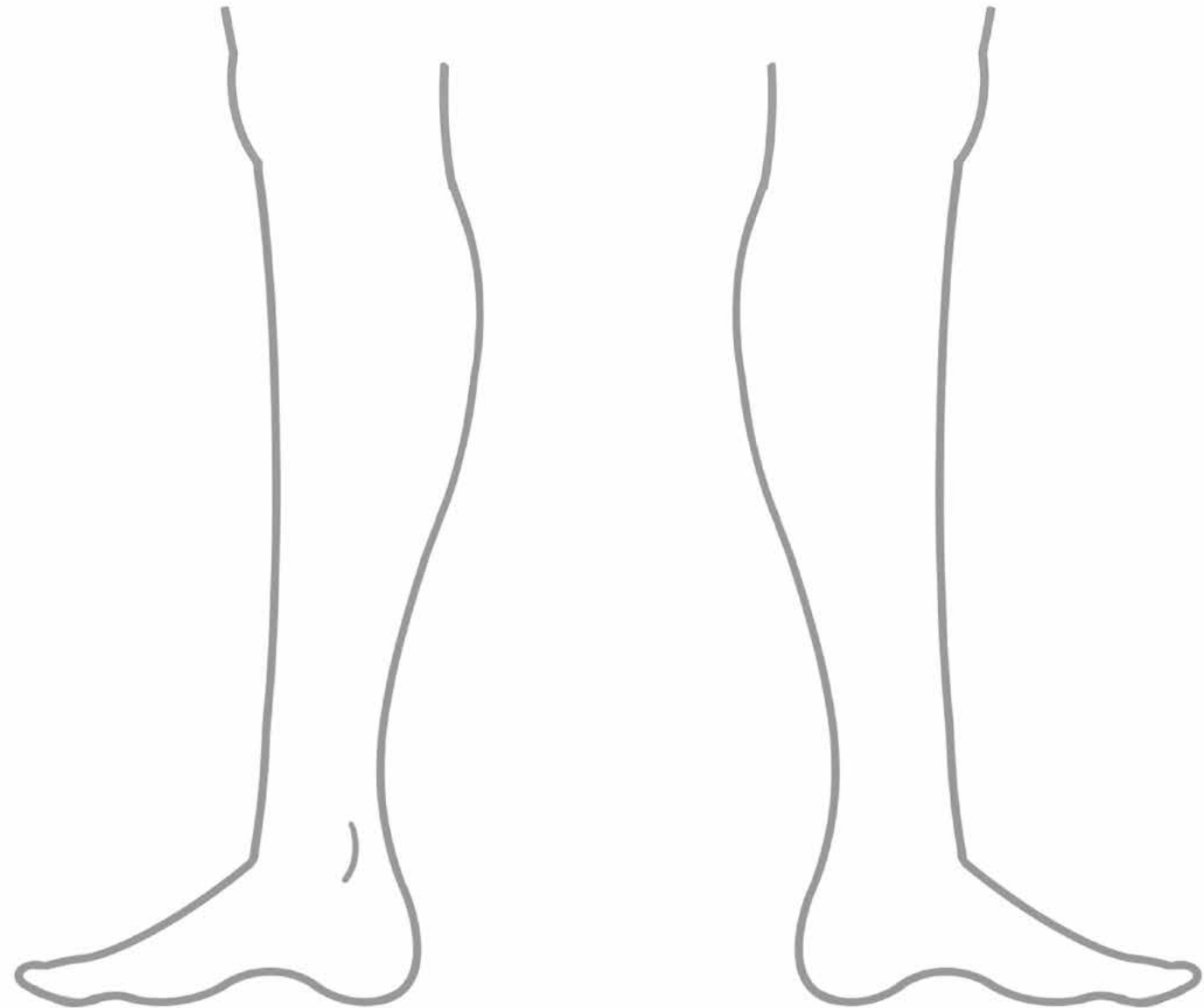

AUSSENFUSS

INNENFUSS

! Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage.


Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungs-, und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.

MASSANLEITUNG


für BODYGUIDE® Fußhebe-Sleeve

Alle Maße sollten glatt am Körper, also nicht zu stramm und nicht zu locker gemessen werden. Um genaue Längenmaße zu erhalten, ist es sinnvoll bei allen Umfangsmaßen eine kleine Linie mit einem abwaschbaren, hautfreundlichen Stift auf dem Körper zu markieren.

Die Umfangsmaße sind auf den Maßblättern und in der Anleitung **rot** markiert, die Längenmaße **türkis**. Alle **dunkelblau** markierten Positionen sind Hilfslinien.

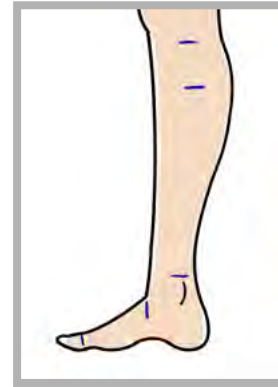

Als erstes sollte die Gesamtlänge des Fußhebesleeves festgelegt werden und auf dem Bein markiert werden. Danach werden alle dazwischen liegenden, benötigten Umfangsmaße ermittelt und ebenfalls markiert. Liegt ein Umfangsmaß des Maßblattes außerhalb des späteren Sleeves, muss es selbstverständlich nicht genommen werden.

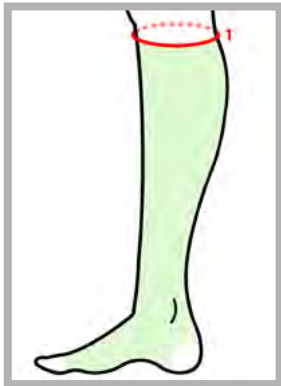


1. Oberer Abschluss

Der Obere Abschluss liegt üblicherweise unterhalb des Knies. Er wird auf Höhe der zuvor festgelegten Position waagrecht, zirkulär gemessen.




3. Fesselumfang

Der Umfang der Fessel wird direkt oberhalb des Knöchels, an der schmalsten Stelle des Unterschenkels gemessen.

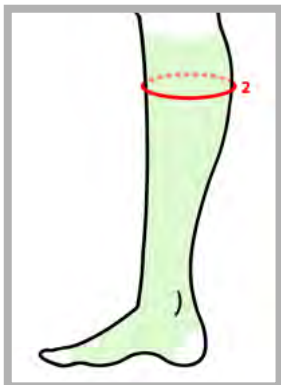

2. Wadenumfang

Der Wadenumfang wird waagrecht, auf Höhe der stärksten Stelle der Wade gemessen. Sie befindet sich meist im oberen Bereich der Wade.

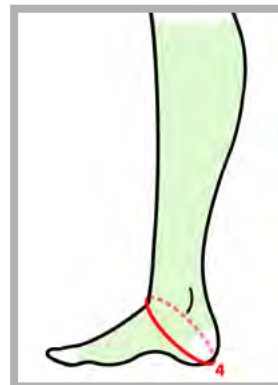


4. Rist (Fersenumfang)

Dieser Umfang wird diagonal über die Fersenrundung und den Rist gemessen.




5. Spann

Der Spann-Umfang wird zirkulär an der höchsten Stelle des Fußrückens vor dem Übergang zum Schienbein gemessen.

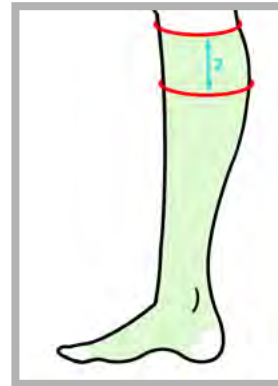


2. Wadentiefe

Hier wird die Strecke zwischen den zuvor markierten Positionen Oberer Abschluss bis zum stärksten Umfang der Wade gemessen.

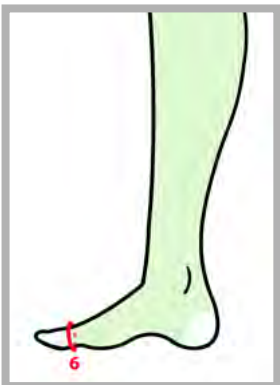

6. Unterer Abschluss

Der Untere Abschluss liegt üblicherweise vor dem Bereich der Zehen. Er wird auf Höhe der zuvor festgelegten Position zirkulär gemessen.

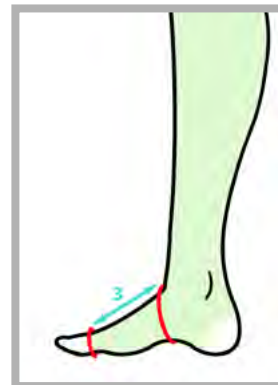


3. Spannlänge

Diese Strecke wird von der zuvor markierten Position unterer Abschluss bis zur Position 5 (Umfang Spann gemessen).



1. Gesamtlänge

Hier wird vom zuvor markierten oberen Abschluss bis zur Sohle gemessen.

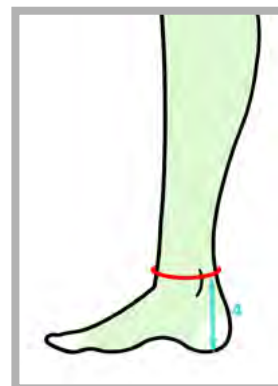

4. Fesselhöhe

Hier wird vom oberen Abschluss entlang der seitlichen Beinfom bis zum unteren Abschluss gemessen



5. Fußlänge

Hier wird die gesamte Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehen gemessen.



NOTIZEN



Mehr Informationen finden Sie unter
www.caroli.de





Heinrich Caroli GmbH

Eichrodstraße 13
D-77933 Lahr/Schwarzwald

Telefon: +49 (0) 78 21 | 93 99 33
Telefax: +49 (0) 78 21 | 93 99 34
info@caroli.de

www.caroli.de