

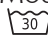
## Reinigung

Bitte beachten Sie die aufgeführten, modellabhängigen Hinweise zur Reinigung.

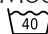
Modell: HerniaPanty COMFORT, SWIMMER, TRIA, SUPPORT BELT, BOXER, SPORTY (650, 651, 652, 648, 655, 655B, 690, 657, 603, 609, 610)

 Nur Handwäsche bei 30°

Modell: HerniaPanty SPORTSMAN (20300)

 Normalwaschgang bis maximal 30°C  
(Pelotten vorher entfernen, diese dürfen nur feucht mit einem Tuch abgewischt werden)

Modell: HerniaPanty SENATOR (515)

 Normalwaschgang bis maximal 40°C

Bitte beachten Sie die aufgeführten Hinweise zur Reinigung.


- Nicht chemisch reinigen
- Nicht bleichen
- Nicht bügeln
- Das Produkt ist nicht für den Wäschetrockner geeignet

## Nutzungs- und Lebensdauer

Dieses Medizinprodukt ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt und unterliegt keiner vorgegebenen, zeitlich begrenzten Nutzungsdauer. Bei Beschädigungen, Anzeichen auf Verschleiß oder Defekt darf dieses Produkt jedoch nicht weiter verwendet und muss ggf. durch den Fachhandel repariert oder ausgetauscht werden. Durch den natürlichen Verschleiß kann selbst im Rahmen der ordnungsgemäßen Nutzung eine Erneuerung erforderlich sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel.

## Lagerung und Verfallsdatum

 Beachten Sie bitte, dass das Produkt originalverpackt in einer trockenen Umgebung unter Ausschluss von Hitze und Sonnenein-

strahlung gelagert werden.

## Entsorgung

Dieses Produkt kann gemäß den gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes entsorgt werden. Beachten Sie hierbei die Materialzusammensetzung.

## Gewährleistung

Eine Gewährleistung ist nur gegeben, wenn das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Beachtung der Indikationen und der Kontraindikationen sowie einer sachgemäßen Handhabung eingesetzt wurde. Die Gewährleistung erlischt, wenn die geltenden Bestimmungen nicht eingehalten oder Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

## Konformitätserklärung CE

Wir, die  Heinrich Caroli GmbH, Eichrodtstr. 13, 77933 Lahr, sind Händler der aufgeführten Produkte. Die Bruchhose HerniaPanty SPORTSMAN (20300) wird durch  AWO SRL (Viale del lavoro 22/i, I-37036 San Martino B.A. (VR)) gefertigt, die Bruchhose HerniaPanty SENATOR (515) durch  SAFTE S.p.A. (Via Adamello, 13, I-100973 Collegno (To)), alle anderen Modelle werden durch die Firma  PAVIS S.p.A. (Via Roscini, 11/b, I-21020 Buguggiate (VA)) hergestellt. Eine Konformitätserklärung der Produkte entsprechend allen Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 liegt uns vor.

# Gebrauchsanweisung Bruchhosen

HerniaPanty BOXER, TRIA, SUPPORT BELT, SWIMMER, COMFORT, SENATOR, SPORTSMAN, SPORTY

(Art. 650, 651, 652, 648, 655, 655B, 690, 657, 603, 609, 610, 20300, 515)



# CAROLI

 Heinrich Caroli GmbH

Eichrodtstraße 13

77933 Lahr

Tel.: 07821 / 9399-33, Fax: 07821 / 9399-34

E-Mail: [info@caroli.de](mailto:info@caroli.de), Web: [www.caroli.de](http://www.caroli.de)

# CAROLI

## Einleitung

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Heinrich Caroli GmbH entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder den medizinischen Fachhandel, von dem Sie dieses Produkt erhalten haben.



## Zweckbestimmung

Die Bruchhosen sind ein Medizinprodukt zur konservativen Behandlung von reponierbaren (zurücklegbaren), leichten bis mittelstarken Leistenbrüchen. Durch die Kompression und den zusätzlich integrierbaren Druckkissen (Pelotten) kann das Ausdringen eines Bruches verhindert werden.

## Indikationen

Das Produkt kann angewendet werden bei:

- weichen reponierbaren (zurückführbaren), leichten bis mittelstarken Leistenbrüchen
- nach einer Hernienoperation
- zur Vorbeugung erneuter Brüche (Hernien)
- zur Stützung der Leiste und des Unterleibes

## Kontraindikationen

Das Produkt darf nicht angewendet werden bei:

- lymphatischen Störungen
- nicht reponierbaren Leistenbrüchen
- unklaren Schwellungen unterhalb der Tailenlinie
- Empfindungs- und Durchblutungsstörungen im betroffenen Körperbereich
- Hauterkrankungen oder Hautirritationen in dieser Körperregion

## ⚠ Sicherheitshinweise und Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Verwendung dieses Medizinproduktes sind bisher keine Nebenwirkungen bekannt. Bei allen orthopädischen Hilfsmitteln kann es allerdings zu unerwünschten Nebenwirkungen

kommen, wenn diese zu fest angelegt werden oder Passformprobleme auftreten. Dies kann zu lokalen Druckerscheinungen oder zur Einengung von Blutgefäßen und Nerven führen.

Bitte beachten Sie die Angaben Ihres verordnenden Arztes zur Anwendung und Tragedauer dieses Produktes.

Schwerwiegende Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. „Schwerwiegendes Vorkommnis“ wird ein Ereignis genannt, das eines der folgenden Kriterien erfüllt, erfüllen könnte oder erfüllt hat:

- Das Versterben des Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
- Der Gesundheitszustand des Patienten, Anwenders oder einer anderen Person verschlechtert sich vorübergehend oder dauerhaft schwerwiegend,
- Die öffentliche Gesundheit ist einer schwerwiegenden Gefahr ausgesetzt.

Nicht schwerwiegende Vorkommnisse melden Sie bitte Ihrer Verkaufsstelle (Leistungserbringer/Sanitätshaus).

## ⚠ Hinweise

- Dieses Medizinprodukt muss durch qualifiziertes Fachpersonal entsprechend der patientenspezifischen Gegebenheiten ausgewählt und ggf. angepasst werden.
- Vor der Benutzung dieses Produktes ist eine Einweisung durch einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal erforderlich.
- Eine falsche Produktauswahl, Anpassung oder Anwendung kann zu einer fehlenden Wirkung oder gesundheitlichen Schäden führen.
- Bitte beachten Sie die Indikationen und die Kontraindikationen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise des Arztes oder des medizinischen Fachhandels.
- Überprüfen Sie das Medizinprodukt vor dem Anlegen auf Beschädigungen.
- Bei Beschädigungen oder mangelnder Funktion darf das Produkt nicht weiter ver-

wendet werden.

- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden.
- Bei plötzlich auftretenden Schmerzen um den Bruch, starke Rötung, Überwärmung oder Taubheit im betroffenen Bereich, die Bruchhose sofort abnehmen.
- Nicht über Nacht anwenden, sondern nur bei körperlicher Belastung tragen.
- Nicht auf offene Wunden oder Hautirritationen legen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben und Lotion.
- Das Produkt ist zur Anwendung an einem Patienten vorgesehen und nicht zur Wiederverwendung weiterer Personen bestimmt.



## Wartung

Wir empfehlen dieses Medizinprodukt in regelmäßigen Abständen, jedoch spätestens alle 6 Monate auf Funktionalität und Verschleiß durch einen medizinischen Fachhandel überprüfen zu lassen.

## Anleitung zum An- und Ablegen

Beachten Sie, dass vor dem Anziehen der Bruchhose der Bruch vollständig reponiert sein muss! Das Reponieren des Bruches erfolgt am besten in liegender Position auf dem Rücken. Eine Einweisung zu diesem Vorgang ist unerlässlich und sollte durch Ihren behandelnden Arzt oder medizinischen Fachhandel erfolgen.

Die Bruchhosen werden wie eine Unterhose angezogen und direkt auf der Haut getragen. Das Tragen von Unterwäsche ist hierbei nicht erforderlich.

Bei der Verwendung der zusätzlichen Druckkissen ist darauf zu achten, dass diese die Bruchpforte vollständig bedecken, um ein Ausdringen des Bruches zu verhindern.

## Materialzusammensetzung

Baumwolle (CO), Elasthan (EL)  
Die genaue Materialzusammensetzung entnehmen Sie bitte dem Etikett am Produkt.